

器25 医療用鏡
一般医療機器 再使用可能な内視鏡用非能動処置具 (38818000)

ロボティック鉗子


【警告】

＜使用方法＞

クロイツフェルト・ヤコブ病 (CJD) の患者、又はその疑いのある患者に使用した器具を再使用する場合には、最新の国内規制、ガイドラインを遵守すること。[二次感染の恐れがあります]

【形状・構造及び原理等】

形状・構造

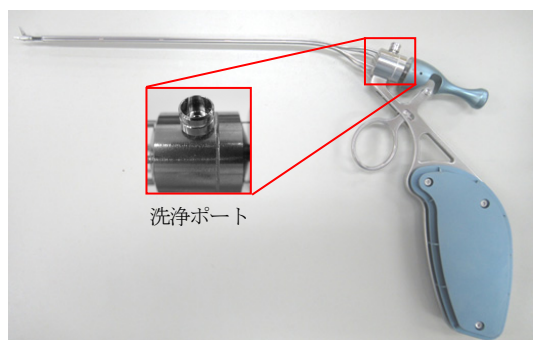

商品コード	商品名
07-795-01	ロボティック鉗子 15 c m

原材料: ステンレス鋼、チタン合金、ニッケルチタン合金

【使用目的又は効果】

本品は、内視鏡治療時に専用の内視鏡とともに使用する器具で、組織又は異物の把持、回収、切除等の機械的作業に用いるものをいう。本品は再使用可能である。

【使用方法等】

本品のご使用前には必ず点検を行い、洗浄、滅菌を行ってください。
(保守・点検に係る事項をご参照ください)

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

本品は未滅菌品です。使用に際しては必ず洗浄し、適切に機能することが確認された標準的滅菌条件又は医療機関で滅菌バリデーションが検証され、有効性が立証された滅菌条件で滅菌を行ってご使用ください。

2. 不具合・有害事象

不具合事象

- ・化学薬品等の使用による腐食・孔食
- ・腐食や孔食による折損・破損

有害事象

- ・折損や破損片の体内遺残

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

本品は高温・高湿を避け、温度や湿度が極端に変化しない場所に保管してください。

2. 耐用期間

指定した保守点検及び適切な保管をした場合: 1 年

[自己認証 (自社データ) による]

【保守・点検に係る事項】


＜使用者による保守点検事項＞

1. 使用前の点検事項

(1) 動作、機能チェックの実施

本品は、日常点検及び使用前点検により、正常に機能することを確認してください。

(2) 赤枠内のワイヤー部に折損が無いことを確認してください。

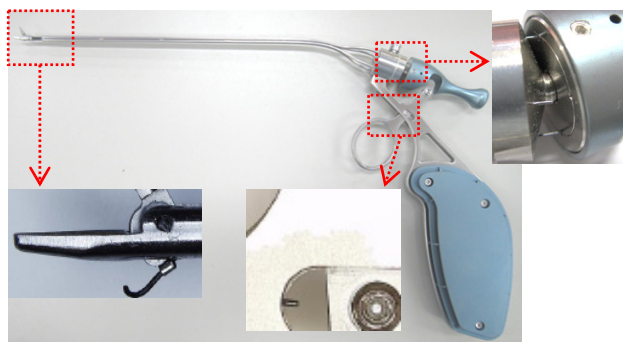

2. 使用後の点検事項

(1) 直ちに清水で洗浄する

- (1)-1 本品が漂白剤、消毒液等の塩素及びヨウ素を含む溶液に曝された場合には、直ちに清水で洗浄し中性酵素洗剤に浸漬してください。その後用手洗浄、超音波洗浄にて汚染物を除去してください。
- (1)-2 洗浄ポートへシリンジ等を接続して内腔をフラッシュするために、蒸留水または脱イオン水を使用してください。
- (1)-3 汚れの残存がある箇所はブラッシングによる物理的洗浄を追加してください。
- (1)-4 洗浄剤や消毒剤の使用にあたり、製造業者の取扱説明書に従い、希釈濃度、湿度、及び浸漬時間等については遵守してください。
- (1)-5 洗浄の際には柔らかい素材のタオル、プラスチック製ブラシ、ウォータージェットを使用してください。
- (1)-6 金属製のブラシや粗い研磨材を使用することや過度の力を加えること、機器を落としたりぶつけたりすること等がない様にしてください。
- (1)-7 洗浄水には完全脱イオン水 (RO 水: Reverse Osmosis) を推奨します。
- (1)-8 仕上げすずぎは完全脱イオン水 (RO 水) を使用してください。

※本品の洗浄・消毒はウォッシャーディスインフェクタの併用を推奨します。

熱水消毒条件: 90~93℃、5~10 分間 (Ao 値: 3000~12000)

(EN ISO15883-1 参照)

(2) 洗浄後は直ぐに乾燥する

直ちに乾燥させ、湿った状態で必要以上に長時間放置することは避けてください。

- (3) 蒸留水や完全脱イオン水（RO 水）を使用する
洗淨及び滅菌に使用する水は、蒸留水や完全脱イオン水（RO 水）をご使用ください。水道水中に含まれる残留塩素及び有機物質がシミや錆発生の原因となります。
- (4) 水性潤滑・防錆保守剤を使用する
洗淨後は潤滑・防錆保守剤が完全に取り除かれています。洗淨後滅菌する前に水性潤滑・防錆保守剤を塗布してから滅菌してください。摺動部に潤滑・防錆保守剤が塗布されていない状態で機器の操作は行わないでください。[かじりの原因になります]
- (5) アルカリ性・酸性洗剤・家庭用洗剤の使用禁止
洗淨に使用する洗剤は必ず中性洗剤（pH 6～8）を使用し、アルカリ性や酸性の洗剤は使用しないでください。また、医療用洗剤を使用し、家庭用洗剤の使用は脱色や腐食の原因となるため使用しないでください。
- (6) 保守
(6)-1 洗淨後、普通の照明下で、目に見える汚れが除去できたか目視点検を行ってください。
(6)-2 汚れを目視で確認した場合、再度洗淨を行ってください。
(6)-3 可動部にガタツキが無く滑らかなことを確認してください。

＜弊社が推奨する使用後の保守点検事項＞

- (1) 洗淨準備
① 血液や体液に汚染された器具を取り扱う際は、適切な保護用のマスク、手袋、メガネ、防水用エプロン等を着用してください。
② 器具に付着した血液及び体液は乾燥させないでください。
③ 壊れやすい手術器具は先端の損傷を防ぐために注意して取り扱いください。特に洗淨及び滅菌の際は注意してください。
- (2) 洗淨
＜手動（予備洗淨）＞
① 酵素配合中性洗淨剤 1v%希釈液（40℃）を準備し下記手順で作業を行ってください。
①-1 希釈液内で先端部を 5 回開閉してください。
①-2 シリンジにて洗淨ポートへ 5ml 注入してください。
①-3 器械全体を 30 分間浸漬してください。
② ウォーターガンで洗淨ポートに 30 秒間水を通し、その後水中でトリガーバネ部に 30 秒間水を当ててください。
③ 医療用ブラシで先端部を約 1 分間ブラッシングを行ってください。

＜超音波洗淨（本洗淨）＞

- ① 酵素配合中性洗淨剤 1v%希釈液（40℃）を準備し下記手順で作業を行ってください。
①-1 希釈液内で先端部を 5 回開閉してください。
①-2 シリンジにて洗淨ポートへ 5ml 注入してください。
①-3 器械全体を 15 分間超音波洗淨してください。
② 洗淨ポートよりウォーターガンにて 1 分間水を流し、その後器械全体をシャワーで 1 分間すすぎを行ってください。

3. 滅菌

- (1) 適切に機能することが確認された高圧蒸気滅菌器による標準的滅菌条件又は医療機関で滅菌バリデーションが検証され、有効性が立証された滅菌条件で滅菌を行ってください。

標準的滅菌条件の例：高圧蒸気滅菌（日本薬局方）

滅菌温度	保持時間
115-118℃	30 分
121-124℃	15 分
126-129℃	10 分

クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)患者、又は疑いのある患者に使用した器具の滅菌条件の例：高圧蒸気滅菌(ガイドライン参照)

滅菌温度	保持時間
134℃	18 分

- (2) 過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌の禁止
本品に過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌の使用は表面が褪色し、性状に影響を及ぼすため行わないでください。

＜業者による保守点検事項＞

本品を安全に使用するために、弊社及び弊社が認めた業者による定期点検を実施してください。それ以外の業者による保守点検は、有害事象の発生、性能・機能の低下を招くおそれがあります。定期点検をご希望される場合は、ご購入店又は弊社にお問い合わせください。

【主要文献及び文献請求先】

プリオン病のサーベイランスと感染予防に関する調査研究班・日本神経学会

プリオン病感染予防ガイドライン

主要文献の問い合わせ先

ミズホ株式会社

TEL 03-3815-3096

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

ミズホ株式会社

TEL 03-3815-3096

製造業者

ミズホ株式会社 五泉工場

保証期間に係る事項

本品は納品/設置してから 1 年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。