

器01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ (70469000)

T K A手術用レッグポジショナー

【警告】

患者の任意の体位を確保するためにアクセサリで支持するときは常に患者の状態を監視すること。
[長時間の体位保持は神経麻痺の原因となることがあります。]

【形状・構造及び原理等】

形状・構造



画像は、手術台マットレス上に設置時

本体
交換式クッション

滑り止めシート
固定ベルト

商品コード	商品名
08-072-90	T K A手術用レッグポジショナー

原材料:

本体 : 硬質塩化ビニル、ウレタンフォーム
交換式クッション : ポリウレタン、ポリエステル
滑り止めシート : シリコン
固定ベルト : ナイロン

【使用目的又は効果】

本品は、手術台に付属するアクセサリをいう。

【使用方法等】

- 1) 手術台にマットレスを設置してください。
- 2) 手術台マットレスの上に 滑り止めシートを敷き、その上に本体を設置してください。
- 3) 付属の 固定ベルトを 本体側面のタブ穴・ベルト本体のベルトループに通してください。
- 4) 固定ベルトを手術台の下から取り回し、 本体の反対側もう一方のタブ穴に 固定ベルトを通し、仮固定してください。
- 5) 患者の体位に合わせて、 本体を動かし、 本体の位置を調節してください。
- 6) 調節後、 固定ベルトを締め付け、 本体を手術台に固定してください。
- 7) 患者の体位に合わせて、 交換式マットレスを交換し、調節してご使用ください。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

手術台を作動するときは他のアクセサリやテーブルトップとの接触・干渉に注意してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
本品は高温・高湿を避け、温度や湿度が極端に変化しない場所に保管してください。
2. 耐用期間
指定した保守点検及び適切な保管をした場合: 5 症例[自己認証(自社データ)による]

【保守・点検に係る事項】

1. 使用前・使用後の点検
使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認してください。
2. 清掃・消毒
血液・薬剤・汚染等の汚れは水で拭き取り、さらに消毒用アルコール・ガーゼで清拭してください。
3. 故障時のお願い
本品が故障したと思われるときは、本装置に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

ミズホ株式会社

TEL 03-3815-3097

製造業者

ミズホ株式会社 五泉工場

保証期間に係わる事項

本品は納品/設置してから5症例もしくは1年間のどちらか早い方を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。