

T K A手術用大腿部ラテラルサポート


【警告】

患者の任意の体位を確保するためにアクセサリで支持するときは常に患者の状態を監視すること。

[長時間の体位保持は神経麻痺の原因となることがあります。]

【形状・構造及び原理等】

形状・構造

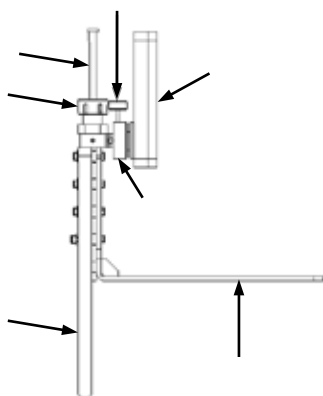

パッド
コレットホルダ
固定板
L型板

シャフト
カップリング
カバーボルト

商品コード	商品名
08-072-91	T K A手術用大腿部ラテラルサポート


原材料:

パッド : ポリエチレン、硬質塩化ビニル
コレットホルダ : 高速度工具鋼
固定板 : 硬質塩化ビニル
L型板 : ポリカーボネート
シャフト : ステンレス鋼棒
カップリング : 硬質塩化ビニル
カバーボルト : ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

本品は、手術台に付属するアクセサリをいう。

【使用方法等】

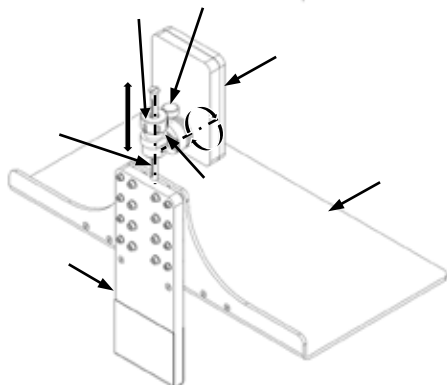

- 1) 手術台とサイドレール間の隙間に 固定板を差し込み、手術台上に L型板を設置してください。
- 2) L型板を設置した手術台にマットレスを設置し、患者の体位に合わせて、本品の位置を調節してください。
- 3) 患者の体位に合わせて、コレットホルダを反時計回りに回し緩め、パッドを垂直方向に動かし、高さを調節してください。
- 4) 調節後、コレットホルダを時計回りに回し締め、パッドを固定してください。
- 5) カバーボルトを反時計回りに回し緩め、パッドを回転軸方向に動かし、角度を調節してください。
- 6) 調節後、カバーボルトを時計回りに回し締め、パッドを固定してください。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

手術台を作動するときは他のアクセサリやテーブルトップとの接触・干渉に注意してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

本品は高温・高湿を避け、温度や湿度が極端に変化しない場所に保管してください。

2. 耐用期間

指定した保守点検及び適切な保管をした場合: 5 症例[自己認証(自社データ)による]

【保守・点検に係る事項】

1. 使用前・使用後の点検

使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認してください。

2. 清掃・消毒

血液・薬剤・汚染等の汚れは水で拭き取り、さらに消毒用アルコール・ガーゼで清拭してください。

3. 故障時のお願い

本品が故障したと思われるときは、本装置に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

ミズホ株式会社

TEL 03-3815-3097

製造業者

ミズホ株式会社 五泉工場

保証期間に係る事項

本品は納品/設置してから 5 症例もしくは 1 年間のどちらか早い方を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。