

器01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ (70469000)

M-ワンロック・アームボード

【警告】

＜使用方法＞

患者の任意の体位を確保するためにアクセサリで支持するときは常に患者の状態を監視すること。[長時間の体位保持は神経麻痺や褥瘡の原因となることがあります]


【禁忌・禁止】

＜使用方法＞


1. 当社製手術台以外では使用しないこと。[レール固定金具及び手術台のサイドレール寸法が異なるため固定できません]
2. ノブが緩んだ状態で使用しないこと。[支持器が動いて患者に傷害起きることがあります]
3. 許容荷重 (6 kg) を超える荷重を加えないこと。[支持器が動いて患者に傷害起きることがあります]

【形状・構造及び原理等】

1. 外観

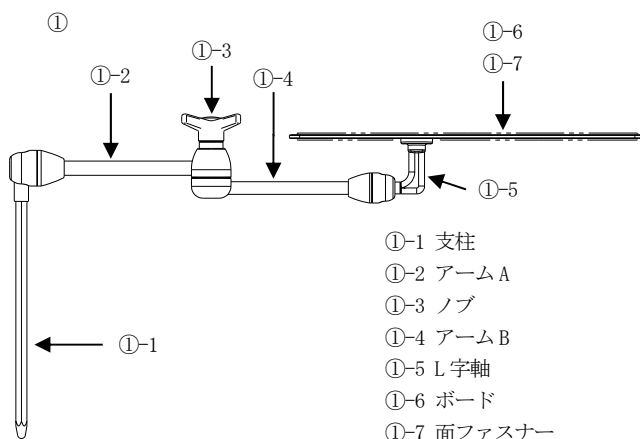

番号	商品コード	商品名	質量
①	18-086-15	M-ワンロック・アームボード 本体	3.3 kg

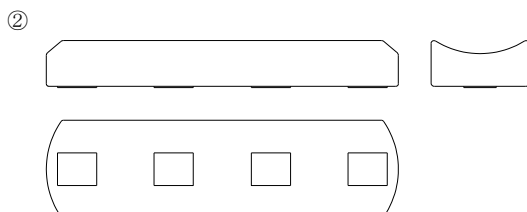

番号	商品コード	商品名	質量
②	18-086-16	M-ワンロック・アームボード用 マットレス	0.4 kg

※ 固定金具は別売りです。使用可能なレール固定金具は下表を参照してください。

商品コード	商品名	製造販売届出番号
08-110-01	レール固定金具 (大型) V e r . 2	13B1X00306N10006
08-110-20	ユニバーサルレール固定金具 (大)	13B1X00306N10007

2. 患者体重 (目安)

200 kg 以下

3. 原材料

①-1	支柱	ステンレス鋼
①-2	アーム A	
①-4	アーム B	
①-3	ノブ	銅合金、樹脂
①-5	L字軸	アルミニウム合金
①-6	ボード	樹脂
①-7	面ファスナー	ポリエステル
②	パッド	ポリウレタン ポリ塩化ビニル ウレタンフォーム ナイロン


【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリである。

【使用方法等】

1. レール固定金具への取り付け

- 1-1 当社製手術台のサイドレールにレール固定金具を取り付けます。
- 1-2 本品のノブ (①-3) を時計回りにまわし、固定します。
(着脱時に本品が意図せず動くのを防止)
- 1-3 本品の支柱 (①-1) をレール固定金具に取り付け、固定します。

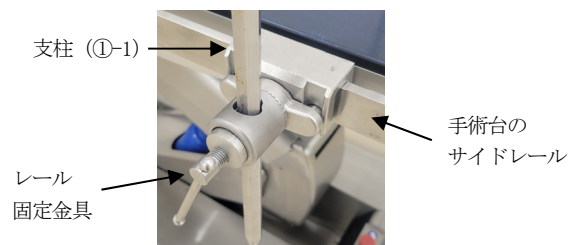

イメージ図

2. 調整および使用

2-1 片手でL字軸 (①-5) を持ち、もう一方の手でノブ (①-3) を反時計回りに回して各関節部を緩めます。

注：この時、各関節部は段階的に固定が解除されます。

まずA部の関節が緩み、さらにノブを回すとB部の関節が緩みます。(図1)

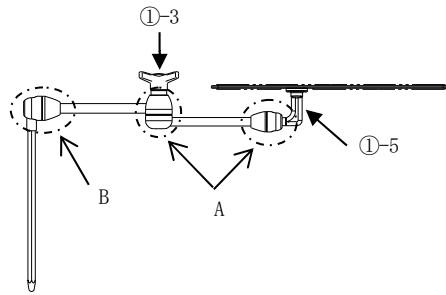


図1

2-2 患者の体位を考慮しながら、任意の位置に本品を固定します。

注：関節部に指を挟まないように注意してください。

2-3 ノブ (①-3) を時計回りに回して各関節部を固定します。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1-1 本品の支柱とレール固定金具が固定されていることを確認してください。
- 1-2 レール固定金具と手術台のレールとが固定されていることを確認してください。
- 1-3 操作中は関節部に指などを挟まないように注意してください。
- 1-4 固定を緩めずにアームの位置を変更しないでください。(劣化・破損防止のため)
- 1-5 患者の腕はバンドなどを用いて確実に固定してください。(落下事故・怪我防止のため)
- 1-6 衛生のため、患者が本品に触れる部分には必ず滅菌済ドレープを使用してください。
- 1-7 手術台を作動するときは他のアクセサリやテーブルトップとの接触・干渉に注意してください。
- 1-8 本品や関連アクセサリ、患者に異常が発見された場合には、患者に安全な状態で本品等の使用を止めるなど、適切な処置を講じてください。
- 1-9 損傷のあるパッドは交換してください。(損傷のあるパッドに水分が浸み込み、雑菌等が繁殖するのを防ぐため)

2. 相互作用

〔併用注意〕

分離式手術台での使用は分離時にストレッチャーレール受けに接触しない位置まで移動させること。接触するとテーブルトップの分離ができず本品及び併用機器が破損することがある。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

本品は高温・高湿を避け、温度や湿度が極端に変化しない場所に保管してください。

2. 耐用期間

指定した保守点検及び適切な保管をした場合：20 症例〔自己認証（自社データ）による〕

注：耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品（パッドを含む）の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。

【保守・点検に係る事項】

<使用者による保守点検事項>

1. 使用前・使用後の点検

使用前・使用後に「破損箇所がないこと」、「関節部の固定・解除が正常に機能すること」を確認してください。

2. 清掃・消毒

血液・薬剤・汚染等の汚れは水で拭き取り、さらに消毒用アルコール・ガーゼで清拭してください。なお、消毒液は弊社製手術台にて確認済みの消毒液と同一のものをご使用ください。確認済みの消毒液については手術台の取扱説明書をご参照ください。

3. 故障時のお願い

本品が故障したと思われるときは、本装置に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

<業者による保守点検事項>

本品を安全に使用するために、弊社及び弊社が認めた業者による定期点検を実施してください。それ以外の業者による保守点検は、有害事象の発生、性能・機能の低下を招くおそれがあります。定期点検をご希望される場合は、ご購入店又は弊社にお問い合わせください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

ミズホ株式会社

TEL 03-3815-3097

製造業者

ミズホ株式会社 五泉工場

保証期間に係る事項

本品は納品/設置してから20 症例もしくは1 年間のどちらか早い方を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。