

器01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ (70469000)

L型スクリーン掛 (ロボット手術用)

【禁忌・禁止】


<使用方法>

他社製手術台では使用しないこと。[他社製手術台での使用可能
は確認していません。]

【形状・構造及び原理等】

1. 外観図

ロボット手術用スクリーン掛 (ユニバーサル固定金具付)

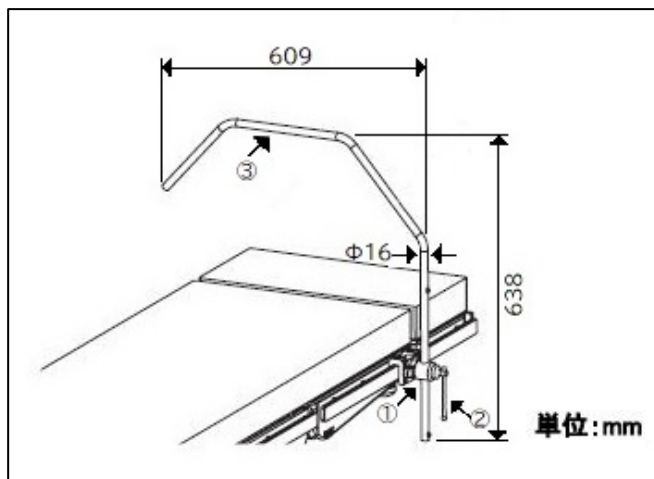

商品コード	商品名
08-062-20	ロボット手術用スクリーン掛 (ユニバーサル固定金具付)

商品コード	商品名	差込孔径 mm
08-110-20	ユニバーサルレール固定金具 (大)	16

2. 質量

本体 ロボット手術用スクリーン掛 (ユニバーサル固定金具付) : 2.8 kg

注: 本体は固定金具を含む質量
固定金具 ユニバーサルレール固定金具 (大) : 1.0 kg

3. 原材料


- ① 固定金具 : ステンレス鋼
 - ② 固定ハンドル : ステンレス鋼
 - ③ スクリーン掛 : ステンレス鋼
- 注: 番号は1. 外観図の番号に対応

【使用目的又は効果】


手術台に付属するアクセサリをいう。L型の形状をしたスクリーン掛でスクリーン等、軽量の物を掛けるために使用する。

【使用方法等】

詳細な使用方法是取扱説明書をご参照ください。

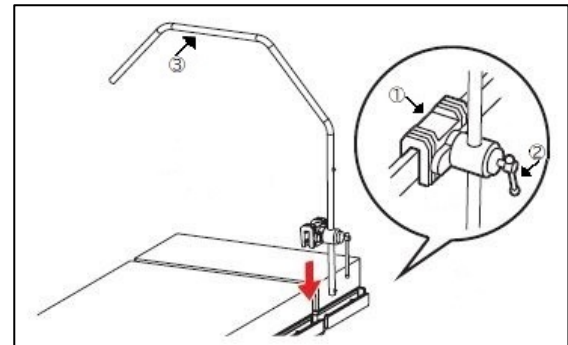

1. 手術台のサイドレールに固定金具①を差し込みます。

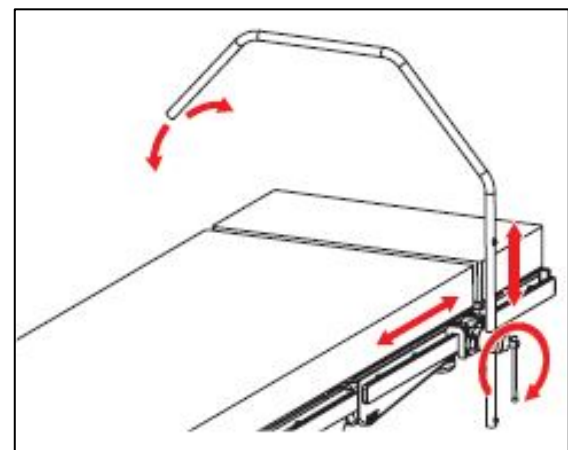

2. スクリーン掛③を手で保持し、患者の体位に合わせてスクリーン掛③の高さ・向きを調整します。

3. 調整後、固定ハンドル②を回してスクリーン掛③を固定します。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 締結部の固定は必ず確認してください。ゆるんだ状態では機器が外れたり、動いたりして患者に障害が起きるおそれがあります。
- 手術台を作動するときは他のアクセサリやテーブルトップとの接触・干渉に注意してください。
- 分離式手術台での使用は分離時にストレッチャーレール受けに接触しない位置まで移動してください。接触するとテーブルトップの分離ができずアクセサリが破損することがあります。
- 手術時に他の医療機器と使用する場合は、本品と接触させないでください。本品が損傷、または手術に支障が生じるおそれがあります。

取扱説明書を必ずご参照ください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管してください。

2. 耐用期間

適切な保守点検及び適切な保管をした場合：7年（注）

〔自己認証（弊社データ）による〕

注：耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品（パッドも含む）の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。

【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検事項＞

1. 使用前・使用後の点検

使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認してください。

2. 清掃・消毒

糸くずの出ない清潔な布に適量の消毒液等をつけ、本品の表面を消毒してください。手順の詳細は、取扱説明書の清掃と消毒に関する記載をご参照ください。

3. 故障時のお願い

本品が故障したと思われるときは、本品に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

＜業者による保守点検事項＞

弊社及び弊社が認めた業者のみが実施可能です。それ以外の業者による保守・点検は、有害事象の発生、性能・機能低下の事態を招くおそれがあります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ミズホ株式会社

TEL 03(3815)3097

製造業者：ミズホ株式会社 千葉工場

保証期間に係る事項

本品は納品/設置してから1年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。