


**** X線カセット固定器 側部用**

*** 【禁忌・禁止】**
他社製手術台では使用しないこと。[他社製手術台での使用可能は確認していません。]

**** 【形状・構造及び原理等】**

1. 外観図

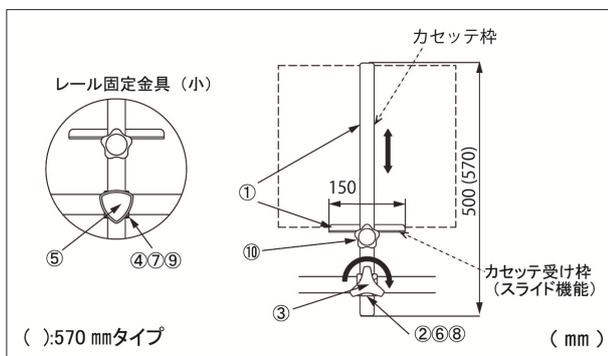

図のレール固定金具は小型 Ver. 2

商品コード	商品名	構成	質量
08-089-00	X線カセット固定器 (側部用)	①④ ⑤⑩ 注1	1.1 kg
08-089-03	X線カセット固定器側部用 570mmタイプ 固定金具付	①④ ⑤⑩ 注1	1.4 kg
08-089-03-NC	X線カセット固定器側部用 570mmタイプ 本体のみ	①⑩ 注2	1.2 kg
08-089-05	X線カセット固定器 側部用 570mmタイプ 固定金具小型 Ver. 2付	①② ③⑩ 注3	1.6 kg
08-111-00	レール固定金具 (小)	④⑤ 注4	0.2 kg
08-111-11	レール固定金具小型 Ver. 2	②③ 注5	0.4 kg
08-117-02	レール固定金具 小 (R1)	⑤⑦ 注6	0.2 kg
08-117-10	レール固定金具 (小型) Ver. 2 (R1)	③⑥ 注7	0.4 kg
08-117-12	レール固定金具 小 (R2)	⑤⑨ 注8	0.2 kg
08-117-13	レール固定金具 (小型) Ver. 2 (R2)	③⑧ 注9	0.4 kg

注1：注4が付属

注2：注6・7・8・9を選択可能

注3：注5付属

注4・5・6・7・8・9は取付可能なサイドレール寸法が異なる

注10：番号は1. 外観図の番号に対応

2. 原材料

①カセット固定器：ステンレス鋼棒

②⑥⑧レール固定金具 (小型) Ver. 2 (含R1・R2)
：ステンレス鋼鋳鋼品

③固定ハンドル：アルミニウム合金及びステンレス鋼棒

④⑦⑨レール固定金具 小 (含R1・R2)
：ステンレス鋼鋳鋼品


⑤固定ハンドル：プラスチック成型品及びステンレス鋼棒

⑩固定ノブ：プラスチック成型品及びステンレス鋼棒
注：番号は1. 外観図の番号に対応

*** 【使用目的又は効果】**

手術台に付属するアクセサリ。患者の側部を撮影するためのカセットホルダーをセットする器具。

**** 【使用方法等】**

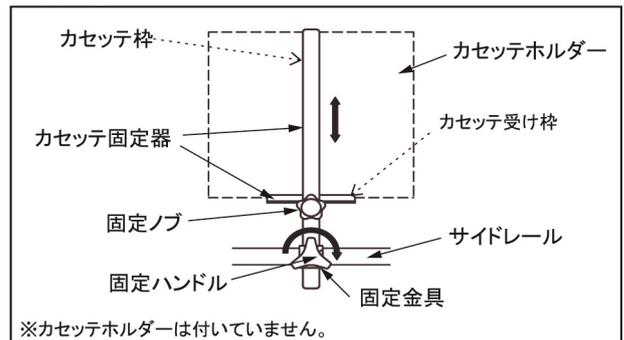

図のレール固定金具は小型 Ver. 2

- 手術台のサイドレールに固定金具を取り付けます。
 - カセット固定器を固定金具に差し込み、固定ハンドルを締めます。
 - カセット固定器にカセットホルダーを取り付け、固定ノブを締めてカセット受け枠を固定します。
 - 患者の体位に合わせてカセット固定器を動かし位置を調整します。
 - 調整後、固定ハンドルを締めて固定金具およびカセット固定器を固定します。
- 注：カセット受け枠のスライド機能により四っ切と六っ切がセット可能です。

****【使用上の注意】**

1. 重要な基本的注意

① 締結部の固定は必ず確認してください。ゆるんだ状態では器機が外れたり、動いたりして患者に障害が起きるおそれがあります。

② 手術台を作動させるときは他のアクセサリやテーブルトップとの接触・干渉に注意してください。

2. 相互作用

[併用注意]

分離式手術台で使用する場合は、分離時にストレッチャーレール受けに接触しない位置まで移動してください。接触するとテーブルトップの分離ができずアクセサリが破損することがあります。

***【保管方法及び有効期間等】**

1. 保管方法

高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管してください。

2. 耐用期間

適切な保守点検及び適切な保管をした場合：7年（注）

[自己認証による]

注：耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。

***【保守・点検に係る事項】**

<使用者による保守点検事項>

1. 使用前・使用後の点検

使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認してください。

2. 清掃・消毒

血液・薬剤・汚染等の汚れは水で拭き取り、さらに消毒用アルコール・ガーゼで清拭してください。

3. 故障時のお願い

本装置が故障したと思われるときは、本装置に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

<業者による保守点検事項>

弊社及び弊社が認めた業者のみが実施可能です。それ以外の業者による保守・点検は、有害事象の発生、性能・機能低下の事態を招くおそれがあります。

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：ミズホ株式会社

TEL 03(3815)3097

製造業者：ミズホ株式会社千葉工場

【保証期間に係る事項】

本品は納品/設置してから1年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。