

器01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ (70469000)

馬蹄型頭受

**

【警告】

<使用方法>

患者の任意の体位を確保するためにアクセサリで支持するときは、常に患者の状態を監視すること。[長時間の体位保持は神経麻痺や褥瘡の原因になります。]

**


【禁忌・禁止】

<使用方法>

1. 他社製手術台では使用しないこと。[他社製手術台での使用可能を確認していません。]
2. 【使用方法等】の項目2. に示す取付可能なアクセサリ以外では使用しないこと。[他機種での使用可能を確認していません。]

** 【形状・構造及び原理等】

1. 外観図

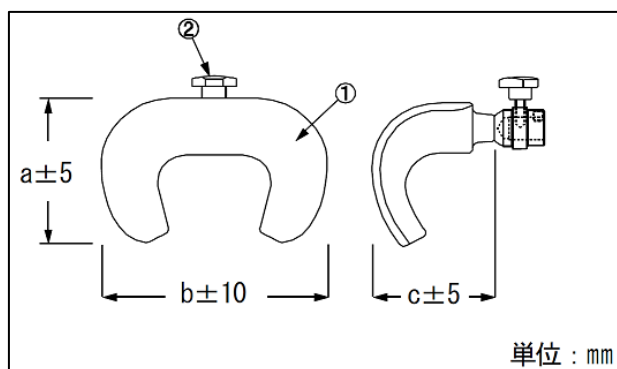

商品コード	商品名	a(mm)	b(mm)	c(mm)	構成
08-073-03	馬蹄型頭受 (大)	150	200	126.5	①②
08-073-04	馬蹄型頭受 (小)	110	170	65	①②

2. 原材料

① 頭受 : ポリウレタン/アルミニウム合金

② 固定ハンドル : ステンレス鋼


注：番号は1. 外観図の番号に対応

** 【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリをいいます。患者の頭部を支持するための器具です。

** 【使用方法等】

1. 使用方法

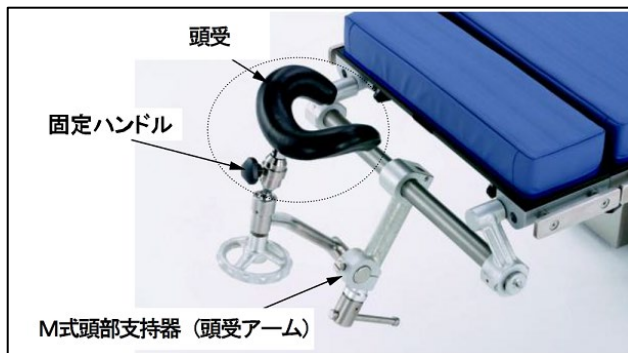

1. 予め手術台に取り付けられたM式頭部支持器（頭受アーム）、脳外科用座位フレーム 50cm幅又はヘッドアームベースの先端位置に本品を取り付け、任意の位置に調整します。
(上図はM式頭部支持器（頭受アーム）の場合)
2. 固定ハンドルを締め固定します。

2. 取付可能なアクセサリ

販売名	多目的ヘッドフレーム
製造販売届出番号	13B1X00306G00383
商品コード	07-952-00
商品名	M式頭部支持器（頭受アーム）

販売名	脳外科用座位フレーム
製造販売届出番号	13B1X00306N10167
商品コード	07-953-01
商品名	脳外科用座位フレーム 50cm幅

販売名	X線透過多目的ヘッドフレーム
製造販売届出番号	13B1X00306G00388
商品コード	07-952-01
商品名	ヘッドアームベース

** 【使用上の注意】

* 重要な基本的注意

1. 締結部の固定は必ず確認してください。ゆるんだ状態では機器が外れたり、動いたりして患者に傷害が起きるおそれがあります。
2. 手術台を作動するときは他のアクセサリやテーブルトップとの接触・干渉に注意してください。
3. 分離式手術台での使用は分離時にストレッチャーレール受けに接触しない位置まで移動してください。接触するとテーブルトップの分離ができずアクセサリが破損するおそれがあります。

** 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管してください。

2. 耐用期間

適切な保守点検及び適切な保管をした場合：7年（注）

〔自己認証（弊社データ）による〕

注：耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。

＊＊【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検事項＞

1. 使用前・使用後の点検

使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認してください。

2. 清掃・消毒

血液・薬剤・汚染等の汚れを水で拭き取り、消毒液を浸したガーゼ等で清拭してください。なお、消毒液は弊社製手術台にて確認済みの消毒液と同一のものをご使用ください。確認済みの消毒液については手術台の取扱説明書をご参照ください。

3. 故障時のお願い

本品が故障したと思われるときは、本品に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

＜業者による保守点検事項＞

弊社及び弊社が認めた業者のみが実施可能です。それ以外の業者による保守・点検は、有害事象の発生、性能・機能低下の事態を招くおそれがあります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ミズホ株式会社

TEL 03(3815)3097

製造業者：ミズホ株式会社千葉工場

保証期間に係る事項

本品は納品/設置してから1年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。