

器01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ (70469000)

下肢牽引用Vアタッチメント

**

【警告】

<使用方法>

患者の任意の体位を確保するためにアクセサリで支持するときは常に患者の状態を監視すること。[長時間の体位保持は神経麻痺や褥瘡の原因になります。]

**


【禁忌・禁止】

<使用方法>


1. 他社製手術台では使用しないこと。[他社製手術台での使用可能を確認していません。]
2. 中点位置での使用が指示されているスライド機能内蔵の手術台は、中点位置以外では使用しないこと。[不安定な状態となり転倒することがあります。]

** 【形状・構造及び原理等】

1. 外観図

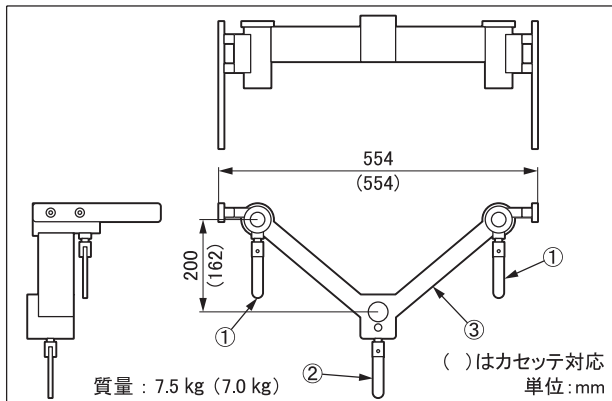

商品コード	商品名
08-115-23	下肢牽引用V字アタッチメント ピン固定
08-115-24	下肢牽引用V字アタッチメント ピン固定 (カセット対応)

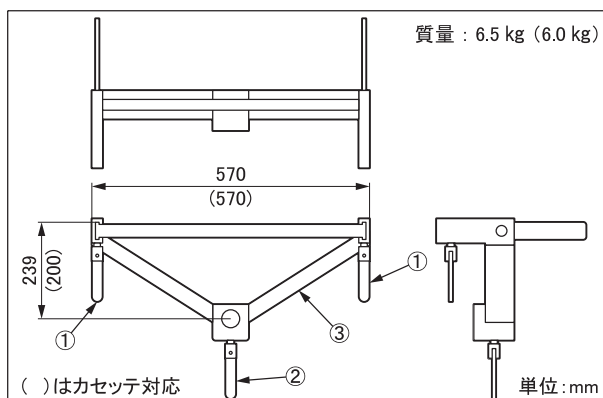

商品コード	商品名
08-115-30	下肢牽引用V字アタッチメント
08-115-31	下肢牽引用V字アタッチメント カセット対応

2. 原材料

- ① 固定ハンドル：ステンレス鋼
 - ② アーム固定ハンドル：ステンレス鋼
 - ③ V字アタッチメント：ステンレス鋼
- 注：番号は1. 外観図の番号に対応

** 【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリをいう。下肢牽引装置を取り付けるための器具。


** 【使用方法等】

詳細な使用方法是取扱説明書をご参照ください。

1. 使用方法

<下肢牽引用V字アタッチメント ピン固定>


1. 手術台の脚板を取り外します。

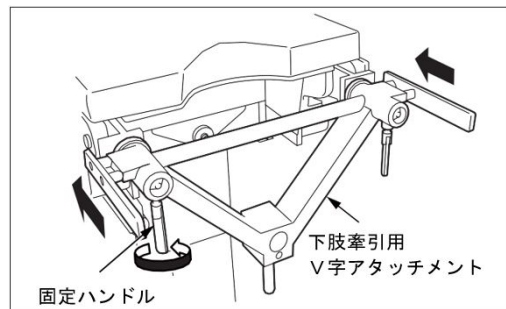

2. 本品を手術台の脚板差込軸に差し込みます。
3. 左右の固定ハンドルを回して固定します。

<下肢牽引用V字アタッチメント>

1. 手術台の脚板を取り外します。

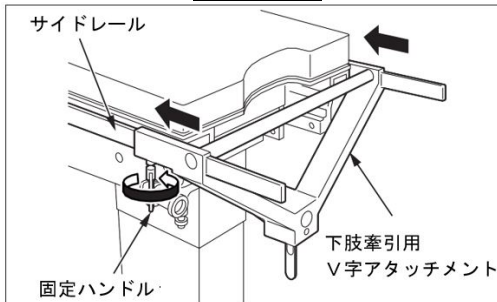

2. 本品を手術台のサイドレールに差し込みます。
3. 左右の固定ハンドルを回して固定します。

2. 使用可能な手術台

弊社製手術台

取扱説明書を必ずご参照ください。

****【使用上の注意】**

重要な基本的注意

1. 手術台を作動するときは他のアクセサリやテーブルトップとの接触・干渉に注意してください。
2. 手術台への取付は脚板差込軸又はサイドレールに完全に差し込まれていることを確認してから固定してください。完全に差し込まれていない状態では機器が外れたり、動いたりして患者に障害が起きるおそれがあります。
3. 締結部の固定は必ず確認してください。ゆるんだ状態では機器が外れたり、動いたりして患者に障害が起きるおそれがあります。
4. 本品と下肢牽引装置を取付けた状態で、手術台に固定をしないでください。必ず本品単体で手術台と固定をしてください。固定が不十分になり落下するおそれがあります。

****【保管方法及び有効期間等】**

1. 保管方法

高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管してください。

2. 耐用期間

適切な保守点検及び適切な保管をした場合：7年（注）

〔自己認証（弊社データ）による〕

注：耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。

****【保守・点検に係る事項】**

<使用者による保守点検事項>

1. 使用前・使用後の点検

使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認してください。
詳細な点検事項は、取扱説明書をご参照ください。

2. 清掃・消毒

糸くずの出ない清潔な布に適量の消毒液等をつけ、本品の表面を消毒してください。手順の詳細は、取扱説明書の清掃と消毒に関する記載をご参照ください。

3. 故障時のお願い

本品が故障したと思われるときは、本品に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

<業者による保守点検事項>

弊社及び弊社が認めた業者のみが実施可能です。それ以外の業者による保守・点検は、有害事象の発生、性能・機能低下の事態を招くおそれがあります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ミズホ株式会社

TEL 03(3815)3097

製造業者：ミズホ株式会社 千葉工場

保証期間に係る事項

本品は納品/設置してから1年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。