

器01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ (70469000)

下肢牽引装置

※※

【警告】

＜使用方法＞

1. 患者の任意の体位を確保するためにアクセサリで支持するときは常に患者の状態を監視すること。[長時間の体位保持は神経麻痺や褥瘡の原因になります。]
2. 側臥位の使用では患者の腕を上肢台に固定すること。[固定しない状態では患者に傷害が起きるおそれがあります。]

※


【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

他社製手術台では使用しないこと。[他社製手術台での使用可能は確認していません。]

※※

【形状・構造及び原理等】

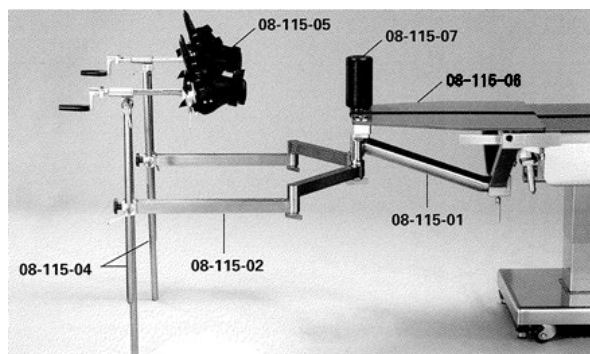

1. 構成品・原材料

No.	商品コード	商品名	原材料
1	08-115-01	牽引装置アーム	ステンレス鋼
2	08-115-02	展開アーム（2本組）	ステンレス鋼
3	08-115-04	牽引器（2本組）	ステンレス鋼
4	08-115-05	靴型（2個組）	合成皮革
5	08-115-06	幅広ベッケン（マット付）	熱硬化性樹脂・ポリウレタン
6	08-115-07	股間支柱（マット付）	炭素繊維強化樹脂・ポリウレタン
7★	08-115-08	小児用骨盤台（H）	ポリカーボネート
8	08-115-09	L型膝関節屈曲用ボール	ステンレス鋼
9	08-115-10	下肢受 下肢受け用固定金具付	ステンレス鋼
10	08-115-11	側臥位牽引用股間支柱（カラー付）	ステンレス鋼・ポリウレタン
11	08-115-12	側臥位牽引用下腿受	ステンレス鋼

No.	商品コード	商品名	原材料
12★	08-115-13	頭部台（M）	熱硬化性樹脂・ポリウレタン
13★	08-115-14	顔面受（N）	アルミニウム合金・ポリウレタン
14★	08-115-15	頭部台アーム（O）	アルミニウム合金
15★	08-115-17	牽引滑車	ステンレス鋼
16★	08-115-18	直達牽引器	ステンレス鋼
17★	08-115-19	簡易直達牽引鉤アタッチメント	ステンレス鋼
18★	08-115-20	MOS-1300用 移動式骨盤台	熱硬化性樹脂・ポリウレタン
19☆	08-115-26	骨盤補助ボード	熱硬化性樹脂・ポリウレタン
20☆	08-115-27	サポートロッド（2本組） φ25×1000mm	ステンレス鋼
21★	08-115-35	移動式骨盤台1101用	熱硬化性樹脂・ポリウレタン
22	08-115-36	股間支柱のみ	炭素繊維強化樹脂
23★	08-115-37	股間支柱用マットのみ	ポリウレタン
24★	08-115-38	下肢受け用固定金具	アルミニウム合金
25★	08-115-43	カーボン製L型膝関節屈曲用ボール	炭素繊維強化樹脂
26★	08-115-44	5601SRM 下肢牽引用側臥位用骨盤受U	熱硬化性樹脂
27★	08-115-45	ボルシヤルト用直達牽引器	ステンレス鋼
28★	08-115-60	靴型（2個組）小サイズ	合成皮革
29★	08-115-61	股間支柱及びマット + 7cmタイプ	炭素繊維強化樹脂・ポリウレタン
30★	08-115-66	幅広ベッケン用MOPマットレス 60mm厚	ポリウレタン
31★	08-115-67	牽引器 2個組 ストローク+150mmタイプ	ステンレス鋼
32★	08-115-72	股間支柱のみ + 13cmタイプ	炭素繊維強化樹脂
33★	08-056-03	ウレタンマットレス（幅広ベッケン用）	ポリウレタン
34★	08-115-73	下肢受本体のみ	ステンレス鋼
35★	08-115-76	幅広ベッケン（マット付）II	熱硬化性樹脂・ポリウレタン
36★	08-115-77	布製補助ボードII（ベッケンピン固定）	ステンレス鋼・ポリウレタン



★：オプション品 ☆：下肢牽引用Vアタッチメント使用機種標準

取扱説明書を必ずご参照ください。

商品コード	商品名	構成(注)
08-052-01	下肢牽引装置	①, ②, ③, ④, ⑤, ⑧, ⑨×2, ⑩, ⑪, ⑰, ⑱, ⑳
08-052-02	1 3 0 0 用下肢牽引装置	①, ②, ③, ④, ⑤, ⑧, ⑨×2, ⑩, ⑪, ㉔

注：番号は 1. 構成品・原材料の番号に対応

2. 外観図

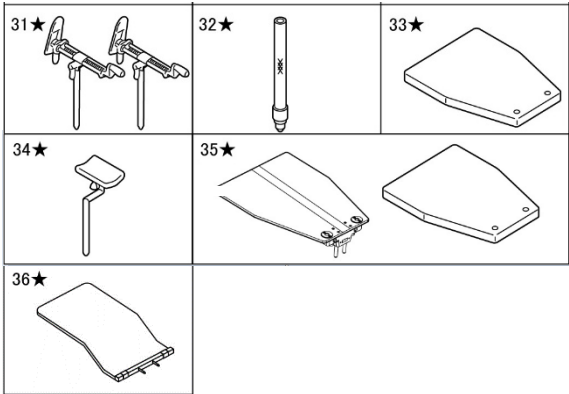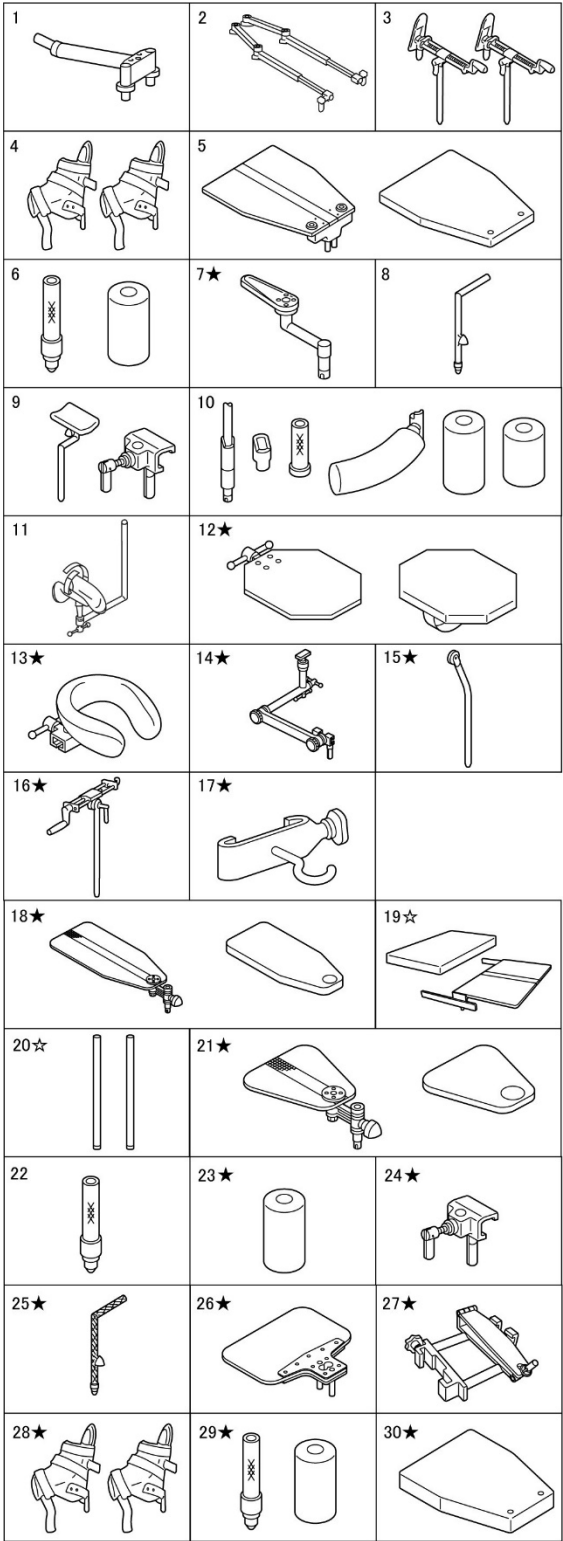

注：番号は 1. 構成品・原材料の番号に対応

＊【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリをいう。牽引手術で患者のポジションを設定するための器具。

＊【使用方法等】


詳細な使用方法是取扱説明書をご参照ください。

1. 下肢牽引装置の取付方法

- 1-1 手術台の脚板を外します。
- 1-2 牽引装置アームの差込軸と手術台の差込孔の位置を合わせます。
- 1-3 差込孔に牽引装置アームの差込軸を装着して固定ハンドルを締めます。
- 1-4 展開アームを回転又はスライドしてポジションを設定します。
- 1-5 手術の用途に合わせて構成品を取り付けます。
- 1-6 患者を乗せてポジションを設定します。


2. 下肢牽引装置の組合せ例

2-1 大腿骨頭部骨折手術位

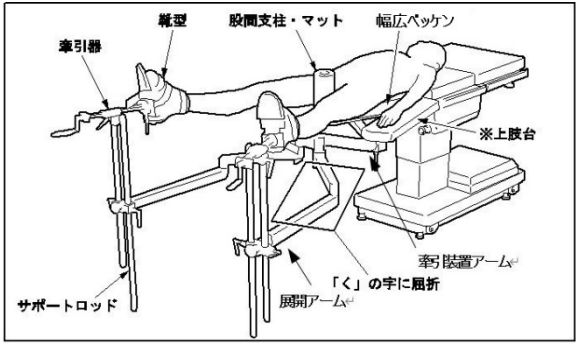


注：上肢台は別販売品です。

2-2 大腿骨骨幹部骨折手術位

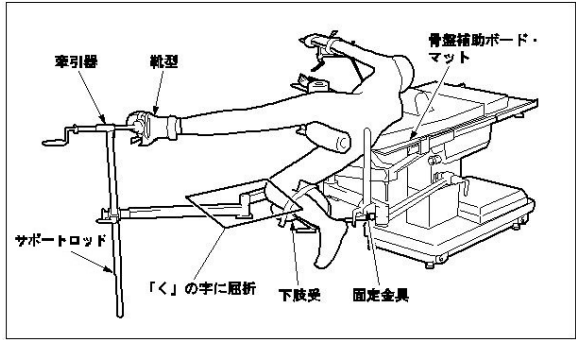

取扱説明書を必ずご参照ください。

2-3 下腿骨折手術位

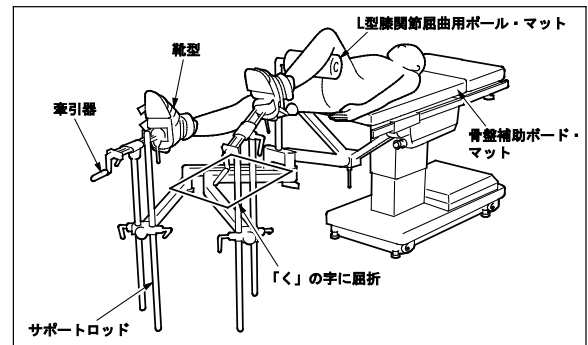

3. 使用可能な手術台
弊社製手術台

※【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 締結部の固定は必ず確認してください。ゆるんだ状態では機器が動いたり、外れたりして患者に**傷害**が起きるおそれがあります。
2. 手術台を作動するときは他のアクセサリやテーブルトップとの接触・干渉に注意してください。
3. 靴型 (No.4・28) 及び側臥位牽引用下腿受 (No.11) のバンドを無理に引っ張らないでください。破損するおそれがあります。
4. 下表の商品を使用する際はマット部分に鋭利なものをあてないでください。破損するおそれがあります。
5. 靴型 (No.4・28) ・側臥位牽引用下腿受 (No.11) 及びマットを使用する商品 (下表) は、消毒液等の種類によっては材質が劣化するおそれがあります。消毒液等を使用する前に必ず表示又は説明書の内容を確認してください。

注：No.は【形状・構造及び原理等】1. 構成品・原材料の番号に対応。

《マットを使用する商品》

No.	商品名
5	幅広ベッケン (マット付)
6	股間支柱 (マット付)
9	下肢受 下肢受け用固定金具付
10	側臥位牽引用股間支柱 (カラー付)
12	頭部台 (M)
13	顔面受 (N)
18	MO S-1300用 移動式骨盤台
19	骨盤補助ボード
21	移動式骨盤台1101用
23	股間支柱用マットのみ
29	股間支柱及びマット +7cmタイプ
30	幅広ベッケン用MO Pマットレス 60mm厚
33	ウレタンマットレス (幅広ベッケン用)
34	下肢受本体のみ
35	幅広ベッケン(マット付) II

6. 分離式手術台での使用では、分離／装着時は必ず下肢牽引装置を取り外してください。取り付け状態では分離／装着ができません。

※【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管してください。

2. 耐用期間

適切な保守点検及び適切な保管をした場合：7年 (注)
[自己認証 (弊社データ) による]

注：耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品 (マット及び靴型を含む) の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。

※【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検事項＞

1. 使用前・使用後の点検

- 1-1 使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認してください。詳細な点検事項は、取扱説明書をご参照ください。
- 1-2 靴型 (No.4・28) 及び側臥位牽引用下腿受 (No.11) は「バンドを引っ張っても破損しないこと」を確認してください。

2. 清掃・消毒

糸くずの出ない清潔な布に適量の消毒液等をつけ、本品の表面を消毒してください。手順の詳細は、取扱説明書の清掃と消毒に関する記載をご参照ください。

3. 故障時のお願い

本品が故障したと思われるときは、本品に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

＜業者による保守点検事項＞

弊社及び弊社が認めた業者のみが実施可能です。それ以外の業者による保守・点検は、有害事象の発生、性能・機能低下の事態を招くおそれがあります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ミズホ株式会社

TEL 03(3815)3097

製造業者：ミズホ株式会社 千葉工場

保証期間に係る事項

本品は納品/設置してから1年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。