

類別：機械器具（01）手術台及び治療台
一般医療機器 一般的名称：手術台アクセサリ JMDN コード：70469000

販売名：ワンタッチ側部支持器

【警告】


患者の任意の体位を確保するためにアクセサリで支持するときは常に患者の状態を監視すること。[長時間の体位は神経麻痺や褥瘡の原因となります。]

【禁忌・禁止】

他社製手術台では使用しないこと。[他社製手術台での使用可能は確認していません。]

【形状・構造及び原理等】

1. 外観図

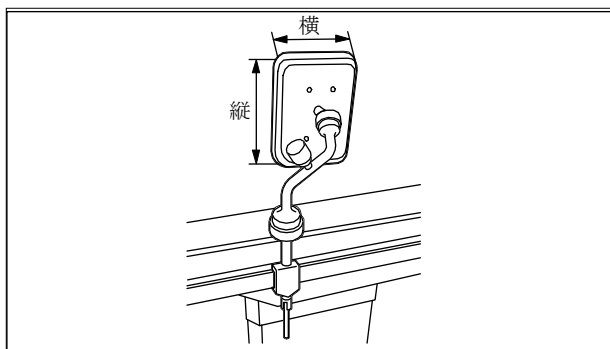


商品コード	商品名	パッド部外寸 (縦×横：mm)	質量 (kg)
08-080-01	ワンタッチ側部支持器 大 右	180×140	2.0
08-080-02	ワンタッチ側部支持器 大 左	180×140	2.0
08-080-03	ワンタッチ側部支持器 中 右	160×120	1.8
08-080-04	ワンタッチ側部支持器 中 左	160×120	1.8
08-080-05	ワンタッチ側部支持器 小 右	187×65	1.6
08-080-06	ワンタッチ側部支持器 小 左	187×65	1.6

2. 材質

パッド：発泡ウレタン

アーム及び固定ハンドル：ステンレス鋼棒

3. 作動原理

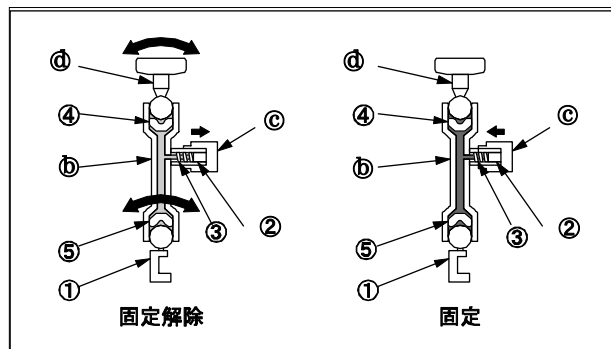

アーム⑥はパッド④及び関節部①のボール部と接するピストン④・⑤を内蔵しています。また、固定ツマミ③と接するプランジャー②とスプリング③を内蔵しています。

アーム⑥の内部には油が密閉されていて、固定ツマミ③を回すことにより油に圧力を加え、ピストン④・⑤を押し付ける圧力（油圧）となります。

3-1 固定

固定ツマミ③を締めるとプランジャー②がアーム⑥内側に移動します。

この動きによってアーム⑥内の油に圧力が加わりピストン④・⑤がパッド④及び関節部①のボール部を押しつけます。このため、油圧によりパッド④及び関節部①がアーム⑥に固定されます。

3-2 固定解除

固定ツマミ③を緩めるとプランジャー②がスプリング③の力により固定ツマミ③側に戻ります。


この動きによってアーム⑥内の油圧が弱まりピストン④・⑤がパッド④及び関節部①のボール部を押し付けていた圧力が無くなります。

このため、パッド④及び関節部①のアーム⑥との固定が解除されます。

【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリであり、側臥位のポジションで患者を支持するための器具である。

【使用方法等】

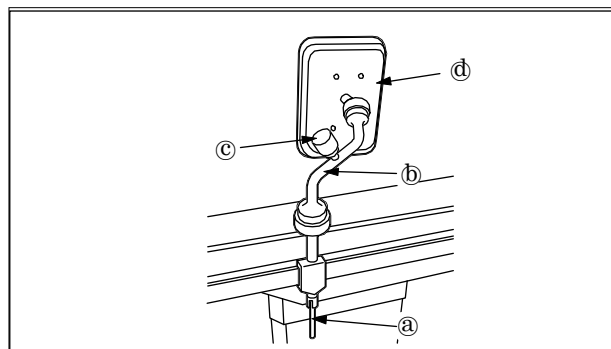

①固定ハンドル ②アーム ③固定ツマミ ④パッド

1. 手術台のサイドレールに本品を取り付けて、固定ハンドル④を締めて仮止めする。
2. 固定ツマミ③を緩めて、患者の体位に合わせてアーム①およびパッド②を動かし位置を調整する。
3. 調整後、固定ツマミ③を締めてアーム①およびパッド②を固定する。
4. 固定ハンドル④を締めて本品を固定する。

【使用上の注意】

1. 警告
締結部の固定は必ず確認してください。ゆるんだ状態では機器が外れたり、動いたりして患者に障害が起きるおそれがあります。
2. 重要な基本的注意
手術台を作動するときには他の手術台アクセサリやテーブルトップとの接触・干渉に注意してください。
3. 相互作用
[併用注意]
分離式手術台での使用では、分離／装着は必ず腰部延長ボードを取り外して行ってください。取付けた状態では、分離／装着ができません。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管してください。
2. 耐用期間
適切な保守点検及び適切な保管をした場合：7年（注）[自己認証による]
注：耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。

【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検事項＞

1. 使用前・使用後の点検
使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認してください。
2. 清掃・消毒
血液・薬剤・汚染等の汚れは水で拭き取り、さらに消毒用アルコール・ガーゼで清拭してください。
3. 故障時のお願い
本装置が故障したと思われるときは、本装置に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

＜業者による保守点検事項＞

弊社及び弊社が認めた業者のみが実施可能です。それ以外の業者による保守・点検は、有害事象の発生、性能・機能低下の事態を招くおそれがあります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ミズホ株式会社
TEL 03(3815)3097

製造業者：ミズホ株式会社 千葉工場

【保証期間に係る事項】

本品は納品/設置してから1年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。