

器 0 1 手術台及び治療台  
 一般医療機器 手術台アクセサリ (70469000)

## 小児用背板アタッチメント

\*\*

### 【警告】

#### ＜使用方法＞

1. 患者の任意の体位を確保するためにアクセサリで支持するときは常に患者の状態を監視すること。[長時間の体位保持は神経麻痺や褥瘡の原因となります。]
2. 加重、衝撃を与えないこと。[手術台との振動により“跳ね返り現象”を起こすおそれがあります。また“跳ね返り現象”により誤って血管等を傷つけるおそれがあります。]

\*\*

### 【禁忌・禁止】

#### ＜使用方法＞

1. 【形状・構造及び原理等】の項目 3. に示す許容患者体重を超えた使用をしないこと。[破損するおそれがあります。]
2. 他社製手術台では使用しないこと。[他社製手術台での使用可能は確認していません。]

### 2. 質量

本体 20 kg (ベーク板 5kg)/カセット枠 5 kg  
 /マットレス 1.8 kg 70mm ・ 2.5kg 100mm

### 3. 許容患者体重

50 kg

### 4. 原材料

- ① ボード：熱硬化性樹脂
- ② サイドレール：ステンレス鋼
- ③ 着脱レバー：炭素鋼
- ④ 差込孔：アルミニウム合金
- ⑤ カセット枠：熱硬化性樹脂
- ⑥ マットレス：ポリウレタン

注：番号は 1. 外観図の番号に対応


### \*\*【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリをいう。小児患者を支持するための器具。

### \*\*【使用方法等】

### \*\*【形状・構造及び原理等】

#### 1. 外観図

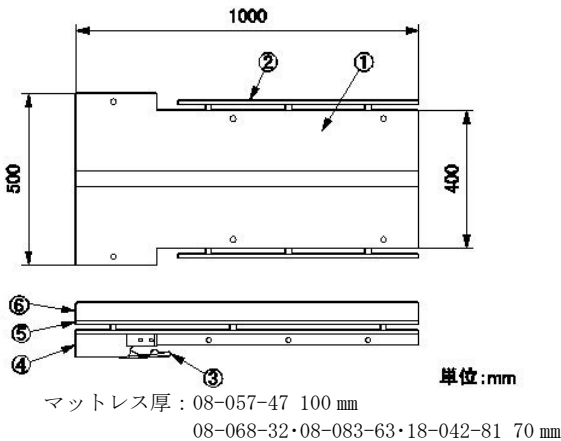

マットレスを取り付けた状態

### 1. 取り付け方

- 1-1 手術台の頭部板および背板を取り外します。
- 1-2 手術台の背板取付ピンを水平にした状態で、小児用アタッチメントの着脱レバーを同時に押しながら差し込みます。
- 1-3 小児用アタッチメントを手前に引いて、手術台に完全に差し込まれていることを確認します。
- 1-4 必要に応じてカセット枠を取り付けます。
- 1-5 専用のマットレスを取付けます。

### 2. 使用可能な手術台

弊社製手術台

### \*\*【使用上の注意】

#### 重要な基本的注意

- ① 締結部の固定は必ず確認してください。ゆるんだ状態では機器が外れたり、動いたりして患者に障害が起きるおそれがあります。
- ② 衛生のため、患者が触れる部分には必ず滅菌済ドレープを使用してください。
- ③ 手術台を作動するときは他の手術台アクセサリやテーブルトップとの接触・干渉に注意してください。

### \*\*【保管方法及び有効期間等】

#### 1. 保管方法

高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管してください。

| 商品コード     | 商品名                               | 構成       |
|-----------|-----------------------------------|----------|
| 08-057-47 | ミズホオリジナルマットレス 100mm 小児用背板アタッチメント用 | ⑥        |
| 08-068-31 | 小児用背板アタッチメント 本体                   | ①②<br>③④ |
| 08-068-32 | 小児用背板アタッチメント用マットレス                | ⑥        |
| 08-068-33 | 小児用背板アタッチメント用カセット枠                | ⑤        |
| 08-083-06 | 固定式カセット格納枠 小児背板アタッチメント用           | ⑤        |
| 08-083-45 | 固定式ベーク板 小児背板アタッチメント用              | ①        |
| 08-083-63 | ミズホオリジナルマットレス 小児背板アタッチメント用        | ⑥        |
| 18-042-81 | ミズホオリジナル難燃・防水性マットレス 小児用背板         | ⑥        |

## 2. 耐用期間

適切な保守点検及び適切な保管をした場合：7年（注）

〔自己認証（弊社データ）による〕

注：耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品（マットレスを含む）の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。

### ＊ ＊ 【保守・点検に係る事項】

#### ＜使用者による保守点検事項＞

##### 1. 使用前・使用後の点検

使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認してください。

##### 2. 清掃・消毒

血液・薬剤・汚染等の汚れを水で拭き取り、消毒液を浸したガーゼ等で清拭してください。なお、消毒液は弊社製手術台にて確認済みの消毒液と同一のものをご使用ください。確認済みの消毒液については手術台の取扱説明書をご参照ください。

##### 3. 故障時のお願い

本機が故障したと思われるときは、本機に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

#### ＜業者による保守点検事項＞

弊社及び弊社が認めた業者のみが実施可能です。それ以外の業者による保守・点検は、有害事象の発生、性能・機能低下の事態を招くおそれがあります。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ミズホ株式会社

TEL 03(3815)3097

製造業者：ミズホ株式会社千葉工場

### 保証期間に係る事項

本機は納品/設置してから1年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。