

器01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ (70469000)

手術台用エクステンションボード

※※

【警告】

＜使用方法＞

1. 患者の任意の体位を確保するためにアクセサリで支持するときは、常に患者の状態を監視すること。[長時間の体位保持は神経麻痺や褥瘡の原因となります。]
2. 使用時は必ずサポートロッドで支持すること。[偏荷重により転倒することがあります。]
3. 許容荷重を超えた荷重や衝撃を与えないこと。[手術台との振動により“跳ね返り現象”が起こり、血管等を傷つけることがあります。]

※※

【禁忌・禁止】


＜使用方法＞

1. 他社製手術台では使用しないこと。[他社製手術台での使用可能を確認していません。]
2. 【使用方法等】の項目2. に示す使用可能な手術台以外では使用しないこと。[他機種での使用可能を確認していません。]
3. 【形状・構造及び原理等】の項目3. に示す許容荷重を超えた使用をしないこと。[破損するおそれがあります。]

※※

【形状・構造及び原理等】

1. 外観図

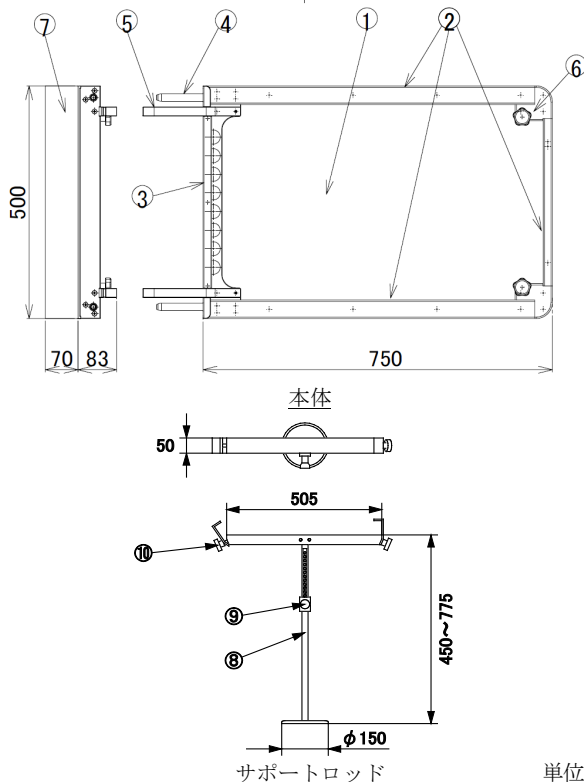

単位: mm

2. 質量

本体: 8 kg

サポートロッド: 3kg

3. 許容荷重

75 kg

4. 原材料

- | | |
|------------|-------------------|
| ① ボード | : 熱硬化性樹脂 |
| ② カーボンフレーム | : 炭素繊維強化樹脂 |
| ③ 金属フレーム | : ステンレス鋼 |
| ④ 差込ピン | : ステンレス鋼 |
| ⑤ サポートアーム | : アルミニウム合金 |
| ⑥ 固定ノブ | : 合成樹脂 |
| ⑦ マットレス | : ポリウレタン |
| ⑧ サポートロッド | : ステンレス鋼/アルミニウム合金 |
| ⑨ 調整ノブ | : 合成樹脂 |
| ⑩ 固定ハンドル | : 合成樹脂 |


注: 番号は1. 外観図の番号に対応

※※【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリをいいます。患者の背部を支持するための器具で、エックス線透過性の高い樹脂を使用しています。

※※【使用方法等】

1. 使用方法

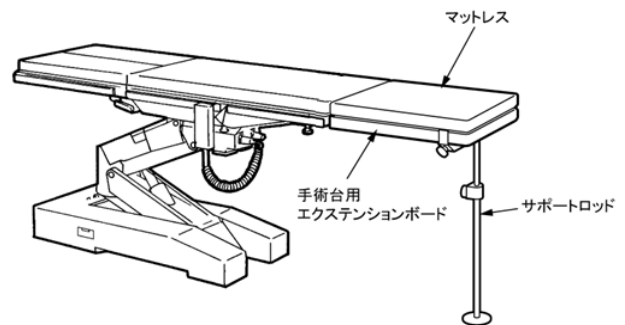

- 1-1 手術台の頭部板及び補助背板を取り外します。
- 1-2 手術台の背板を水平にした状態で、手術台背板の差込孔へ差込ピンを挿入して、手術台用エクステンションボードを装着します。
- 1-3 手術台の補助背板固定ハンドルを回して、手術台用エクステンションボードを固定します。
- 1-4 手術台用エクステンションボードを手前に引いて、手術台に完全に固定されていることを確認します。
- 1-5 サポートロッドをセットして、手術台用エクステンションボードを支持します。
- 1-6 マットレスを取り付けます。

商品コード	商品名	構成
08-018-82	MST-7201BXCT エクステンションボード 750MM(カーボン製)	①～⑩

2. 使用可能な手術台

販売名：MST-7201Bマイクロサージェリー手術台 製造販売届出番号：13B1X00306N00014
販売名：MST-7201BXマイクロサージェリー手術台 製造販売届出番号：13B1X00306N00015
販売名：MST-7201BX-CTAS 術中診断手術台システム 製造販売届出番号：13B1X00306N10051
販売名：MST-7201BXデジタル 製造販売届出番号：13B1X00306N10065
販売名：術中CT手術台 MST-7201BXデジタル CT-G 製造販売届出番号：13B1X00306N10066
販売名：マイクロサージェリー手術台 MST-7300BX 製造販売届出番号：13B1X00306N10229
販売名：マイクロサージェリー手術台 MST-7300B 製造販売届出番号：13B1X00306N10263
販売名：手術台 MST-7300BX-CT・F 製造販売届出番号：13B1X00306N10299
販売名：手術台 MST-7300BX-CT・R 製造販売届出番号：13B1X00306N10306

※※【使用上の注意】

※

重要な基本的注意

1. 締結部の固定は必ず確認してください。ゆるんだ状態では機器が外れたり、動いたりして患者に傷害が起きるおそれがあります。
2. 本品が手術台本体に完全に固定されていることを必ず確認してください。
3. 手術台を作動するときは他の手術台アクセサリやテーブルトップとの接触・干渉に注意してください。
4. 手術台と接続する部分には金属材料が使われていてエックス線を透さない部分があります。エックス線撮影に使用するときには注意してください。
5. エックス線撮影等で他の装置との接触・干渉を避けるため、サポートロッドを一時的に取り外す場合は必ず手術台をアンカーボルトで固定してください。

※※【保管方法及び有効期間等】

※

1. 保管方法

高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管してください。

2. 耐用期間

適切な保守点検及び適切な保管をした場合：7年（注）
[自己認証（弊社データ）による]

注：耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品の著しい消耗・劣化・破損等が生じた場合は該当部品の交換が必要です。

※※【保守・点検に係る事項】

※

＜使用者による保守点検事項＞

1. 使用前・使用後の点検

使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認してください。

2. 清掃・消毒

血液・薬剤・汚物等の汚れは水で拭き取り、消毒液を浸したガーゼ等で清拭してください。なお、消毒液は弊社製手術台にて確認済みの消毒液と同一のものをご使用ください。確認済みの消毒液については手術台の取扱説明書をご参照ください。

3. 故障時のお願い

本品が故障したと思われるときは、本品に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

＜業者による保守点検事項＞

弊社及び弊社が認めた業者のみが実施可能です。それ以外の業者による保守・点検は、有害事象の発生、性能・機能低下の事態を招くおそれがあります。

※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ミズホ株式会社
TEL 03(3815)3097

製造業者：ミズホ株式会社 千葉工場

保証期間に係る事項

本品は納品/設置してから1年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。