


器01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ (70469000)

カセットスタンド固定器

【形状・構造及び原理等】

* 1. 外観図

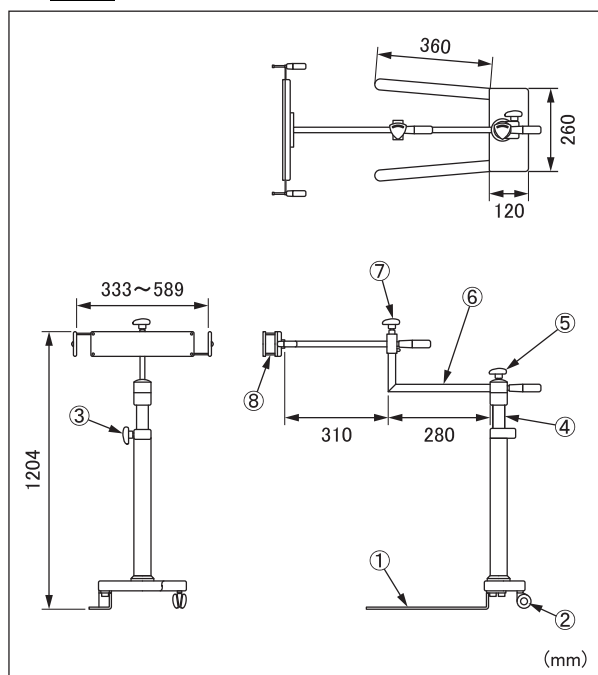

商品コード	商品名	質量
08-090-01	カセットスタンド固定器	20.0 kg

2. 材質

- ①スタンド／⑧固定器：ステンレス鋼板
②キャスター：合成樹脂
③固定ハンドルA／④支柱／⑤固定ハンドルB／⑥アーム／
⑦固定ハンドルC：ステンレス鋼棒

* 注：番号は1. 外観図の番号に対応

* 3. 機能

支柱昇降量：360mm


スライド量：アーム280mm／固定器310mm

取付可能カセットホルダー：大角／四ツ切／大陸／半切

* 【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリ。X線撮影時にカセットホルダーを保持。キャスター付スタンドで移動可能。

* 【使用方法等】

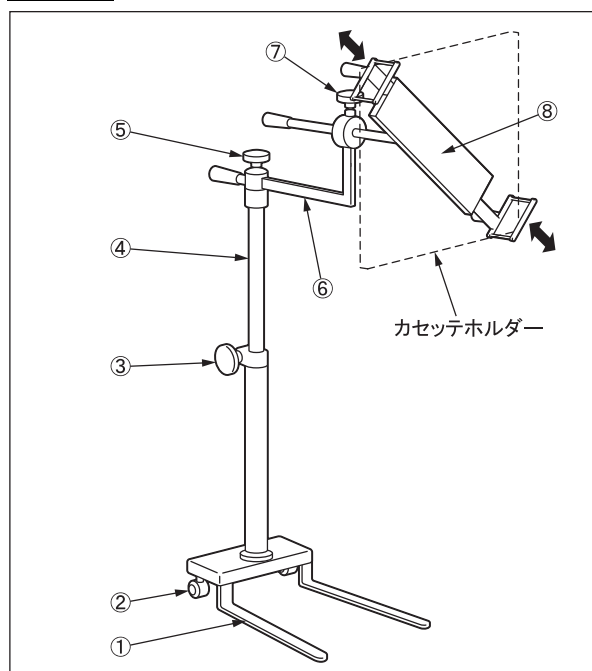

- ① スタンド ⑤ 固定ハンドルB
② キャスター ⑥ アーム
③ 固定ハンドルA ⑦ 固定ハンドルC
④ 支柱 ⑧ 固定器

- 固定ハンドルA③を操作して支柱④の高さを調整します。
- 固定ハンドルB⑤を操作してアーム⑥の長さを調整します。
- 固定ハンドルC⑦を操作して固定器⑧の位置を調整します。
- キャスター②でスタンド①を必要な位置に移動します。
- 固定ハンドルC⑦を操作して固定器⑧を図に示す方向に設定します。
- カセットホルダーのサイズに合わせて固定器⑧を図に示す矢印の方向に伸縮します。
- 固定ハンドルC⑦を操作してカセットホルダーを固定します。

【使用上の注意】

* 1. 警告

締結部の固定は必ず確認してください。ゆるんだ状態では機器が外れたり動いたりして、患者に障害が起きるおそれがあります。

2. 重要な基本的注意

手術台を作動するときは他の併用機器やテーブルトップとの接触・干渉に注意してください。

* 【保管方法及び有効期間等】

* 1. 保管方法

高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管してください。

* 2. **耐用期間**

適切な保守点検及び適切な保管をした場合：7年（注）
[自己認証による]

注：耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。

【保守・点検に係る事項】

* <使用者による保守点検事項>

1. **使用前・使用後の点検**

使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認してください。

* 2. **清掃・消毒**

血液・薬剤・汚染等の汚れは水で拭き取り、さらに消毒用アルコール・ガーゼで清拭してください。

* 3. **故障時のお願い**

本装置が故障したと思われるときは、本装置に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

* <業者による保守点検事項>

弊社及び弊社が認めた業者のみが実施可能です。それ以外の業者による保守・点検は、有害事象の発生、性能・機能低下の事態を招くおそれがあります。

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ミズホ株式会社
TEL 03(3815)3097

製造業者：ミズホ株式会社千葉工場

【保証期間に係る事項】

本品は納品/設置してから1年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。