

体位固定バンド

**

【警告】

患者の任意の体位を確保するために アクセサリ で支持するときは常に患者の状態を監視すること。[長時間の体位は神経麻痺や褥瘡の 原因 となります。]


**

【禁忌・禁止】

1. 患者にバンドを無理に締め付けないこと。[患者に障害が起きることがあります。]
2. 【形状・構造及び原理等】の項目2. に示す許容荷重を超えた使用をしないこと。[破損するおそれがあります。]

【形状・構造及び原理等】

**1. 外観図

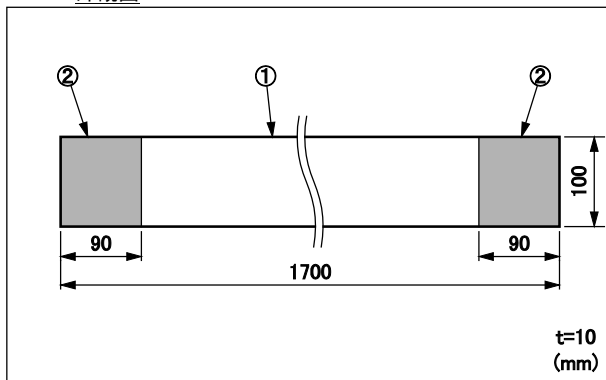

商品コード	商品名	本体質量
08-084-02	体位固定バンド	0.3 kg

** 2. 許容荷重

14 kg

許容患者体重: 44 kg（バンド1本で支持可能な体重）


** 3. 材質

①ベルト：ナイロン ②貼付部：ナイロン

*【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリ。患者を手術台に固定するための着脱式のバンド。

*【使用方法等】

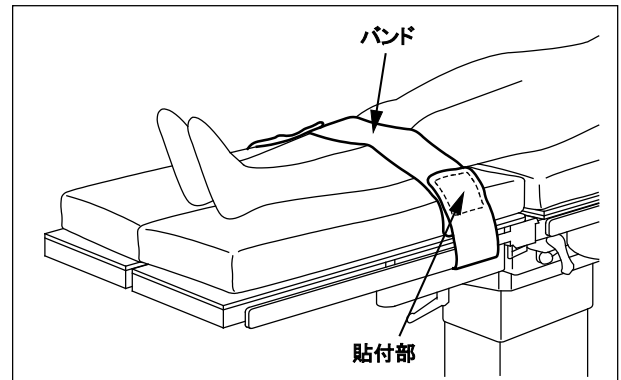

1. 手術台に患者を乗せます。
2. 必要な位置にバンドを取り付けます。
3. バンド端の貼付部をバンド面に貼りつけて、患者を固定します。

【使用上の注意】

* 1. 警告

締結部の固定は必ず確認してください。ゆるんだ状態では機器が外れたり、動いたりして患者に障害が起きるおそれがあります。

* 2. 重要な基本的注意

手術台を作動するときは他の手術台アクセサリやテーブルトップとの接触・干渉に注意してください。

*【保管方法及び有効期間等】

* 1. 保管方法

高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管してください。

* 2. 耐用期間

本製品は消耗品です。固定力に劣化が認められた場合は速やかに新しい製品と交換して下さい。

【保守・点検に係る事項】

* <使用者による保守点検事項>

* 1. 使用前・使用後の点検

使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認してください。

* 2. 清掃・消毒

バンドの汚れは家庭用中性洗剤等を使用して手洗い・自然乾燥すること。洗濯により縮みや色あせが発生する場合があります。マジックテープにゴミが付着していると固定力が弱まる原因になるので、取除いてください。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ミズホ株式会社

TEL 03(3815)3097

製造業者：ミズホ株式会社 千葉工場