

＊【警告】


患者の任意の体位を確保するためにアクセサリで支持するときは常に患者の状態を監視すること。
[長時間の体位は神経麻痺の原因となることがあります。]

【禁忌・禁止】

- 弊社製手術台以外では使用しないこと。
[レール固定金具及び手術台のサイドレール寸法が異なるため固定できません。]
- 固定ハンドルが緩んだ状態で使用しないこと。
[支持器が動いて患者に障害が起きることがあります。]

【形状・構造及び原理等】

形状・構造

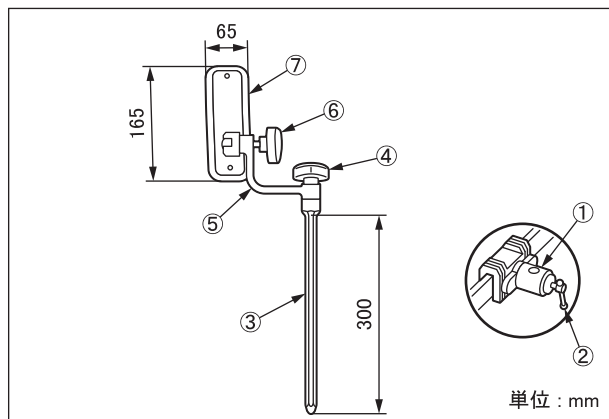

- | | |
|-------------|-------------|
| ① レール固定金具 | ⑤ アーム |
| ② 固定ハンドル | ⑥ パッド固定ハンドル |
| ③ 支柱 | ⑦ パッド |
| ④ アーム固定ハンドル | |

商品コード	商品名	構成	質量
08-069-32	若杉氏側部支持器 六角支柱 300 mm (固定金具付)	①②③④ ⑤⑥⑦	2.4 kg (注)
08-110-01	レール固定金具 (大型) Ver.2	①②	0.9 kg

注) レール固定金具 0.9 kgを含む


材質

支柱 (本体) : ステンレス鋼棒
アーム (本体) : ステンレス鋼棒
パッド (本体) : 発泡ウレタン/冷間圧延鋼板
固定ハンドル (本体) : プラスチック成型品
固定金具 (レール固定金具) : ステンレス鋳鋼品
固定ハンドル (レール固定金具) : ステンレス鋼棒

＊【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリ。側臥位のポジションを確保する目的で、患者を支持する器具。


＊【使用方法等】

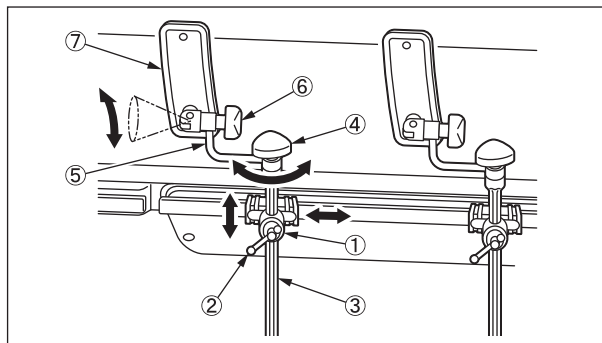

- | | |
|-------------|-------------|
| ① レール固定金具 | ⑤ アーム |
| ② 固定ハンドル | ⑥ パッド固定ハンドル |
| ③ 支柱 | ⑦ パッド |
| ④ アーム固定ハンドル | |

- 手術台のサイドレールにレール固定金具①を取り付ける。
- 支柱③をレール固定金具①に差し込み、固定ハンドル②を締めて仮止める。
- 患者の体位に合わせてアーム⑤を動かし、位置を調整する。
- 調整後、固定ハンドル②およびアーム固定ハンドル④を回して支柱③およびアーム⑤を固定する。
- パッド固定ハンドル⑥を緩めて、パッド⑦の角度を調整する。
- 調整後、パッド固定ハンドル⑥を締めてパッド⑦を固定する。

■使用例

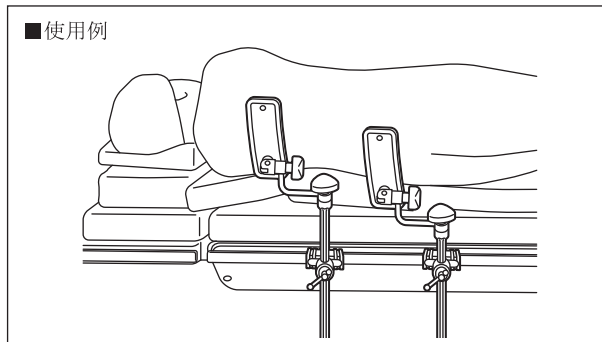

【使用上の注意】

- 重要な基本的注意
 - 手術台を作動するときは他のアクセサリやテーブルトップとの接触・干渉に注意すること。
 - 2個以上の側部支持器で患者を支持すること。
- 相互作用

[併用注意]

分離式手術台での使用は分離時にストレッチャーレール受けに接触しない位置まで移動させること。接触するとテーブルトップの分離ができず本品及び併用機器が破損することがあります。

＊【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

本品は高温・高湿を避け、温度や湿度が極端に変化しない場所に保管してください。

2. 耐用期間

指定した保守点検及び適切な保管をした場合：7年（自己認証）

【保守・点検に係る事項】

1. 使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認すること。
2. 修理を希望される場合はご購入店または弊社に相談すること。

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

ミズホ株式会社

TEL 03-3815-3097

製造業者

ミズホ株式会社 千葉工場

* 【保証期間に係る事項】

本品は納品/設置してから一年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。