

器01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ (70469000)


アンギオ診台用頭部固定具アタッチメント

【警告】
患者の任意の体位を確保するためにアクセサリで支持するときは常に患者の状態を監視すること。[長時間の体位は神経麻痺や褥瘡の原因になります。]

【禁忌・禁止】
1. 他社製手術台では使用しないこと。[他社製手術台での使用可能は確認していません。]
2. 【使用方法等】の項目2.に示す使用可能な手術台アクセサリ以外では使用しないこと。[他機種での使用可能は確認していません。]

【形状・構造及び原理等】

1. 外観図

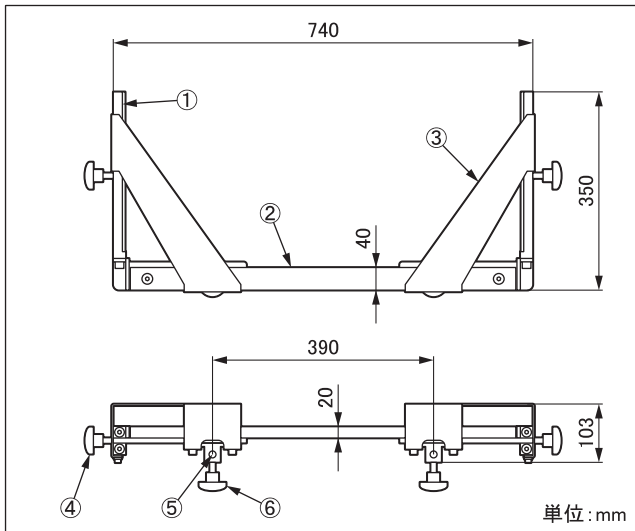

商品コード	商品名
08-075-50	アンギオ診台用頭部固定具アタッチメント

2. 質量

10.0 kg

3. 材質

- ① 差込金具：冷間圧延ステンレス鋼板
- ② フレーム：炭素繊維強化プラスチック
- ③ リブ：冷間圧延ステンレス鋼板
- ④ サイドレール固定ハンドル：ステンレス鋼棒
- ⑤ 差込孔：冷間圧延ステンレス鋼板
- ⑥ 固定ハンドル：ステンレス鋼棒


注：番号は1. 外観図の番号に対応

【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリ。患者の頭部を支持・固定する多目的ヘッドフレームを装着するための器具。

【使用方法等】

1. 使用方法

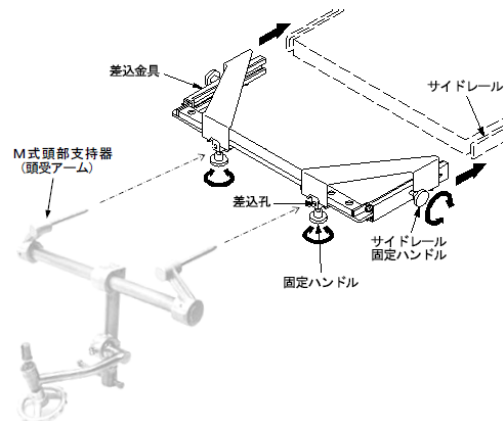

- 1-1 診療台のサイドレールに本品の差込金具を差し込みます。
- 1-2 サイドレール固定ハンドルを締めて固定します。
- 1-3 差込孔に多目的ヘッドフレームの構成部品であるM式頭部支持器（頭受アーム）を装着します。
- 1-4 固定ハンドルを締めて固定します。

注：装着する機器の詳細な使用方法は、当該品の添付文書または取扱説明書を参照してください。

2. 使用可能な手術台アクセサリ

販売名：多目的ヘッドフレーム
製造販売届出番号：13B1X00306G00383

【使用上の注意】

1. 警告

締結部の固定は必ず確認してください。ゆるんだ状態では機器が外れたり、動いたりして患者に障害が起きるおそれがあります。

2. 重要な基本的注意

- ① 装着する診療台および機器の添付文書又は取扱説明書に従って使用してください。
- ② 診療台を作動するときは他の機器やテーブルトップとの接触・干渉に注意してください。

3. 相互作用

[併用注意]

分離式手術台での使用は分離時にストレッチャーレール受けに接触しない位置まで移動してください。接触するとテーブルトップ分離ができず本品及び併用機器が破損するおそれがあります。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管してください。

2. 耐用期間

適切な保守点検及び適切な保管をした場合：7年（注）〔自己認証による〕

注：耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。

*【保守・点検に係る事項】

<使用者による保守点検事項>

1. 使用前・使用後の点検

使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認してください。

2. 清掃・消毒

血液・薬剤・汚染等の汚れは水で拭き取り、さらに消毒用アルコール・ガーゼで清拭してください。

3. 故障時のお願い

本装置が故障したと思われるときは、本装置に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

<業者による保守点検事項>

弊社及び弊社が認めた業者のみが実施可能です。それ以外の業者による保守・点検は、有害事象の発生、性能・機能低下の事態を招くおそれがあります。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ミズホ株式会社

TEL 03(3815)3097

製造業者：ミズホ株式会社千葉工場

【保証期間に係る事項】

本品は納品/設置してから1年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。