

類別：機械器具（01）手術台及び治療台

一般医療機器 一般的名称：手術台アクセサリ JMDNコード：70469000

販売名：下肢牽引装置 仰臥位セット こどもタイプ

【警告】


1. 患者の任意の体位を確保するためにアクセサリで支持するときは、常に患者の状態を監視すること。[長時間の体位は神経麻痺や褥瘡の原因になります。]
2. 側臥位での使用は片側になる腕を別の上肢台に固定すること。[固定しない状態では患者に障害が起きるおそれがあります。]

【禁忌・禁止】

1. 他社製手術台では使用しないこと。[他社製手術台での使用可能は確認していません。]
2. 【使用法等】の項目2. 使用可能な手術台及び手術台アクセサリに示す機種以外では使用しないこと。[他機種での使用可能は確認していません。]

【形状・構造及び原理等】

1. 外観図

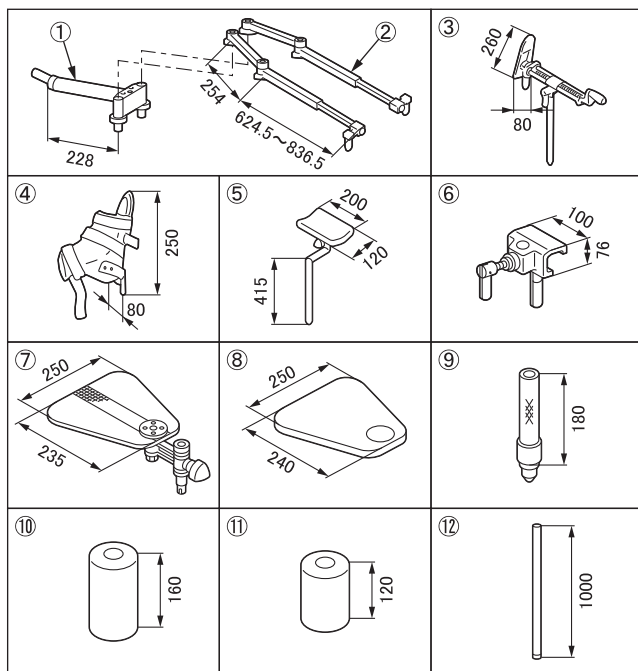

番号 (注1)	構成部品	質量 (kg)	材質 (注2)
①	メインアーム	14.5	A
②	屈折・伸縮アーム(2個組)		A
③	牽引器(2個組)	2.7/個	A・B
④	靴型(2個組)	0.4/個	C
⑤	下肢受(2個組)	1.0/個	A・B
⑥	固定金具(2個組)	0.8/個	A・B
⑦	移動式骨盤台	2.5	B・D
⑧	移動式骨盤台用マット	0.5	E
⑨	股間支柱	0.4	F
⑩	股間支柱用マット(大)	0.3	E
⑪	股間支柱用マット(小)	0.2	E
⑫	サポートロッド(2個組)	1.0/個	A

注1：番号は1. 外観図の番号に対応

注2：アルファベットは2. 材質に対応

商品コード	商品名
08-115-68	下肢牽引装置 仰臥位セット こどもタイプ

2. 材質

- A：ステンレス鋼棒
- B：アルミニウム合金鋳物
- C：合成皮革
- D：熱硬化製樹脂積層板
- E：ウレタン
- F：炭素繊維強化プラスチック

注：アルファベットは【形状・構造及び原理等】1. 外観図の表(材質)に対応

【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリ。牽引手術で患者（主にこども）のポジション（主に仰臥位）を設定するための器具です。

【使用法等】

1. 下肢牽引装置の取り付け方

- 1-1 手術台の脚板を外します。
- 1-2 メインアームの差込軸とV字アタッチメント差込孔の位置を合わせます。
- 1-3 差込孔にメインアームの差込軸を装着して、V字アタッチメントの固定ハンドルを締めます。
- 1-4 屈折・伸縮アームを屈折又は伸縮してポジションを設定します。
- 1-5 手術の用途に合わせて構成部品を取り付けます。
- 1-6 患者を乗せてポジションを設定します。


2. 使用可能な手術台及び手術台アクセサリ

製造販売届出番号等	販売名
13B1X00306N10030	下肢牽引用V字アタッチメント（注1）
13B1X00306N10144	電動油圧手術台 MOT-5701 （注2）

注1：08-115-69：下肢牽引用V字アタッチメント
5701 カセット（こども仕様）限定
注2：注1の手術台アクセサリ併用限定

3. 下肢牽引装置の組合せ

（大腿骨頭部骨折手術位）

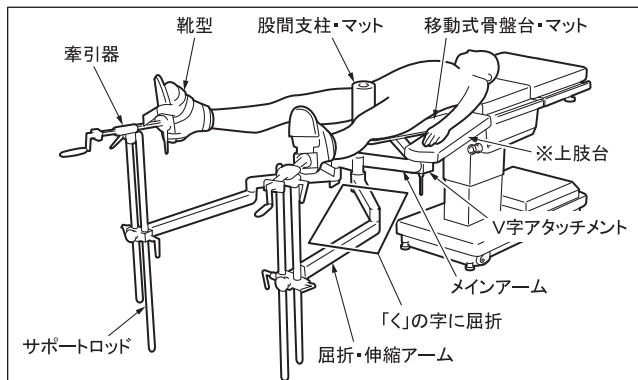

注：上肢台は付属しません。

【使用上の注意】

1. 警告

- ① 締結部の固定は必ず確認してください。ゆるんだ状態では器械が外れたり、動いたりして患者に障害が起きるおそれがあります。

2. 重要な基本的注意

- ① 手術台を作動するときは他のアクセサリやテーブルトップとの接触・干渉に注意してください。
- ② 靴型のベルトを無理に引っ張らないでください。破損するおそれがあります。
- ③ 下肢受及びマット（移動式骨盤台用及び股間支柱用）を使用する際は、マット部分に鋭利なものをあてないでください。破損するおそれがあります。
- ④ 靴型及びマット（移動式骨盤台用及び股間支柱用）は、消毒剤の種類によっては材質が劣化するおそれがあります。消毒剤を使用する前に必ず表示又は説明書の内容を確認してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管してください。

2. 耐用期間

適切な保守点検及び適切な保管をした場合：7年（注）〔自己認証による〕

注：耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品（マットレス及び靴型を含む）の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。

【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検事項＞

1. 使用前・使用後の点検

- ① 使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認してください。
- ② 靴型は「ベルトを引っ張っても破損しないこと」を確認してください。

2. 清掃・消毒

血液・薬剤・汚染等の汚れは水で拭き取り、さらに消毒用アルコール・ガーゼで清拭してください。

3. 故障時のお願い

本装置が故障したと思われるときは、本装置に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

＜業者による保守点検事項＞

弊社及び弊社が認めた業者のみが実施可能です。それ以外の業者による保守・点検は、有害事象の発生、性能・機能低下の事態を招くおそれがあります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ミズホ株式会社

TEL 03(3815)3097

製造業者：ミズホ株式会社 千葉工場

【保証期間に係る事項】

本品は納品/設置してから1年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。