

類別：機械器具（01）手術台及び治療台

一般医療機器 一般的名称：手術台アクセサリ JMDNコード：70469000

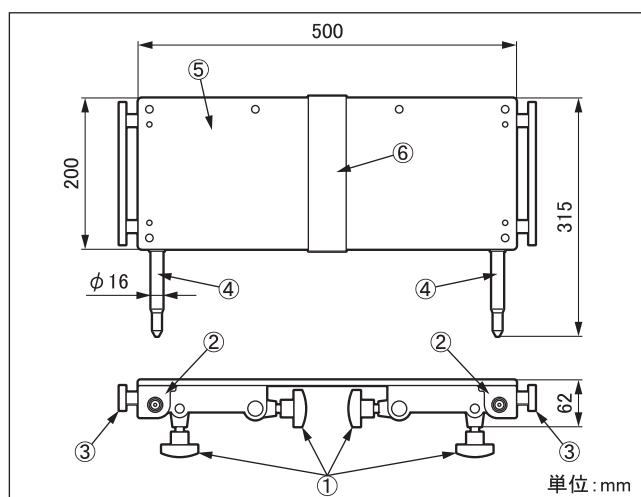
販売名：MST-7300補助背板メイフィールド用

【警告】

患者の任意の体位を確保するためにアクセサリで支持するときは常に患者の状態を監視すること。[長時間の体位は神経麻痺や褥瘡の原因となります。]

【禁忌・禁止】

【使用方法等】2. 使用可能な手術台に示す機種以外では使用しないこと。[他機種での使用可能は確認していません。]

【形状・構造及び原理等】
1. 外観図


商品コード	商品名
08-075-16	MST-7300 補助背板メイフィールド用
08-075-17	MST-7300 補助背板メイフィールド用 (US)
08-075-18	MST-7300 補助背板メイフィールド用 (EU)

注：US・EUはサイドレール③寸法が異なる

2. 質量

5.5 kg

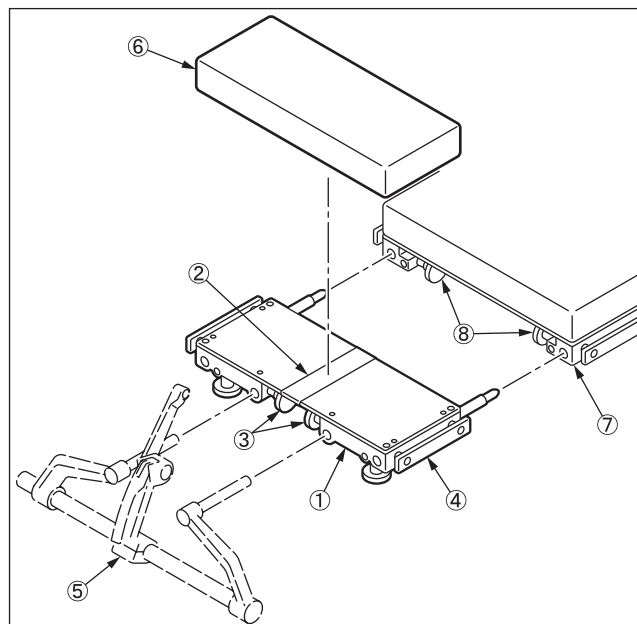
3. 材質

- ① 固定ハンドル：ステンレス鋼棒
- ② フレーム：アルミニウム合金鋳物
- ③ サイドレール：ステンレス鋼棒
- ④ 差込軸：ステンレス鋼棒
- ⑤ ボード：熱硬化性樹脂積層板
- ⑥ 取付用テープ：ナイロン

注：番号は1. 外観図の番号に対応

【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリ。
患者の頭部を支持する機器であるメイフィールドを装着・固定する機能を備えた補助背板。

【使用方法等】
1. 取り付け方


- 1-1 手術台の頭部板及び補助背板を外します。
- 1-2 MST-7300 補助背板メイフィールド用①を手術台の背板⑦に取り付けます。
- 1-3 背板⑦の固定ハンドル⑧を締めて固定します。
- 1-4 マットレス⑥を取付用テープ②に取り付けます。
- 1-5 MST-7300 補助背板メイフィールド用①にメイフィールド⑤を差し込み、固定ハンドル③を締めて固定します。
- 1-6 メイフィールド⑤の使用方法に従ってアクセサリ等を取り付けます。
- 1-7 必要な場合、サイドレール④に手術台アクセサリを取り付けます。

注1：メイフィールドの詳細な使用方法は、メイフィールドの取扱説明書を参照してください。

注2：マットレスは付いていませんので同じ寸法の手術台補助背板用マットレスを使用してください。

2. 使用可能な手術台

製造販売届出番号等	販売名
13B1X00306N10229	マイクロサージェリー手術台 MST-7300BX
13B1X00306N10263	マイクロサージェリー手術台 MST-7300B

【使用上の注意】
1. 警告

締結部の固定は必ず確認してください。ゆるんだ状態では機器が外れたり、動いたりして患者に障害が起きるおそれがあります。

2. 重要な基本的注意

手術台を動作するときは他の手術台アクセサリやテーブルトップとの接触・干渉に注意してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管してください。

2. 耐用期間

適切な保守点検及び適切な保管をした場合：7年（注）

〔自己認証による〕

注：耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品（マットレスを含む）の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。

【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検事項＞

1. 使用前・使用後の点検

使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認してください。

2. 清掃・消毒

血液・薬剤・汚染等の汚れは水で拭き取り、さらに消毒用アルコール・ガーゼで清拭してください。

3. 故障時のお願い

本装置が故障したと思われるときは、本装置に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

＜業者による保守点検事項＞

弊社及び弊社が認めた業者のみが実施可能です。それ以外の業者による保守・点検は、有害事象の発生、性能・機能低下の事態を招くおそれがあります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ミズホ株式会社

TEL 03(3815)3097

製造業者：ミズホ株式会社 千葉工場

【保証期間に係る事項】

本品は納品/設置してから1年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。