

器01 手術台及び治療台  
 一般医療機器 手術台アクセサリ (70469000)

## VACB用サイドレールアタッチメントⅡ

\*\*

### 【警告】

#### ＜使用方法＞

1. 患者の任意の体位を確保するために手術台アクセサリで支持するときは常に患者の状態を監視すること。[長時間の体位保持は神経麻痺や褥瘡の原因になります。]
2. ヘッドフレームの取り付けは必ずロングタイプを使用すること。[【形状・構造及び原理等】の項目3.に示す許容荷重を超えるため破損するおそれがあります。]

\*\*



### 【禁忌・禁止】

#### ＜使用方法＞

1. 他社製手術台では使用しないこと。[他社製手術台での使用可能を確認していません。]
2. 【使用方法等】の項目3.に示す使用可能な手術台アクセサリ以外では使用しないこと。[他機種での使用可能を確認していません。]
3. 【形状・構造及び原理等】の項目3.に示す許容荷重を超えた使用をしないこと。[破損するおそれがあります。]
4. ショートタイプは上肢台（ロッキングタイプ）又はスクリーン掛以外では使用しないこと。[保持力が低いため脱落するおそれがあります。]

### \*\* 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 外観図

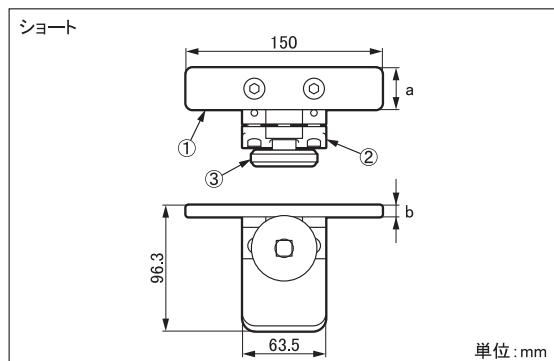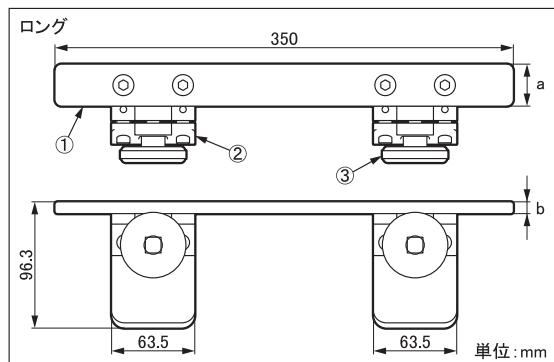

| 商品コード     | 商品名                       | a     | b    |
|-----------|---------------------------|-------|------|
| 08-113-10 | サイドレールアタッチメントⅡ ロング VACB用  | 32 mm | 9 mm |
| 08-113-11 | サイドレールアタッチメントⅡ ショート VACB用 | 32 mm | 9 mm |

#### 2. 質量

ロング：1.8 kg ショート：0.9 kg

#### 3. 許容荷重

サイドレールアタッチメントⅡ ロング VACB用:40kg

サイドレールアタッチメントⅡ ショート VACB用:20kg

#### 4. 原材料

①レール：ステンレス鋼

②クランプ：アルミニウム合金

③固定ハンドル：アルミニウム合金、ステンレス鋼



注：番号は1. 外観図の番号に対応。

### \*\* 【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリをいう。VACB用手術台のテーブルトップ等に固定し他の手術台アクセサリ等を取り付けるためのアタッチメント。



### \*\* 【使用方法等】

#### 1. 使用方法

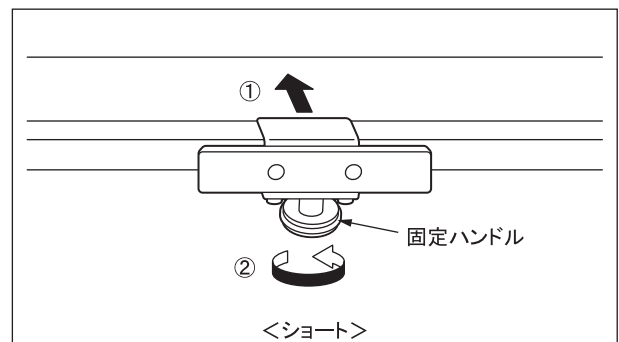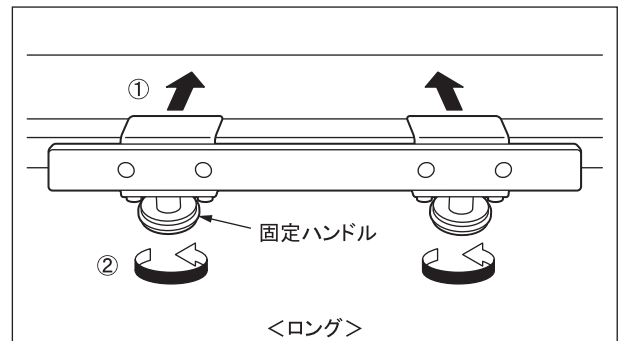


1-1 テーブルトップに本品を差し込みます (①)。

1-2 固定ハンドルを締めて本品を固定します (②)。

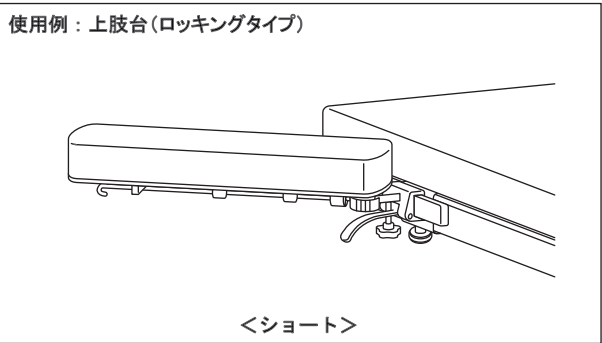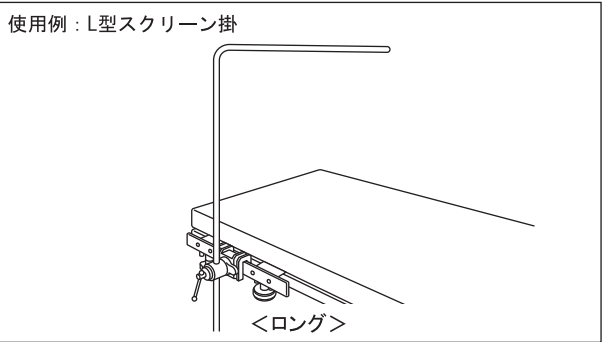

1-3 手術台アクセサリ等を取りつけます。

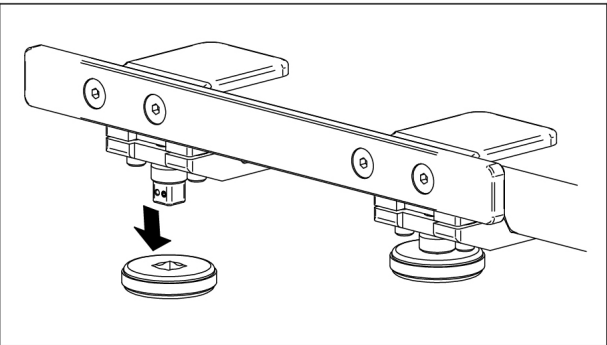

注：アクセサリが固定ハンドルに干渉する場合、固定ハンドルを下方に引っ張ると取り外すことができます。

本品に取り付けるアクセサリ等の詳細については、各アクセサリ等の注意事項等情報又は取扱説明書を参照してください。

2. 使用可能な手術台  
弊社製手術台

3. 使用可能な手術台アクセサリ

| 製造販売届出番号                | 販売名                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| 13B1X00306N10242        | カーボンエクステンションボード                              |
| <u>13B1X00306N10320</u> | <u>カーボンエクステンションボード</u><br><u>100cm II 本体</u> |
| <u>13B1X00306N10321</u> | <u>カーボンエクステンションボード</u><br><u>122cm II 本体</u> |

\*\*\*【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ① 締結部の固定は必ず確認してください。ゆるんだ状態では機器が外れたり、動いたりして患者に障害が起きるおそれがあります。
- ② 手術台を作動するときは他の手術台アクセサリやテーブルトップとの接触・干渉に注意してください。
- ③ 過度の荷重及び衝撃を与えないでください。使用中に取付けたアクセサリ等に大きな荷重、衝撃を与えると手術台との振動により“跳ね返り現象”を起こすことがあります。

\*\*\*【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法  
高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管してください。
2. 耐用期間  
適切な保守点検及び適切な保管をした場合：7年（注）  
[自己認証（弊社データ）による]

注：耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。

\*\*\*【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検事項＞

1. 使用前・使用後の点検  
使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認してください。
2. 清掃・消毒  
血液・薬剤・汚染等の汚れを水で拭き取り、消毒液を浸したガーゼ等で清拭してください。なお、消毒液は弊社製手術台にて確認済みの消毒液と同一のものをご使用ください。確認済みの消毒液については手術台の取扱説明書をご参照ください。
3. 故障時のお願い  
本品が故障したと思われるときは、本品に「故障」「使用禁止」「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

＜業者による保守点検事項＞

弊社及び弊社が認めた業者のみが実施可能です。それ以外の業者による保守・点検は、有害事象の発生、性能・機能低下の事態を招くおそれがあります。

\*\*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ミズホ株式会社  
TEL 03(3815)3097  
製造業者：ミズホ株式会社千葉工場

保証期間に係る事項

本品は納品/設置してから1年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。