

器01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ (70469000)


X線透過延長対応カーボンボード

【警告】

1. 患者の任意の体位を確保するためにアクセサリで支持するときは常に患者の状態を監視すること。[長時間の体位は神経麻痺や褥瘡の原因になることがあります。]
2. 荷重、衝撃をあたえないこと。[手術台との振動により“跳ね返り現象”が起こり、血管等を傷つけることがあります。]

【禁忌・禁止】

1. 他社製手術台では使用しないこと。[他社製手術台での使用可能は確認していません。]
2. 【使用方法】2. 使用可能な手術台に示す機種以外では使用しないこと。[他機種での使用可能は確認していません。]
3. CT撮影に対応した当社製手術台以外では使用しないこと。[転倒するおそれがあります]
4. 【形状・構造及び原理等】の項目3. に示す許容荷重を超える使用をしないこと。[破損するおそれがあります。]
5. 手術台のテーブルを水平にし、高さはサポートロッド高さ調整範囲を超えて使用しないこと。[安全な固定が出来ず患者に障害が起きることがあります。]

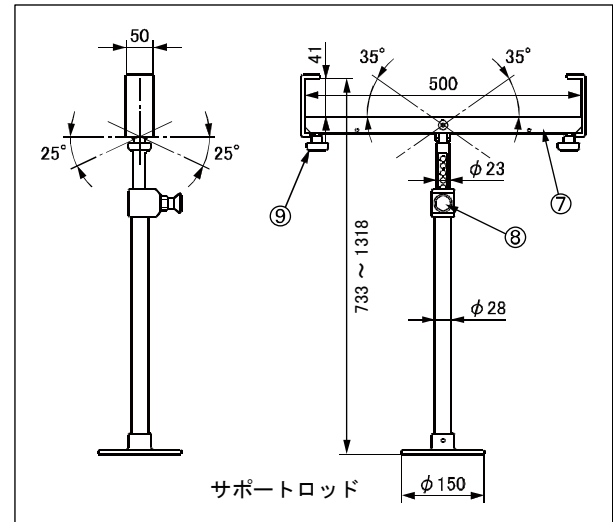


商品コード	商品名	構成
08-070-90	X線透過延長対応カーボンボード	①②③⑤ ⑥⑦⑧⑨
08-083-67	ミズホオリジナルマットレスカーボンエクステンション 122cm 用	④

【形状・構造及び原理等】

1. 外観図

単位: mm

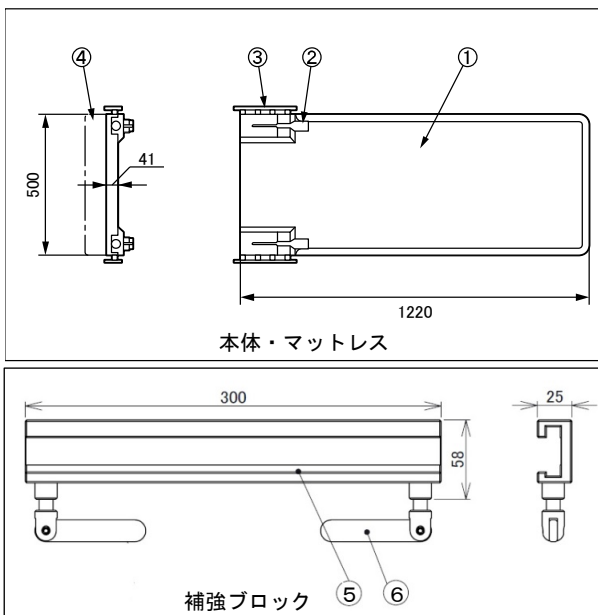

2. 質量

本体: 15kg
マットレス: 2.6kg
補強ブロック: 1.5kg/個
サポートロッド: 3.5kg

3. 許容荷重

100kg

4. 材質

- ① ボード: 炭素繊維強化プラスチック
- ② 着脱レバー: 機械構造用炭素鋼
- ③ サイドレール: ステンレス鋼棒
- ④ マットレス: 発砲ウレタンフォーム
- ⑤ 補強ブロック: ステンレス鋼棒
- ⑥ 固定ハンドル: ステンレス鋼棒
- ⑦ サポートロッド: アルミニウム合金棒
- ⑧ 高さ調整プランジャー: ステンレス鋼棒
- ⑨ 固定ネジ: ステンレス鋼棒


注: 番号は1. 外観図の番号に対応。

【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリ。手術台の腰板に装着して患者を支持。CT撮影に対応した患者の鼠蹊部まで撮影可能な器具。

【使用方法等】

1. 取付け方

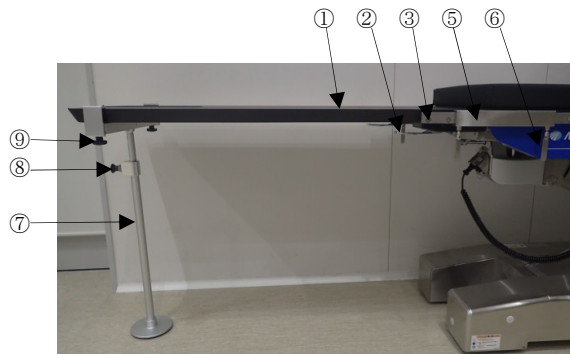

- 1-1 手術台の頭部板・補助板及び背板を外します。
- 1-2 手術台の天板を水平にします。
- 1-3 着脱レバー②を押しながら、手術台の背板差込軸にボード①を取付けます。
- 1-4 補強ブロック⑤を手術台とボード①のサイドレール③をつなぐ様に取付けます。
- 1-5 固定ハンドル⑥を回して補強ブロック⑤を手術台とボード①に固定します。
- 1-6 サポートロッド⑦をボード①先端に取付けます。
- 1-7 高さ調整ブランジャー⑧を操作して適切な高さにセットします。
- 1-8 固定ネジ⑨を回してサポートロッド⑦をボード①に固定します。



- 1-9 ボード①にマットレス④を取付けます。

2. 使用可能な手術台

当社製手術台

【使用上の注意】

1. 警告

締結部の固定は必ず確認してください。ゆるんだ状態では機器が外れたり、動いたりして患者に障害が起きるおそれがあります。

2. 重要な基本的注意

- ① ボードが手術台本体に完全に差し込まれていることを必ず確認してください。
- ② 補強ブロックで固定した状態で手術台の背板屈折を操作しないでください。破損のおそれがあります。
- ③ C T撮影時以外はサポートロッドを必ず装着して使用してください。転倒のおそれがあります。(C T撮影時はサポートロッド取外し可。)
- ④ サポートロッドを取り外す時は補強ブロックが固定されていることを確認してください。転倒のおそれがあります。
- ⑤ 手術台を作動するときは他のアクセサリーとの接触・干渉に注意してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管してください。

2. 耐用期間

適切な保守点検及び適切な保管をした場合：7年（注）

〔自己認証による〕

注 耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品（マットレスを含む）の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です

【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検事項＞

1. 使用前・使用後の点検

使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認してください。

2. 清掃・消毒

血液・薬剤・汚染等の汚れは水で拭き取り、さらに消毒用アルコール・ガーゼで清拭してください。

3. 故障時のお願い

本装置が故障したと思われるときは、本装置に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

＜業者による保守点検事項＞

弊社及び弊社が認めた業者のみが実施可能です。それ以外の業者による保守・点検は、有害事象の発生、性能・機能低下の事態を招くおそれがあります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ミズホ株式会社

TEL 03(3815)3097

製造業者：ミズホ株式会社 千葉工場

【保証期間に係る事項】

本品は納品/設置してから 1 年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。