

器51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 吸引チューブ (16779000)

排気チューブシステム


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 【使用方法等】1. 使用の準備 に記載されている以外の方法で滅菌しないこと。[本品が劣化するおそれがあります。]

* 【形状・構造及び原理等】

1. 外観図

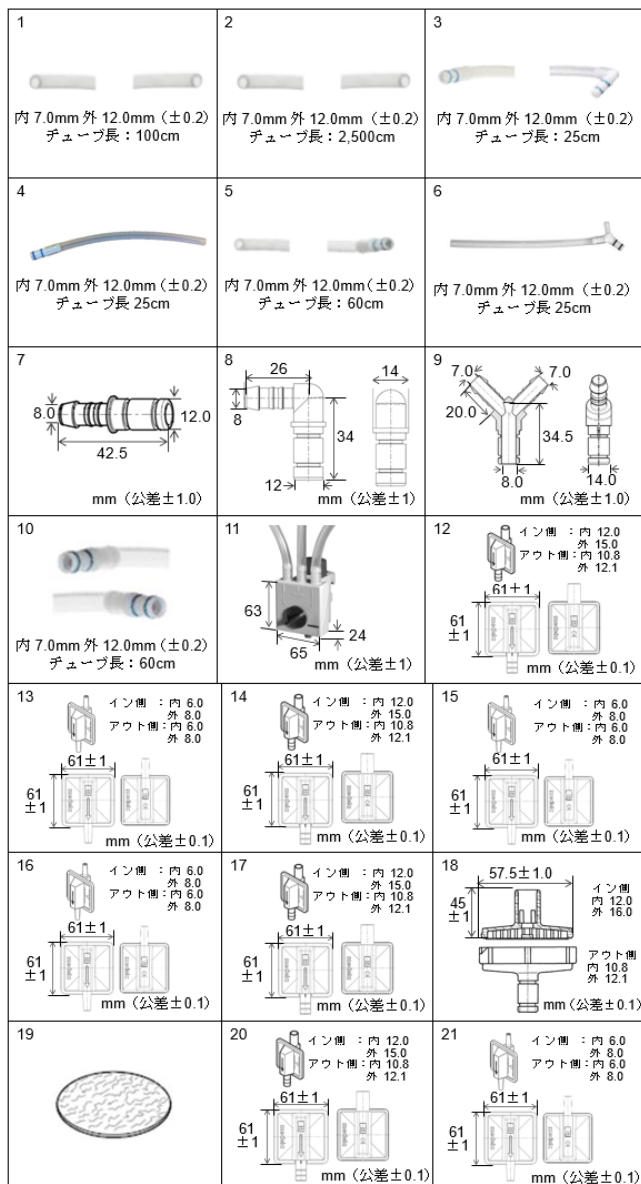

No.	商品コード	商品名	備考
1	08-254-00	排気チューブ 100cm 10本入り	注2
2	08-254-01	排気チューブ 2,500cm	注2
3	08-254-02	排気チューブ 25cm Iコネクター・Lコネクター付き	注2
4	08-254-03	排気チューブ 25cm Iコネクター付き	注2
5	08-254-04	排気チューブ 60cm Iコネクター付き	注2
6	08-254-05	排気チューブ連結用 25cm Yコネクター付	注2
7	08-254-06	Iコネクター排気チューブ用 10個入り	注2
8	08-254-07	Lコネクター排気チューブ用 10個入り	注2
9	08-254-08	Yコネクター排気チューブ用 10個入り	注2
10	08-254-09	排気チューブ 60cm Iコネクター2個付き	注2
11	08-251-02	チェンジオーバーバルブ	注2
12	08-256-00	ディスポーザブル オーバーフロー・バクテリアフィルター メデラ型 10個入り	注1
13	08-256-01	ディスポーザブル オーバーフロー・バクテリアフィルター テーパー型 10個入り	注1
14	08-256-02	ディスポーザブル バクテリアフィルター メデラ型 10個入り	注1
15	08-256-03	ディスポーザブル バクテリアフィルター テーパー型 10個入り	注1
16	08-256-04	ディスポーザブル バクテリア・消臭フィルター テーパー型 10個入り	注1
17	08-256-05	ディスポーザブル バクテリア消臭フィルター メデラ型 10個入り	注1
18	08-256-06	リユーザブルバクテリアフィルター ハウジングタイプ リユーザブルボトル用	注2
19	08-256-07	フィルターペーパー リユーザブルバクテリアフィルター用 50枚入り	注1
20	08-256-08	ディスポーザブル ウィルス・オーバーフローフィルター メデラ型 10個入り	注1
21	08-256-09	ディスポーザブル ウィルス・オーバーフローフィルター テーパー型 10個入り	注1

注1：単回使用品

注2：再使用可能品

2. 材質

2. : シリコン
3. 4. 5. 6. 7. 8. 10 : シリコン/ポリアセタール樹脂
9. 13. : ポリアセタール樹脂
11. : ポリアミド/シリコン/ポリアセタール樹脂
12. 14. 16. 17. 20 : ポリプロピレン/シリコン
15. 16. 19. 21 : ポリプロピレン
- 18 : ポリサルフォン/シリコン

注：番号は1. 外観図の番号に対応

3. 作動原理

認証品である電動式吸引器（本品には含まない）または医療機関等の医療ガス配管設備から供給された吸引圧を利用することによりディスポーザブル排液回収システム（本品には含まない）の構成品であるライナーやリユーザブル排液回収シ

システム（本品には含まない）の構成部品であるリユーズブルボトル等の排液回収容器のボトル内が陰圧になり、血液、体液等が溜まる。

【使用目的又は効果】

吸引源とディスプレイ排液回収システム（本品には含まない）の構成部品であるライナーやリユーズブル排液回収システム（本品には含まない）の構成部品であるリユーズブルボトル等の排液回収容器に接続して、血液や体液等を吸引するために使用する。

＊ ＊ 【使用方法等】

1. 使用の準備

再使用可能品は、使用前に以下の条件で洗浄および消毒・滅菌が必要です。

洗浄	中性洗浄剤を含む温水（60-70℃）に浸して洗浄します。
消毒	アルデヒドを含まない消毒液に 30 分浸漬後、水で最低 2 分間すすぎ洗います。
滅菌	134℃で 10 分間、高圧蒸気滅菌（前処理として 3 回真空排気）します。

2. 使用中

2-1：ディスプレイ排液回収システム専用ボトル（届出番号：13B1X00306N10315）、ディスプレイ排液回収システム（届出番号：13B1X00306N10316）、またはリユーズブル排液回収システム（届出番号：13B1X00306N10317）と接続します。

2-2：電動式吸引器（Basic 又は Dominant Flex、認証品）、または医療機関等の医療ガス配管設備の吸引源と接続して吸引を開始します。

3. 使用後

吸引を停止し、チューブ、コネクタ等を取り外します。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- ① 本品を使用する前には必ず、製品の汚損、破損、破れ、ヒビ等の異常がないことを確認して使用してください。
- ② 使用中に異常を感じた場合は、使用を中止してください。
- ③ 本品を取り扱う場合には、ゴム手袋、マスク、ゴーグル等の保護具を必ず着用してください。また、周囲環境の汚染に注意してください。
- ④ 廃液には直接触れないでください。感染のおそれがあります。
- ⑤ チューブをコネクタに接続する際は、チューブ接続側に接続してください。
- ⑥ 本品を接続の際は、緩み等の異常がないか確認してください。
- ⑦ 他社製品との併用に関しては検討を行っていないため、併用する際には各施設の責任において実施してください。
- ⑧ フェノール系の洗浄剤で清拭しないでください。

2. その他の注意

使用後は感染防止に留意し、安全な方法で処分してください。

＊ ＊ 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所および水のかからない場所に保管してください。

2. 耐用限界（再使用可能品）

使用状況または使用頻度により、突発的な故障、部品の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ミズホ株式会社

TEL 03(3815)3097

外国製造業者：Medela AG（メデラ AG、スイス連邦）

【保証期間に係る事項】

本品は納品/設置してから 1 年間を保証期間として無償交換いたします。但し、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。