

器 5 1 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 吸引チューブ (1677900)


患者チューブシステム

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

** 【形状・構造及び原理等】

* 1. 外観図

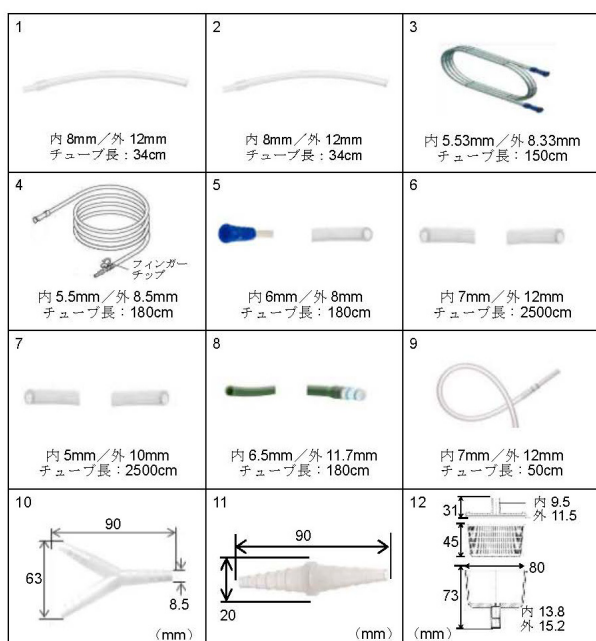

No.	商品コード	商品名
1	08-255-00	患者チューブ 連結用 34cm
2	08-255-01	患者チューブ 連結用 34cm 100 本入り
3	08-255-02 (※1)	患者チューブ B 150cm ファネル 2 個付き 30 本入り
4	08-255-03 (※1)	患者チューブ B 180cm ファネル・フィンガーチップ付き 30 本入り
5	08-255-04 (※2)	患者チューブ B 180cm ファネル付き 30 本入り
6	08-255-05	患者チューブ C ファネル無し 2,500cm
7	08-255-06	患者チューブ A ファネル無し 2,500cm
8	08-255-07	患者チューブ C グリーン 180cm Iコネクタ付 30 本入り
9	08-255-08	患者チューブ リューザブルボトル連結用 30 本入り
10	08-255-09	Yコネクタ 患者チューブ用 10 個入り
11	08-255-10	Iコネクタ 患者チューブ用 10 個入り
12	08-251-08	ディスポーザブル採集カップ 10 個入り

※1：滅菌品・有効期限は包装に表示

※2：有効期限は包装に表示

2. 材質

1. 2. シリコン/ポリプロピレン
 3. 4. 5. 6. ポリ塩化ビニル
 - 7 シリコン
 8. 9 シリコン/ポリアセタール樹脂
 10. 11. 12 ポリプロピレン
- 注：番号は 1. 外観図の番号に対応

3. 作動原理

認証品である電動式吸引器（本品には含まない）または医療機関等の医療ガス配管設備から供給された吸引圧を利用することによりディスポーザブル排液回収システム（本品には含まない）の構成部品であるライナーやリューザブル排液回収システム（本品には含まない）の構成部品であるリューザブルボトル等の排液回収容器のボトル内が陰圧になり、本品を介して血液、体液等が溜まる。

【使用目的又は効果】

血液や体液等をディスポーザブル排液回収システム（本品には含まない）の構成部品であるライナーやリューザブル排液回収システム（本品には含まない）の構成部品であるリューザブルボトル等の排液回収容器に吸引するために使用する。本品は単回使用である。

【使用方法等】

1. 使用の準備

ディスポーザブル排液回収システム専用ボトル（届出番号：13B1X00306N10315）、ディスポーザブル排液回収システム（届出番号：13B1X00306N10316）、またはリューザブル排液回収システム（届出番号：13B1X00306N10317）と接続します。

2. 使用中

電動式吸引器（Basic 又は Dominant Flex、認証品）、または医療機関等の医療ガス配管設備の吸引源と接続して吸引を開始します。

3. 使用後

吸引を停止し、チューブ、コネクタ等を取り外します。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- ① 本品を使用する前には必ず、製品の汚損、破損、破れ、ヒビ等の異常がないことを確認して使用してください。
- ② 単回使用製品ですので再使用しないでください。
- ③ 使用中に異常を感じた場合は、使用を中止してください。
- ④ 本品を取り扱う場合には、ゴム手袋、マスク、ゴーグル等の保護具を必ず着用してください。また、周囲環境の汚染に注意してください。
- ⑤ 廃液には直接触れないでください。感染のおそれがあります。
- ⑥ チューブをコネクタに接続する際は、チューブ接続側に接続してください。
- ⑦ 本品を接続の際は、緩み等の異常がないか確認してください。

- ⑧ 他社製品との併用に関しては検討を行っていないため、併用するには各施設の責任において実施してください。
- ⑨ フェノール系の洗浄剤で清拭しないでください。

2. その他の注意

使用後は感染防止に留意し、安全な方法で処分してください。

＊ ＊ 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所および水のかからない場所に保管してください。

2. 有効期間

包装に表示（自己認証データによる）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ミズホ株式会社

TEL 03(3815)3097

製造業者：Medela AG（メデラ AG、スイス連邦）

【保証期間に係る事項】

本品は納品/設置してから 1 年間を保証期間として無償交換いたします。但し、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。