

器01 手術台及び治療台  
一般医療機器 手術台アクセサリ (70469000)

## ミズホオリジナルマットレス

### 【警告】

#### ＜使用方法＞


患者の任意の体位を確保するためにアクセサリで支持するときは、常に患者の状態を監視すること。[長時間の体位保持は神経麻痺や褥瘡の原因になります。]

### 【禁忌・禁止】

#### ＜使用方法＞

1. 他社製手術台では使用しないこと。[他社製手術台での使用可能は確認していません。]
2. マットレスを消毒液に長時間浸さないこと。[劣化の原因になります。]

### 〈ミズホオリジナルマット MOS-1101NEB 用〉

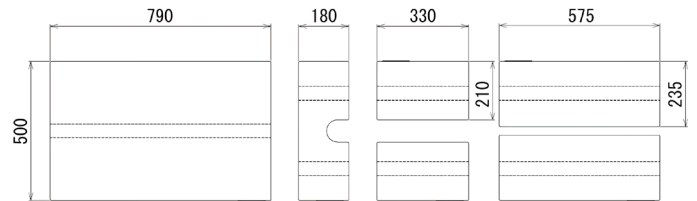

厚：70


単位：mm

| 商品コード     | 商品名                       | 質量(kg) |
|-----------|---------------------------|--------|
| 08-055-00 | ミズホオリジナルマット MOS-1101NEB 用 | 3      |

### \*\* 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 形状及び寸法


〈ミズホオリジナルマットレス（腹臥位用）〉

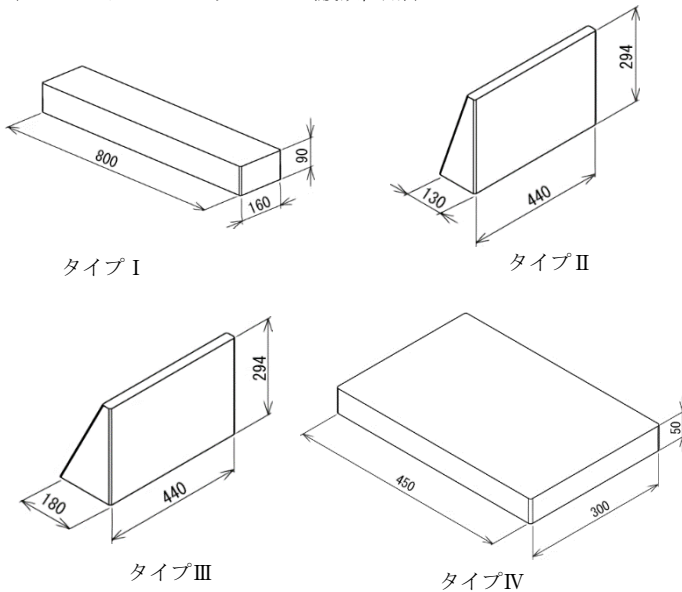

単位：mm

| 商品コード     | 商品名                 | タイプ | 質量(kg) | 構成(個数) |
|-----------|---------------------|-----|--------|--------|
| 08-055-99 | ミズホオリジナルマットレス(腹臥位用) | I   | 0.60   | 2      |
|           |                     | II  | 0.54   | 1      |
|           |                     | III | 0.72   | 1      |
|           |                     | IV  | 0.36   | 1      |

### 〈ミズホオリジナルマット(1100NE 用) 50mm厚〉

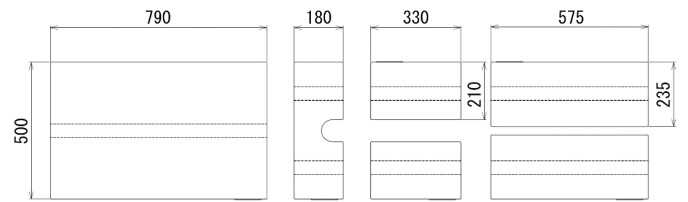


厚：50

単位：mm

| 商品コード     | 商品名                         | 質量(kg) |
|-----------|-----------------------------|--------|
| 08-055-01 | ミズホオリジナルマット(1100NE 用) 50mm厚 | 3      |

### 〈ミズホオリジナルマットレス（5701 用 腰脚一体型）〉

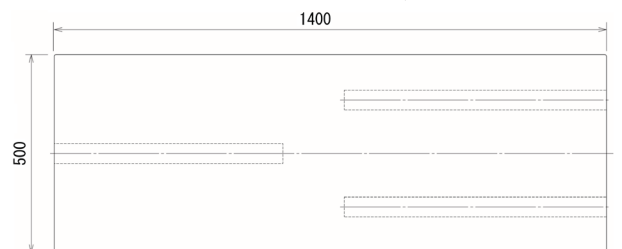


厚：75

単位：mm


| 商品コード     | 商品名                         | 質量(kg) |
|-----------|-----------------------------|--------|
| 08-055-16 | ミズホオリジナルマットレス(5701 用 腰脚一体型) | 3      |

〈ミズホオリジナルマット（5650T用）〉

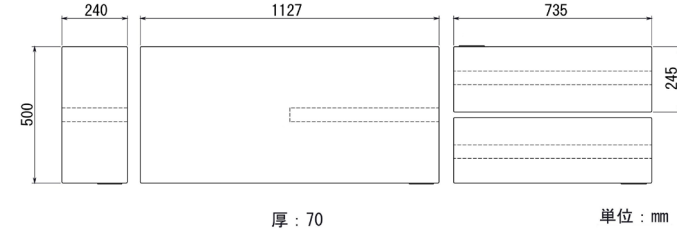


| 商品コード     | 商品名                 | 質量(kg) |
|-----------|---------------------|--------|
| 08-055-56 | ミズホオリジナルマット（5650T用） | 5      |

〈ミズホオリジナルマット（5601M用）〉

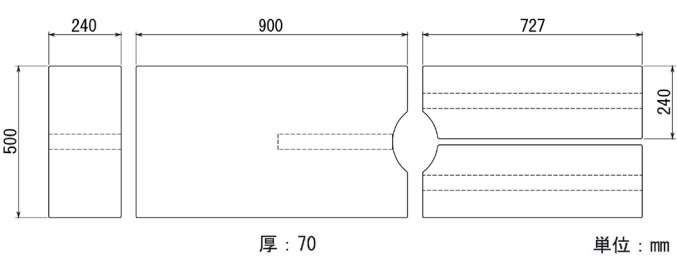


| 商品コード     | 商品名                 | 質量(kg) |
|-----------|---------------------|--------|
| 08-055-17 | ミズホオリジナルマット（5601M用） | 4      |

〈ミズホオリジナルマット(5701用)〉

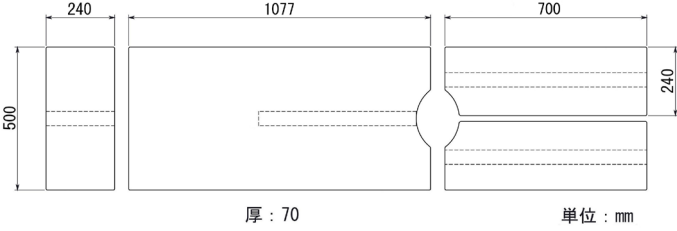


| 商品コード     | 商品名                | 質量(kg) |
|-----------|--------------------|--------|
| 08-055-15 | ミズホオリジナルマット(5701用) | 4      |

〈ミズホオリジナルマット(3501C、5801用)〉

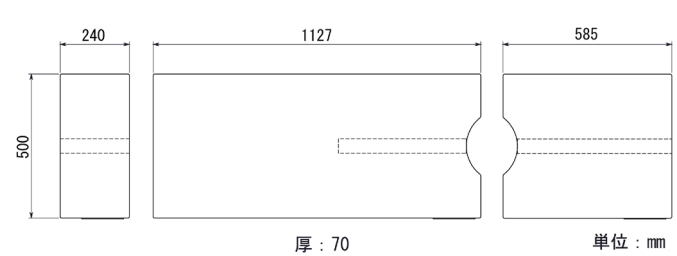


| 商品コード     | 商品名                      | 質量(kg) |
|-----------|--------------------------|--------|
| 08-055-20 | ミズホオリジナルマット(3501C、5801用) | 4      |

〈ミズホオリジナルマット(5801W用)〉

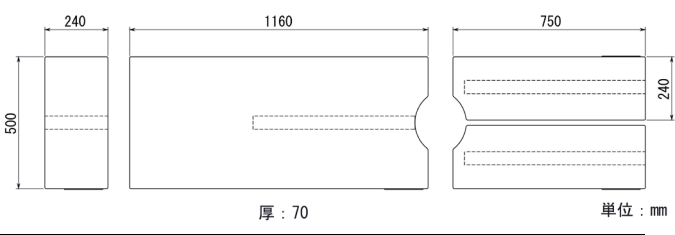


| 商品コード     | 商品名                 | 質量(kg) |
|-----------|---------------------|--------|
| 08-055-23 | ミズホオリジナルマット(5801W用) | 4      |

〈ミズホオリジナルマット(130AS81Dタイプ) 70mm厚〉

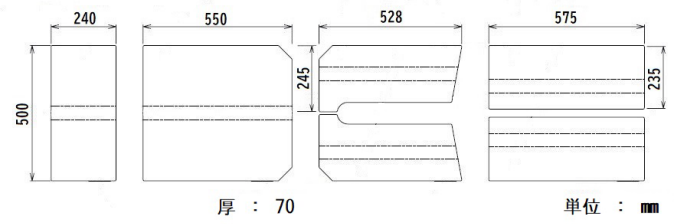


| 商品コード     | 商品名                            | 質量(kg) |
|-----------|--------------------------------|--------|
| 08-055-61 | ミズホオリジナルマット(130AS81Dタイプ) 70mm厚 | 4      |

〈ウレタンマットレスセット (MOT-VS700シリーズ シングル脚板仕様 50mm厚)〉

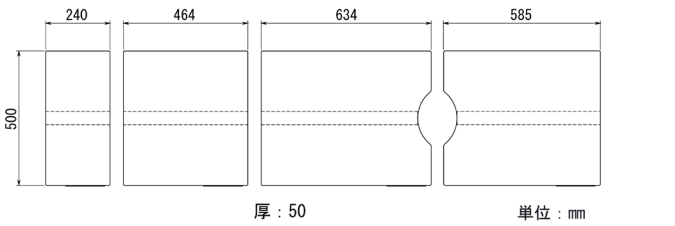


| 商品コード     | 商品名   | 質量(kg) |
|-----------|---|--------|
| 08-056-00 | ウレタンマットレスセット (MOT-VS700シリーズ シングル脚板仕様 50mm厚) | 3      |

〈ウレタンマットレスセット (MOT-VS600シリーズ用 50mm厚)〉

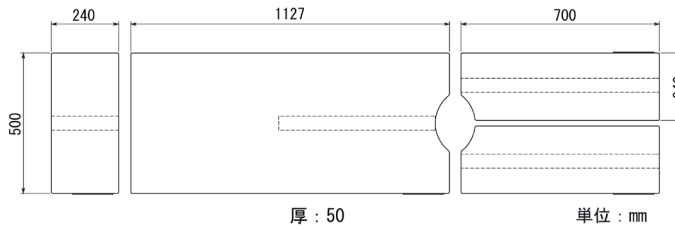


| 商品コード     | 商品名                                 | 質量(kg) |
|-----------|-------------------------------------|--------|
| 08-056-10 | ウレタンマットレスセット (MOT-VS600シリーズ用 50mm厚) | 4      |

〈ウレタンマットレスセット（MOT-5701 用 50mm厚 背腰分割タイプ）〉

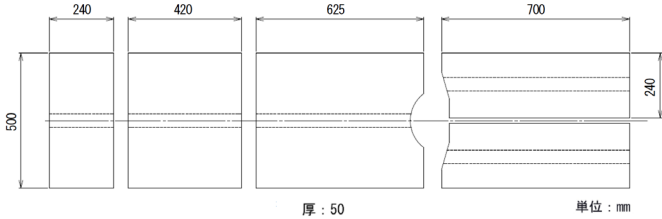

| 商品コード     | 商品名                                    | 質量(kg) |
|-----------|--|--------|
| 08-056-15 | ウレタンマットレスセット（MOT-5701 用 50mm厚 背腰分割タイプ） | 3      |

〈ミズホオリジナルマットレス背板・腰板タイプ K〉

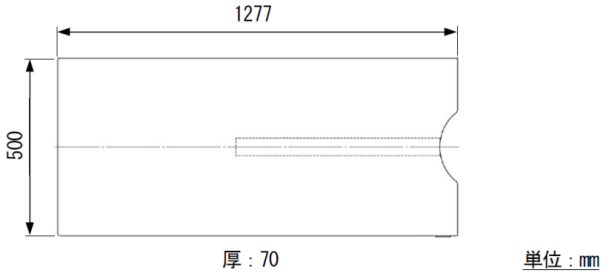

| 商品コード     | 商品名                     | 質量(kg) |
|-----------|-------------------------|--------|
| 18-042-49 | ミズホオリジナルマットレス背板・腰板タイプ K | 2.3    |


2. 原材料

ポリウレタン  
ナイロン

【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリをいう。体位固定時のサポートに使用。

【使用方法等】

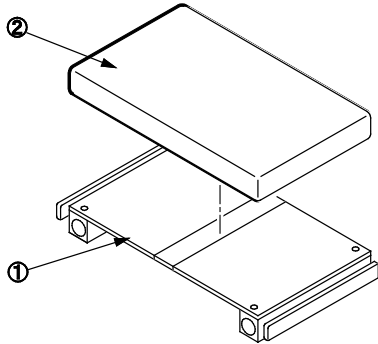

- 手術台と患者の隙間に設置する。
- 面ファスナーのあるマットレスは、マットレス②をベーク板①の面ファスナーにより固定する。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 衛生のため、患者が触れる部分には必ず滅菌済ドレープを使用してください。
- マットレスを使用する前に異物や汚れが付着していない事を確認してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管してください。

2. 耐用期間

適切な保守点検及び適切な保管をした場合：7年（注）  
〔自己認証（弊社データ）による〕  
注：耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、マットレスの著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。

【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検事項＞

- 使用前・使用後の点検  
使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認してください。
- 清掃・消毒  
血液・薬剤・汚染等の汚れを水で拭き取り、消毒液を浸したガーゼ等で清拭してください。なお、消毒液は弊社製手術台にて確認済みの消毒液と同一のものをご使用ください。確認済みの消毒液については手術台の取扱説明書をご参照ください。
- 故障時のお願い  
本品が故障したと思われるときは、本品に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

＜業者による保守点検事項＞

弊社及び弊社が認めた業者のみが実施可能です。それ以外の業者による保守・点検は、有害事象の発生、性能・機能低下の事態を招くおそれがあります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ミズホ株式会社

TEL 03(3815)3097

製造業者：ミズホ株式会社千葉工場

保証期間に係る事項

本品は納品/設置してから1年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。