

器01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ (70469000)

上肢挙上用 タリスマンバンド

【警告】

＜使用方法＞

患者の任意の体位を確保するためにアクセサリで支持するときは、常に患者の状態を監視すること。[長時間の体位保持は神経麻痺や褥瘡の原因になります。]


【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

1. 他社製手術台では使用しないこと。[他社製手術台での使用可能を確認していません。]
2. 【形状・構造及び原理等】の項目3.に示す許容荷重を超えた使用をしないこと。[破損するおそれがあります。]
3. 患者にバンドを無理に締め付けないこと。[患者に傷害が起きるおそれがあります。]

【形状・構造及び原理等】

1. 外観図

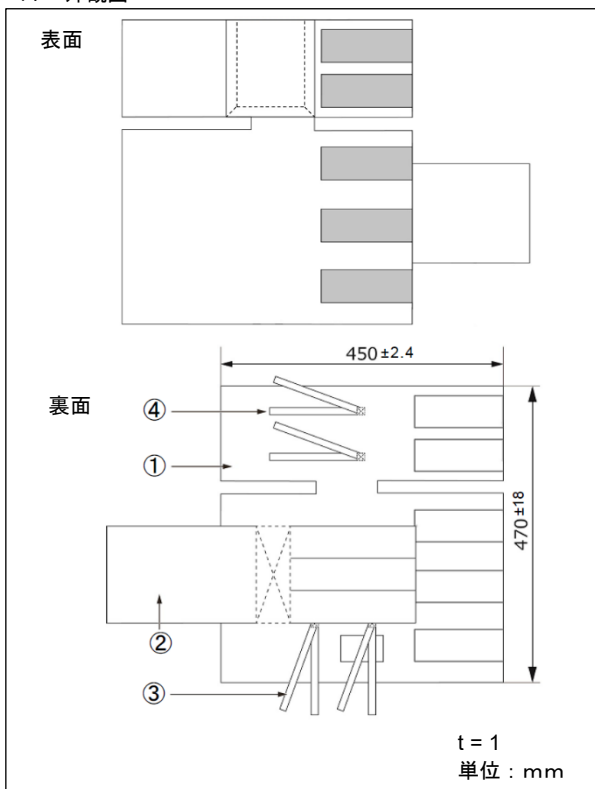

商品コード	商品名	構成
08-084-14	タリスマンバンド A4 スリングタイプ	①～④

2. 質量

0.3 kg

3. 許容患者体重

200 kg

4. 原材料


- ① 固定バンド A : 合成樹脂
 - ② 固定バンド B : 合成樹脂
 - ③ 付属紐 (水色) : 合成樹脂
 - ④ 付属紐 (青色) : 合成樹脂
- 注：番号は1. 外観図の番号に対応

【使用目的又は効果】


手術台に付属するアクセサリをいいます。患者の上肢を固定するためのバンドです。

【使用方法等】

1. 使用方法

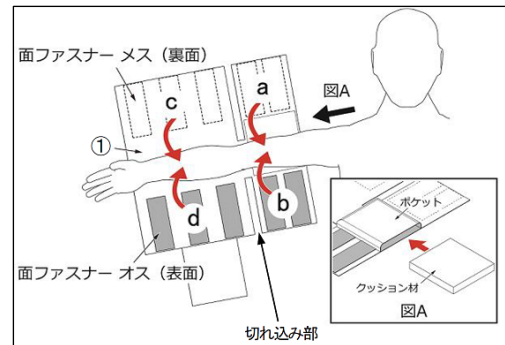

1. 固定バンド A①の表面に患者の上肢を乗せます。患者の肘を切れ込み部に合わせ、上腕部がポケットの上となるように位置を調整します。
※ポケットには必要に応じてクッション材を入れます。なお、クッション材は本品に付属していません。
2. 固定バンド A①の面ファスナー (a と b 及び c と d) を合わせ、患者の上肢に巻き付けます。

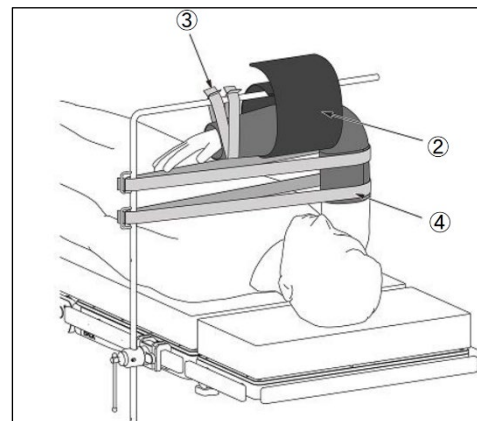

3. 固定バンド B②の面ファスナーを合わせ、スクリーン掛に固定します。
※スクリーン掛は事前に、固定したい上肢と反対側のサイドレールに取り付け、必要に応じて位置・角度を調整します。

4. 付属紐（水色）③をスクリーン掛に結びます。
5. 付属紐（青色）④をスクリーン掛のスリングフックに結びます。

注：文中の番号は1. 外観図の番号に対応

2. 取付可能なアクセサリ

販売名	L型スクリーン掛
製造販売届出番号	13B1X00306N10006
商品コード	08-062-50
商品名	スリングフック付L型スクリーン掛 固定金具付

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 締結部の固定は必ず確認してください。ゆるんだ状態では機器が外れたり、動いたりして患者に傷害が起きるおそれがあります。
2. 手術台を作動するときは他のアクセサリやテーブルトップとの接触・干渉に注意してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管してください。

2. 耐用期間

適切な保守点検及び適切な保管をした場合：1年（注）

〔自己認証（弊社データ）による〕

注：本品は消耗品です。耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、固定力に劣化が認められた場合は速やかに新品と交換してください。

【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検事項＞

1. 使用前・使用後の点検

使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認してください。

2. 清掃・消毒

本品が汚れた場合、以下の薬品や洗剤等で洗浄可能です。

- ・次亜塩素酸ナトリウム 250ppm 以下
- ・過酸化水素水 250ppm 以下
- ・pH10.5 以下の洗剤
- ・80℃の熱湯

面ファスナーにゴミや糸くず等が付着すると固定力が劣化する原因になるため、洗濯機による洗浄では洗濯用ネットの使用を推奨します。

以下の使用は劣化の原因となりますので避けてください。

- ・高圧プレス
- ・ロール乾燥

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ミズホ株式会社

TEL 03(3815)3097

製造業者：ミズホ株式会社 千葉工場