

機械器具 (01) 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ JMDNコード：70469000

販売名：ビーチェアショルダーポジショナー

【警告】


- 患者の体位を取らせるために手術台アクセサリで支持するときは常に患者の状態を監視すること。
長時間の体位は神経麻痺の原因となる場合がある。

【禁忌・禁止】

- 弊社製手術台以外では使用しないこと。
差込部分の構造が異なると固定できない場合がある。
- 本機器は肩手術用に設計されているため、他の用途には使用しないこと。
- 135kgを超える荷重をかけないこと。破損の恐れがある。
- 取付用ハンドルが緩んだ状態で使用しないこと。
手術台アクセサリが動いて患者に障害が起きるおそれがある。

【形状・構造及び原理等】

単位：mm

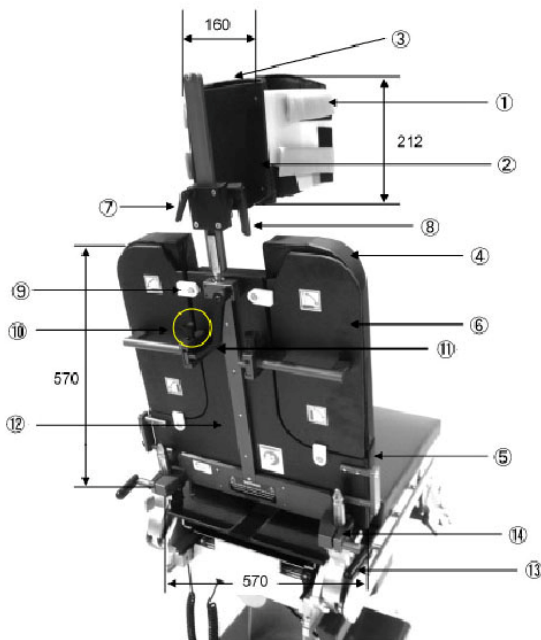

商品コード	商品名
08-068-20	ビーチェアショルダーポジショナーマット付

1) 質量

9.5kg

2) 材質

- | | | |
|---------------|---|-------------|
| ① 頭部・頸部ストラップ | ： | ウレタン・ナイロン樹脂 |
| ② 頭部ベース | ： | 熱硬化性樹脂積層板 |
| ③ 頭部パッド | ： | ウレタンフォーム |
| ④ 肩部パッド | ： | ウレタンフォーム |
| ⑤ 主柁パッド | ： | ウレタンフォーム |
| ⑥ ショルダーパネル | ： | 熱硬化性樹脂積層板 |
| ⑦ スライド調整レバー | ： | 合成樹脂成形品 |
| ⑧ ヘッド調整レバー | ： | 合成樹脂成形品 |
| ⑨ 旋回ロック | ： | ポリアセタール樹脂 |
| ⑩ プランジャー | ： | 合成樹脂成形品 |
| ⑪ ジョイント調整レバー | ： | 合成樹脂成形品 |
| ⑫ 主柁パネル | ： | 熱硬化性樹脂積層板 |
| ⑬ アダプター固定ハンドル | ： | アルミニウム合金棒 |
| ⑭ アダプター | ： | アルミニウム合金棒 |

【使用目的、効能又は効果】

本品は、手術台に付属するアクセサリであり、肩手術に用いる手術台アタッチメントである。

【品目仕様等】

- 1) 外観
目視検査にて表面に機能を損なうような欠陥又は汚染物を認めないこと。
- 2) 寸法
各部の寸法が図面公差の範囲内であること。
- 3) 取付可能な手術台
 - 販売名：MOT-5601KDB電動油圧手術台
製造販売届出番号：13B1X00306N10056
届出年月日：平成19年11月13日
 - 販売名：MOT-5700電動油圧手術台
製造販売届出番号：13B1X00306N10057
届出年月日：平成19年11月13日

取扱説明書を必ずご参照下さい。

【操作方法又は使用方法】

【使用例】



【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

ミズホ株式会社
〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目30番13号
TEL 03(3815)3097 FAX 03(3813)5068

製造業者

スカイトロン社
SKYTRON
アメリカ合衆国

機器の詳細な方法は取扱説明書をお読み下さい。

1. 手術台の自動水平復帰機能を操作してテーブルトップを水平にする。
2. 手術台のスライド機能を操作してテーブルトップを水平位置にする。
3. 手術台の頭部板および背板を取り外す。
4. 手術台の背板差込軸にアダプターを取り付けて固定する。
5. アダプターにビーチチェアショルダーポジショナーを取り付けて固定する。
6. 手術台の背板屈折機能を操作して角度を調節する。
7. 術野側のショルダーパネルを取り外す。
8. 必要に応じて頭部位置を調整する。

【使用上の注意】

1) 重要な基本的注意

- 手術台に本機器を取り付ける前にテーブルトップのスライド機能が中心位置であることを確認すること。
- 本機器を手術台に取付後はスライド機能を操作しないこと。
- ビーチチェアショルダーポジショナーが手術台本体に完全に差し込まれていることを確認すること。
- 手術台を作動するときは他の手術台アクセサリやテーブルトップとの接触・干渉に注意すること。

【貯蔵方法及び有効期間等】

高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管すること。

【保守・点検に関わる事項】

- 使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認する。
- 修理を希望される場合はご購入店または弊社に相談してください。

【包装】

1 個 1 包装

【保証期間に係わる事項】

本品は納品/設置してから一年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。

取扱説明書を必ずご参照下さい。