

機械器具 56 採血又は輸血用器具
管理医療機器 輸血セット(38569000)

輸血セット(BLL2)

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止、再滅菌禁止

【形状・構造等】

〈各部の名称〉

(構造図)

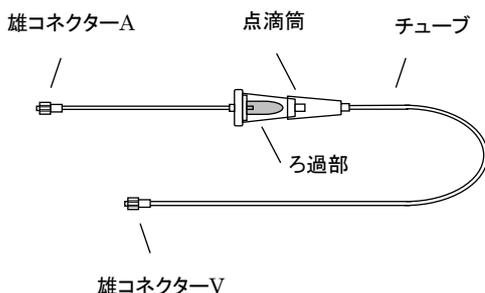

- ・上記は代表例です。
- ・型番 BLL2 は針無し、クランプ無しで、両端がオスコネクターの製品であり、三方活栓付です。
- ・本品はポリ塩化ビニル(可塑剤:フタル酸ジ(2-エチルヘキシル))を使用しております
- ・本品の点滴筒は、点滴量 20 滴≒1mL 仕様です。
- ・ろ過部の網目の大きさは 0.2mm です。

【使用目的又は効果】

本品は、滅菌済みであるのでそのまま直ちに使用できる。

【使用方法等】

1.輸血操作

- ①三方活栓を雄コネクターAに接続してください。
- ②雄コネクターVを上向きにして、雄コネクターA側から滅菌済み生理食塩液をゆっくり注入し、本品の洗浄とエア抜きを行ってください。
- ③本品が滅菌済み生理食塩液で満たされたら、流出しないよう三方活栓を閉じてください。
- ④エアが混入しないよう、本品を接続してください。この時、雄コネクターVを静脈内へ挿入した針又はカテーテル等に接続してください。
- ⑤本品を含む回路内にエアが混入していない状態で三方活栓を開放して輸血を開始してください。

〈使用方法に関連する使用上の注意〉

- ・本品がねじれないようにコネクター等を接続するとともに、外れないようしっかり接続してから使用してください。
- ・チューブが折り曲げられたり、引っ張られた状態で使用しないでください。

2.三方活栓の操作

〈使用方法に関連する使用上の注意〉

- ・三方活栓にシリンジ、コネクターを接続する場合は、外れないよ

うにしっかり接続してください。また、液が流れる方向にハンドルが操作されていることを確認してください。

- ・アルコール等の有機溶剤を含む消毒剤を使わないでください。接続部にひび割れが生じる場合があります。
- ・油性の造影剤、脂肪乳剤、アルコール等を使用すると、接続部にひび割れが生じる場合があるので、確認しながら使用してください。
- ・三方活栓に混注用キャップ等を装着し、注射針を用いて混注する場合、針先がハンドル部に接触するとハンドルを破損して液洩れが生じる場合があるので注意してください。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- ・本品は可塑剤であるフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)が溶出する恐れがありますので、注意してください。
- ・静脈針などの針部には直接手を触れないでください。
- ・使用後の輸血セットは、感染防止に留意し、安全な方法で処分してください。

【保管方法及び有効期間等】

1.保管方法

- ・水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて保管してください。

2.有効期間

- ・箱の使用期限欄を参照してください。(自己認証(当社データ)により設定)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売業者〉 三矢メディカル株式会社

TEL 06-6707-9105

〈販売業者〉 株式会社 東海メディカルプロダクツ

TEL 0568-54-7661