

機械器具 74 医薬品注入器

管理医療機器 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット 70371000


滅菌済み輸液セット
(TLA チューブ NEO)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

<使用方法>
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

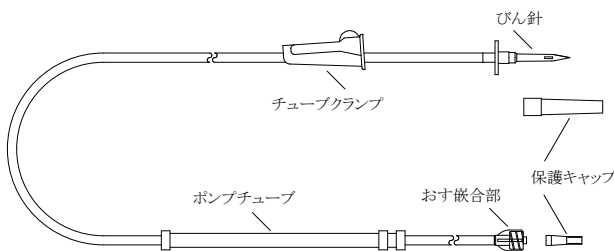

1. 寸法

全長(びん針の基からおす嵌合部の基まで):4070mm

2. 原材料

びん針	ABS
チューブ	ポリ塩化ビニル
おす嵌合部	ポリカーボネート

チューブにはポリ塩化ビニル(可塑剤:フタル酸ジエチルヘキシル)を使用している。

【使用目的又は効果】

本品は、滅菌済みであるのでそのまま直ちに使用できる。
(注射用医薬品を注入する)

【使用方法等】

輸液ポンプの添付文書、取扱説明書に従って使用する。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・使用中は本品の破損、接合部のゆるみ及び薬液漏れ等について、定期的に確認すること。
- ・脂溶性の薬液ではポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジエチルヘキシル)が溶出するおそれがあるので注意すること。
- ・脂肪乳剤及び脂肪乳剤を含む医薬品、ヒマシ油等の油性成分、界面活性剤又はアルコール等の溶解補助剤等を含む医薬品を投与する場合及びアルコールを含む消毒液を使用する場合は、コネクターのひび割れについて注意すること。[薬液によりコネクターにひび割れが生じ、血液及び薬液漏れ、空気混入等の可能性がある。]
- ・ひび割れが確認された場合は、直ちに新しい製品と交換すること。
- ・輸液ポンプを使用する場合は、輸液ポンプの添付文書等で適合機種、輸液ポンプの使用方法及び使用上の注意等を確認すること。

と。[装着等が不十分な場合、輸液量の精度、気泡検知の誤警報及び閉塞検知圧に影響する。]

- ・気泡検出機能が付いていない輸液ポンプと併用する場合は、輸液剤容器の薬液がなくなる前に輸液を中止すること。
- ・閉塞検出機能が付いていない輸液ポンプと併用する場合は、注意すること。[ラインの閉塞等により異常圧がかかり、接合部の外れ、破損等が生じる場合がある。]
- ・輸液ポンプを用いて輸液を行う場合、24 時間おきにチューブのポンプ装着部をずらすか新しい輸液セットと交換すること。[チューブが変形して流量が不正確になることがある。]
- ・包装を開封したらすぐに使用し、使用後は感染防止に留意し安全な方法で処分すること。

【保管方法及び有効期間等】

1.保管方法

- ・水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて保管してください。

2.有効期間

- ・包装袋の使用期限欄を参照してください。(自己認証(当社データ)により設定)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 三矢メディカル株式会社

販売業者 株式会社インテグラル