

機械器具 32 医療用吸引器  
一般医療機器 胸腔排液用装置 10817000

## ハイムリッヒチェストドレーンバルブ

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

#### ＜適用対象(患者)＞


- ・天然ゴムに対する過敏症のある患者への使用は禁止。
- ・片肺全摘手術後の患者への使用は禁止。

#### ＜使用方法＞

- ・胸腔からのカテーテルは排気側に接続せず、必ず青色キャップ側に接続すること。[逆につなぐと空気及び液が流れないため]

#### 【形状・構造及び原理等】

##### (構造図)

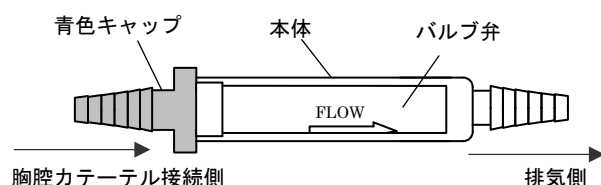

- ・本品は天然ゴムを使用しております。

#### 【使用目的又は効果】

本品は、胸腔ドレーンに接続し、胸腔から血液、空気、膿状分泌物を除去するために用いる。

#### 【使用方法等】

##### 操作方法

- ①通常の手法にてカテーテルを胸腔内に留置し、固定します。
- ②カテーテルの他方の端が斜めの場合は直角に切り、できるだけ深くハイムリッヒバルブの青色の接続部分につなげ、更にテープを巻いてカテーテルとバルブがはずれないようにします。(透明の本体に表示してある FLOW DIRECTION の矢印の方向が下方に向いた状態になります。)
- ③胸腔内圧の増減により、バルブが開閉し脱気されます。移動の際にもカテーテルをクランプとめる必要はありません。
- ④吸引が必要な患者の場合には低圧持続吸引器に接続します。
- ⑤血胸や胸水を伴う場合はバルブの先に閉鎖式ドレナージバック(滅菌済で空気孔のあるもの)を接続します。ただしこの場合、凝固によってバルブが作動しなくなることがありますので注意してください。バルブが詰まった場合にはカテーテルをクランプ

で止め、新しいハイムリッヒバルブと交換します。

#### 【使用上の注意】

##### 重要な基本的注意

- ・本品は天然ゴムを使用しています。天然ゴムは、かゆみ、発赤、むくみ、蕁麻疹、発熱、呼吸困難、喘息発作、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに引き起こすことがあります。このような症状を起こした場合は、直ちに使用を中止し、適切な処置を施して下さい。
- ・アルコール等の有機溶剤を含む消毒剤を使用しないで下さい。本体にひび割れが生じる場合があります。
- ・本品は逆止弁が付いているため、矢印方向にのみ空気及び液が流れる構造になっています。胸腔からのカテーテルは必ず青色キャップ側に接続してください。

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### 1.保管方法

- ・水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて保管してください。

##### 2.有効期間

- ・滅菌後 3 年です。(自己認証(当社データ)により設定)

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 三矢メディカル株式会社  
TEL 06-6707-9105

販売業者 平和物産株式会社

TEL 03-3287-0731