

## V型シリンジ

### 【警告】


1. 本製品の使用中には絶対にノズルのリングを先端方向に引かないこと。また、使用中には絶対にボタンを押さないこと。[ノズルやグリップの外れによる怪我をまねく恐れがある]
- \*\* 2. 患者ごとに、指定する方法および条件で、洗浄等の処理を行った上で滅菌すること。[感染予防のため]

### 【形状・構造及び原理等】

#### 体に接触する部分の組成

- ・ アルミニウム  
グリップ
- ・ ステンレス鋼  
ノズル
- ・ ポリエーテルスルホン  
Aレバー、Wレバー

#### 形状

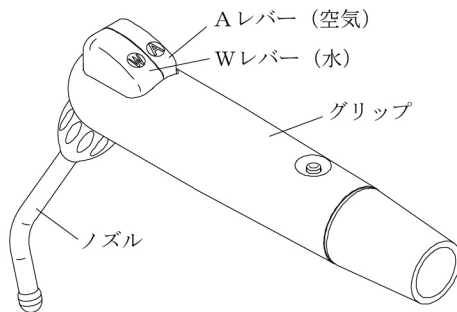

#### 作動・動作原理

グリップに設けられた内部本体部の内レバーと連動する外レバー (Aレバー・Wレバー) により、ノズルに供給する圧縮空気と水の操作を行う。また、外レバー (Aレバー) の押し加減により圧縮空気の流量を容易に調整できる。

#### 仕様

常用圧力: 0.1~0.3MPa (1.0~3.0kgf/cm<sup>2</sup>)

### 【使用目的又は効果】

#### 使用目的

歯科用ユニットから供給される圧縮空気および水を操作して口腔内の洗浄および乾燥を行う。

### 【使用方法等】


#### 使用方法

##### 1. 操作方法

1. グリップのWレバー (水) のみ、またはAレバー (空気) とWレバー (水) を共に押圧することにより水、または水と空気の混合によるスプレーで口腔内の洗浄を行う。
2. グリップのAレバー (空気) のみを押圧することにより口腔内の乾燥を行う。また、Aレバー (空気) の押し加減により空気の流量を可変して適当な流量で乾燥を行うことができる。

##### 2. ノズルの取り外し・取り付け

1. リングを先端方向に引いた状態でノズルを引き抜き、ノズルを取り外す。
2. リングを先端方向へ引いた状態でノズル継ぎに挿入し、リングを離すことにより、ノズルが取り付けられる。

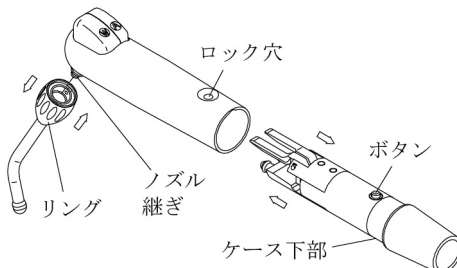

##### 3. グリップの取り外し・取り付け

1. ボタンを押しながら、グリップからケース下部を引き抜き、グリップを取り外す。
2. ロック穴とボタンの位置を合わせてケース下部にグリップを挿入し、グリップを取り付ける。

#### 使用方法に関連する使用上の注意

1. 本製品の使用中には絶対にノズルのリングを先端方向に引かないこと。また、使用中には絶対にボタンを押さないこと。
2. 使用前にノズルおよびグリップが確実に固定されていることを確認すること。

### 【使用上の注意】

#### その他の注意

- \* 1. 使用前にノズルおよびグリップのアルコール清拭およびオートクレーブ滅菌を行うこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 保管方法

1. 十分に乾燥させて保管すること。

#### 耐用期間・使用期間

製造出荷日から、正規の保守点検を行った場合に限り5年とする。ただし、消耗品については使用頻度によって5年以内の交換が必要となる。  
[記載の耐用期間は、自己認証 (当社データ) による]

#### 消耗品

1	ノズル
2	Oリング (ノズル継ぎ)

### 【保守・点検に係る事項】

#### 使用者による保守点検事項

- \*\* 1. 患者ごとに、指定する方法および条件で、洗浄等の処理を行った上で滅菌すること。
- 2. ノズル、グリップの洗浄には超音波洗浄機を使用しないこと。
- \* 3. 最高滅菌温度は摂氏 135 度のため、オートクレーブ滅菌の設定は摂氏 121 度で 20 分、または摂氏 132 度で 15 分にする。
- 4. 薬品が付着した器具とは一緒に滅菌器にかけないこと。
- 5. 消毒液の中に本体をそのままつけないこと。
- 6. 消毒の際には、アルカリ性の消毒剤および酸化電位水 (強酸性水、超酸性水) を使用しないこと。
- 7. 乾熱滅菌など、指定の最高滅菌温度を超える滅菌は高温のため、避けること。
- 8. 滅菌器の状態や滅菌方法によっては、本体が変色する場合がある。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

#### \*\* \* 発売元

株式会社ヨシダ

〒110-8507 東京都台東区上野 7-6-9

TEL 0800-170-5541 (ヨシダコンタクトセンター)

03-6880-2155 (携帯電話からの場合)

#### 製造販売元

株式会社ミクロン

〒146-0082 東京都大田区池上 2-17-7

TEL 03-3755-0396 (代) FAX 03-5747-5396

#### 製造元

株式会社ミクロン