

歯科用トリプルシリンジ

【警告】


1. 本製品の使用中には絶対にノズル押えを緩めないこと。[ノズルの外れによる怪我をまねく恐れがある]
- * 2. 患者ごとに、指定する方法および条件で、洗浄等の処理を行った上で滅菌すること。[感染予防のため]

【形状・構造及び原理等】

体に接触する部分の組成

- ・黄銅（ニッケルメッキ）
シリンジ本体
- ・ステンレス鋼
ノズル、ノズル押え
- ・ポリアセタール
圧縮空気バルブ、水バルブ、グリップ

形状

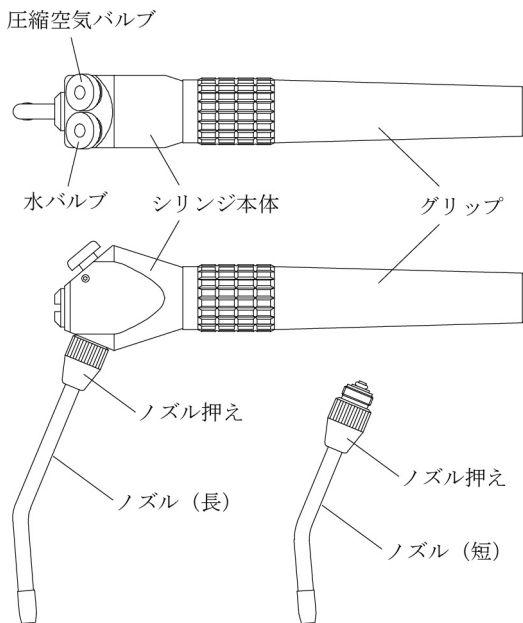

作動・動作原理

歯科用ユニットから圧縮空気および水が供給されて動作する。バルブを操作することにより圧縮空気および水を噴出する。

仕様

常用圧力: 0.1~0.3MPa (1.0~3.0kgf/cm²)

【使用目的又は効果】

使用目的

歯科用ユニットから供給される圧縮空気および水を操作して口腔内の洗浄および乾燥を行う。

【使用方法等】

使用方法

1. 操作方法

1. シリンジ本体の水バルブのみ、または圧縮空気バルブおよび水バルブを共に押圧することにより水、または水および空気の混合によるスプレーで口腔内の洗浄を行う。
2. シリンジ本体の圧縮空気バルブのみを押圧することにより口腔内の乾燥を行う。

2. ノズルの取り外し・取り付け

1. ノズル押えを緩め、ノズルを取り外す。
2. シリンジ本体にノズルの後部を挿入し、ノズル押えを締める。

使用方法に関連する使用上の注意

1. 本製品の使用中には絶対にノズル押えを緩めないこと。
2. 使用前にノズルが確実に固定されていることを確認すること。

【使用上の注意】

その他の注意

1. 使用前にアルコール清拭を行い、ノズルはオートクレーブ滅菌を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

1. 十分に乾燥させて保管すること。

耐用期間・使用期間

製造出荷日から、正規の保守点検を行った場合に限り5年とする。ただし、消耗品については使用頻度によって5年以内の交換が必要となる。

[記載の耐用期間は、自己認証(当社データ)による]

消耗品

1	ノズル
---	-----

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

- * 1. 患者ごとに、指定する方法および条件で、洗浄等の処理を行った上で滅菌すること。
2. ノズルの洗浄には超音波洗浄機を使用しないこと。
3. 最高滅菌温度は摂氏135度のため、オートクレーブ滅菌の設定は摂氏121度で20分、または摂氏132度で15分にする。
4. 薬品が付着した器具とは一緒に滅菌器にかけないこと。
5. 消毒液の中に本体をそのままつけないこと。
6. 消毒の際には、アルカリ性の消毒剤および酸化電位水(強酸性水、超酸性水)を使用しないこと。
7. 乾熱滅菌など、指定の最高滅菌温度を超える滅菌は高温のため、避けること。
8. 滅菌器の状態や滅菌方法によっては、本体が変色する可能性がある。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

* 発売元

株式会社ヨシダ
〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9
TEL 0800-170-5541 (ヨシダコンタクトセンター)
03-6880-2155 (携帯電話からの場合)

製造販売元

株式会社ミクロン
〒146-0082 東京都大田区池上2-17-7
TEL 03-3755-0396 (代) FAX 03-5747-5396

製造元

株式会社ミクロン