


特定保守管理医療機器 「ルーティー 560」の付属品
ペリオファイル

【形状・構造及び原理等】

体に接触する部分の組成

- ・ステンレス鋼
ファイル針
- ・ポリアセタール
ハンドル

形状

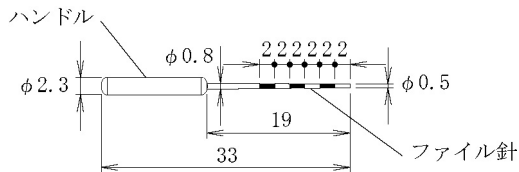

【使用目的又は効果】

使用目的

本製品は歯科医師が歯科治療において、患者の歯面などに付着した歯石および歯垢の除去、根管の拡大形成、歯の切削、歯周組織などの洗浄などを行うために使用する。本付属品は歯科医師が歯科治療において、患者の歯面などに付着した歯垢の除去、歯周組織などの洗浄などを行うために使用する。

【使用方法等】


適応機種

- ・ルーティー 560 (認証番号 : 20700BZZ00045000)



使用方法

1. 歯垢除去時

1. U・E 用ホルダーを適応機種付属の専用レンチを使用して取り付ける。
2. U・E 用ホルダーにエンジン用チャック (別売) を取り付ける。
3. ペリオファイルのハンドル部分をエンジン用チャックに挿入し、適応機種付属の専用レンチによって締める。

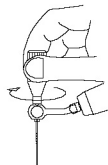

4. 適応機種を歯科用ユニットのホースに接続し、注水しながら作動させる。
5. 適応機種のパワーコントロールリングによってペリオファイル先端部の振れを調整し、注水状態が図の状態になるよう調整する。パワーは『1』または『2』の状態で作成する。

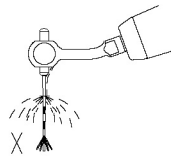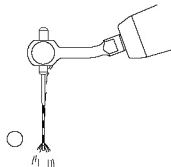

6. フットスイッチを操作して水を供給し、ペリオファイルを振動させると同時に注水する。
7. ペリオファイルを歯垢に当て、歯垢を除去する。

使用方法等に関連する使用上の注意

1. 適応機種以外の製品に取り付けて使用しないこと。
2. ペリオファイルの装着は、適応機種付属の専用レンチによって確実に取り付けること。
3. パワーコントロールリングは 1(弱)から 2 へ少しずつ切り換えること。
4. ペリオファイルの脱落・破損による誤嚥などを防止するために、ラバーダム防湿法や治療中は患者に鼻呼吸をさせるといった対策を行うこと。
5. 使用するペリオファイルの消耗の程度、パワー調整など使用環境によっては大きな作動音の発生や、ペリオファイルの振幅が通常より大きくなる場合がある。
6. 同じ箇所長時間、ペリオファイルを当てないこと。
7. ペリオファイルを必要以上に挿入し、ポケット底を傷つけないためにポケットの長さを治療前に把握すること。
8. イリゲーション効果を発揮させるためと、根面を損傷しないために十分に注水を行うこと。
9. ポケット内で振動を開始する時はペリオファイルをポケットに挿入し、ポケットの長さを確認してから行うこと。
10. ペリオファイルを根面に当てる角度はなるべく歯軸に平行になるように当てること。
11. パワーコントロールリングにより必ずペリオファイル先端部の振れを調整した後に使用すること。

【使用上の注意】

その他の注意

1. 使用前にアルコール清拭を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

1. 本製品は十分に乾燥させて保管すること。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

1. アルコール清拭は患者ごとに必ず行うこと。
2. ペリオファイルはアルコール清拭を行い、オートクレーブ滅菌またはケミカル滅菌は行わないこと。
3. 消毒液の中にペリオファイルをそのままつけないこと。
4. 消毒の際には、アルカリ性の消毒剤および酸化電位水(強酸性水、超酸性水)を使用しないこと。
5. 保守点検後、ペリオファイルを十分に乾燥させること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

** * 発売元

株式会社ヨシダ

〒110-8507 東京都台東区上野 7-6-9

TEL 0800-170-5541 (ヨシダコンタクトセンター)

03-6880-2155 (携帯電話からの場合)

製造販売元

株式会社ミクロン

〒146-0082 東京都大田区池上 2-17-7

TEL 03-3755-0396 (代) FAX 03-5747-5396

製造元

株式会社ミクロン