

特定保守管理医療機器 \* 「サリー・ポピー」の付属品  
\* スケーリングチップ

【警告】


1. 患者ごとに、指定する方法および条件で、洗浄等の処理を行った上で滅菌すること。[感染予防のため]

【形状・構造及び原理等】

体に接触する部分の組成

- ・ ステンレス鋼  
スケーリングチップ
- ・ シリコーンゴム  
Oリング (スケーリングチップ)

形状

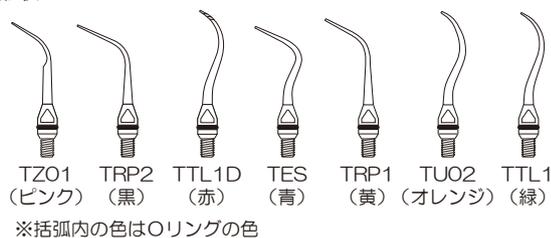

※括弧内の色はOリングの色

【使用目的又は効果】

使用目的

本製品は歯科医師が歯科治療において、患者の歯面などに付着した歯石および歯垢の除去、根管の拡大形成を行うために使用する。

本付属品は歯科医師が歯科治療において、患者の歯面などに付着した歯石および歯垢の除去を行うために使用する。

\* 【使用方法等】

詳細は、適応機種付属の取扱説明書を参照すること。  
※以下、スケーリングチップは「チップ」と表記する。

適応機種

- ・ サリー (認証番号: 21400BZZ00149000)
- ・ ポピー (認証番号: 231AKBZX00013000)

使用方法等に関連する使用上の注意

1. 適応機種以外の製品に取り付けて使用しないこと。
2. 患者ごとにチップが固定されていることを確認すること。
3. チップは強く締めすぎないこと。
- \*\* 4. パワーが強すぎるとチップの振幅が大きくなり、歯面および歯肉が損傷したり、チップが破損して怪我などをまねくおそれがある。
5. ラバーダム防湿法や治療中は患者に鼻呼吸をさせるといった対策を行うこと。
6. スケーリングを行うときは、以下の理由のため十分な水を併用すること。
  - ・ スケーリング部位を冷却するため
  - ・ チップを冷却するため
  - ・ イリゲーション効果を発揮させるため
  - ・ 根面の損傷を防ぐため
7. 刃部のあるチップ (TUO2, TTL1D, TZO1 など) を歯肉縁下など軟組織に接触する部位で使用しないこと。
8. 同じ箇所長時間、チップを当てないこと。
9. チップを必要以上に挿入しないこと。
10. チップに直接触れないこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

1. チップは十分に乾燥させて保管すること。

\* 【保守・点検に係る事項】


保守の方法

適応機種付属の取扱説明書を参照し、洗浄、水抜き、乾燥および滅菌を行うこと。

点検の方法

チップの消耗の確認

1. 適応機種付属の取扱説明書に従って、チップを取り外す。
2. 適応機種付属の「サリー・ポピー用チップ消耗ガイド」または下図を用いて、チップの消耗具合を確認する。  
※下図の場合、チップを図の型に合わせ、先端が赤い線より短い場合、交換時期となる。

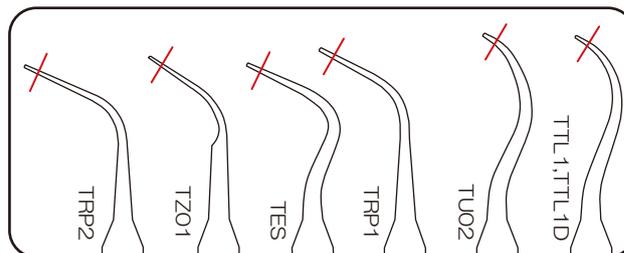

使用者による保守点検事項

1. 患者ごとに、指定する方法および条件で、洗浄等の処理を行った上で滅菌すること。
2. 消毒する場合は、チップを消毒液の中に直接入れないこと。
3. 消毒する場合は、アルカリ性の消毒剤および酸化電位水 (強酸性水、超酸性水) を使用しないこと。
4. 薬品が付着した器具と一緒に滅菌器にかけないこと。
5. 乾熱滅菌など指定の最高滅菌温度を超える滅菌は行わないこと。
6. 滅菌器の状態や滅菌方法によってはチップが変色する場合があるが、性能に影響はない。
7. チップは以下の場合破損しやすい状態になり、怪我などをまねくおそれがある。新しいチップに交換すること。
  - ・ 刃先部がスケーリングによって消耗したもの
  - ・ 腐食したり、錆が発生したもの
  - ・ 落下などの衝撃を受けて変形したもの
  - ・ 刃先部をシャープニング、改造、変形させたもの

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

\*\* 発売元

株式会社ヨシダ

〒110-8507 東京都台東区上野 7-6-9

TEL 0800-170-5541 (ヨシダコンタクトセンター)

03-6880-2155 (携帯電話からの場合)

製造販売元

株式会社ミクロン

〒146-0082 東京都大田区池上 2-17-7

TEL 03-3755-0396 (代) FAX 03-5747-5396

製造元

株式会社ミクロン