

「クイックエンドSIT」の付属品

再使用禁止

スリムインサートチューブ、インサートチューブ

【禁忌・禁止】

1. スリムインサートチューブ、インサートチューブは再使用しないこと。[単回使用を想定しているため]
2. 洗浄・吸引・乾燥時に根管の奥までスリムインサートチューブまたはインサートチューブを差し込みすぎないこと。[根管壁にスリムインサートチューブまたはインサートチューブが密着すると吸引効率が著しく低下したり、吸引圧により根尖組織に損傷を与える恐れがある]

【形状・構造及び原理等】

体に接触する部分の組成

- ・ポリエーテル・エーテル・ケトン
スリムインサートチューブ
- ・ポリプロピレン
インサートチューブ

形状

	スリムインサート チューブ	インサートチューブ	
型式	-	L21	L19
全長	20mm	21mm	19mm

【使用目的又は効果】

使用目的

本製品は歯科医師が歯科治療において、患者の根管内を乾燥させるため、能動型機器に接続し、根管内の洗浄及び水分等の吸引除去に用いる。
本付属品は歯科医師が歯科治療において、患者の根管内を乾燥させるため、根管内の洗浄及び水分等の吸引除去に用いる。


【使用方法等】

適応機種


- ・スリムインサートチューブ
クイックエンドSIT[Quick Endo SIT、Quick Endo SIT-ST]
(認証番号：21900BZX00751000)
- ・インサートチューブ
クイックエンドSIT[Quick Endo、Quick Endo ST]
(認証番号：21900BZX00751000)

使用方法

1. スリムインサートチューブの取り付け、使用
1. スリムインサートチューブを適応機種ノズル部のチューブ挿入口より挿入し、止まる位置まで入れる(約3mm)。

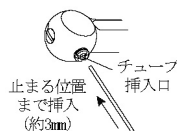

2. 適応機種の取扱説明書に従って使用する。
2. インサートチューブの取り付け、使用
1. インサートチューブを適応機種ノズル部にしっかりと差し込む。

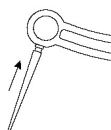

2. 適応機種の取扱説明書に従って使用する。
3. 廃棄
使用済のスリムインサートチューブ、インサートチューブは適応機種付属の取扱説明書に従って、滅菌後廃棄すること。

使用方法等に関連する使用上の注意

1. 本製品は適応機種以外の機器で使用しないこと。
2. スリムインサートチューブ、インサートチューブは下記の場合破損し易い状態になり、怪我などをまねく可能性があるので速やかに新しいスリムインサートチューブ、インサートチューブと交換すること。
 - ・割れ、折れ曲がりなどの破損、変形を生じたもの
 - ・先端部を細く改造、変形させたもの
3. スリムインサートチューブまたはインサートチューブの脱落・破損による誤嚥などを防止するために、ラバーダム防湿法や治療中は患者に鼻呼吸をさせるといった対策を行うこと。

【使用上の注意】

その他の注意

1. 使用前にアルコール清拭およびオートクレーブ滅菌を行うこと。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

1. 最高滅菌温度は摂氏 135 度のため、オートクレーブ滅菌器の設定は摂氏 121 度で 20 分、または摂氏 132 度で 15 分とすること。
2. 薬品が付着している器具とは一緒に滅菌器にかけないこと。
3. 消毒液の中にスリムインサートチューブ、インサートチューブをそのままつけないこと。
4. 消毒の際には、アルカリ性の消毒剤および酸化電位水(強酸性水、超酸性水)を使用しないこと。
5. 乾熱滅菌など、指定の最高滅菌温度を超える滅菌は高温のため、避けること。
6. 滅菌器の状態や滅菌方法によっては、本製品が変色する場合があります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

* 発売元

株式会社ヨシダ
〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9
TEL 0800-170-5541 (ヨシダコンタクトセンター)
03-6880-2155 (携帯電話からの場合)

製造販売元

株式会社ミクロン
〒146-0082 東京都大田区池上2-17-7
TEL 03-3755-0396 (代) FAX 03-5747-5396

製造元

株式会社ミクロン