

機械器具 54 医療用捲綿子
一般医療機器 医科用捲綿子 10172000

スポンジスワブ FR

再使用禁止

【禁忌・禁止】

○再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、プラスチック製のハンドルの先端部にスポンジが付いた検体採取用のスワブです。



- ・スポンジ長: 24±3mm
- ・スポンジ最大径: 5.3±1mm
- ・全長: 152±3mm

2. 滅菌・包装袋等

本品は個包装袋とともに滅菌済みです。

*【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

1～30℃で、水濡れに注意して、直射日光、多湿、凍結を避けて保管して下さい。

また、小児の手の届かない場所に保管して下さい。

2. 有効期間

3年

3. 使用期限

外装及び個包装袋に記載してあります。使用期限を過ぎたものは使用しないで下さい。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 株式会社 ミズホメディー

問合せ先 株式会社 ミズホメディー 学術担当窓口
フリーダイヤル 0120-12-4636
FAX 0942-85-0335

*【使用目的又は効果】

検査のための試料を採取することを目的とした器具

*【使用方法等】

個々の包装袋の開封口よりフィルムをはがし、スポンジ部分に触れないように、本品のハンドルをつまんで取り出し適宜使用して下さい。

*【使用上の注意】

- 1)包装から本品を取り出す時は、包装の上からスポンジ部分及びハンドル部分を指で押さえないで下さい。[スポンジ部分が指と接触し、スポンジ部分が離脱・脱落するおそれがあります。]
- 2)個包装の開封後は、速やかに検体採取を行って下さい。
- 3)本品に破損や折れ曲がり、部分的な白化、汚れなどがあった場合は、使用しないで下さい。
- 4)直腸等粘膜から検体を採取する際には、粘膜を傷つけないよう、無理な力をかけないで下さい。
- 5)臨床検体の取扱いの場合、感染の危険性があるものとして、保護具(眼鏡、手袋、マスク等)を着用の上、十分注意して操作を行って下さい。
- 6)本品を廃棄する場合には廃棄物に関する規定に従い、医療廃棄物、産業廃棄物または感染性廃棄物として処理して下さい。
- 7)スポンジ部の変色等の恐れがあるので、窓際など日光の当たる場所に長時間おかないで下さい。