

類別：器 12 理学診療用器具
一般医療機器 一般名称：温熱用パック(コード：37240010)
販売名：ブランブラン

【禁忌・禁止】

以下の症状を示す人、又は診断を受けた人への使用はやめること。

- ① 急性の炎症、悪性腫瘍、出血している部位、出血傾向の強いとき、細胞感染による化膿性疾患、知覚鈍麻のある部位
- ② その他医師が不相当と判断した人。

【形状・構造及び原理】**1. 形状、構造**

本品は図 - 1 の構造、図 - 2 の形状を有するものである。

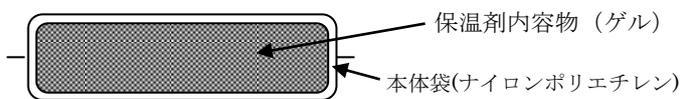


図 - 1 (断面図)

2. 原理

加熱媒体の入った本品を加温装置で加熱・蓄熱し、その温熱効果により患部を温める。

【使用目的又は効果】

加熱された本品を患部にあて、消炎鎮痛処置(温熱治療)を行う温熱用パックである。本品は再使用可能である。

【品目仕様】

本体袋：ナイロンポリエチレン
内容物(加熱媒体)：水、Y パウダー、PG、CMC、防腐剤

【操作方法又は使用方法】**湯煎での加熱方法**

1. 加熱に用いられる機器・器具(恒温水槽)を設置する。
2. 恒温水槽に専用ジェルを浸漬して 65～75℃ の場合 5 分間、75～85℃ の場合、3 分間加熱して下さい。
3. 加熱された専用ジェルを挟み器具等で恒温水槽から取り出し、水分を拭き取った後、破損等が無いかを確認する。
4. 専用ジェルを専用フェルトに入れ、専用サポーターに入れる。適宜の時間患部を温め終了する。
5. 使用後は汚れ・破損等の確認を行った後、恒温水槽で上記の設定で再加熱する。また、続けて使用しない場合は冷めてから冷暗所にて保管する。

タオルウォーマーでの加熱方法

1. おしぼりなどを温める際に用いるタオルウォーマーを設置する。(乾式のみ)
2. 専用ジェルを付属のアルミ箔チャック袋に入れタオルウォーマーで加熱する。
3. 加熱された専用ジェルをタオルウォーマーから取り出し、やけどに注意して破損等が無いかを確認する。
4. 専用ジェルを専用フェルトに入れ、専用サポーターに入れる。適宜の時間患部を温め終了する。
5. 使用後は汚れ・破損等の確認を行った後、タオルウォーマーで再度加熱する。また、続けて使用しない場合は冷めてから冷暗所にて保管する。

電子レンジでの加熱方法

1. 加熱に用いられる電子レンジを設置する。
2. 専用ジェルを付属の不織布袋に入れ電子レンジ 500W で 20 秒間加熱する。
3. 加熱された専用ジェルを電子レンジから取り出し、破損等が無いかを確認する。
※温かさが足りない場合、専用ジェルをよく揉みほぐした後、500W で 10 秒間ずつ再加熱して下さい。
4. 専用ジェルを専用フェルトに入れ、専用サポーターに入れる。適宜の時間患部を温め終了する。
5. 使用後は汚れ・破損等の確認を行った後、一度室温程度まで冷まし電子レンジで再度加熱する。また、続けて使用しない場合は冷めてから冷暗所にて保管する。

裏面を必ずご参照下さい。

ブランブラン

【使用上の注意】

1. 加熱直後の専用ジェルを直接肌に当てて使用しないこと。
必ず専用ジェルを専用フェルトに入れ、専用サポーターに入れて使用すること。
2. 専用サポーターや専用フェルトに入れたまま、湯煎、タオルウォーマー、電子レンジで加熱しないこと。
3. 治療に必要な加温時間を超えないように注意すること。
4. 患者に異常が見られた場合、または施術患部に低温火傷の症状(赤くなったり水泡ができたり等)や痒み等が出た場合は、患者にとって安全な状態で直ちに施術をやめ適切な処置をとること。
5. 「ブランブラン」に破損等の異常が見られた場合も使用・施術を中止し新しいものと取り換えること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間】

1. 使用後は清拭して保管すること。
2. 「ブランブラン」は、一部消耗品的要素があるので、破損状況を見極め定期的に交換すること。
3. 保管は高温、極寒、多湿の場所や直射日光を避け、先入れ先出しを守ること。(保管・管理に怠りがある場合、劣化の原因になることがある。)
4. 使用期間は原則的に 800 時間又は 5 ヶ月間が望ましいが、破袋や傷、大幅な重量減少が無い場合は使用できる。

【取り扱い上の注意】

1. 専用ジェルはナイロンポリエチレンフィルムに包まれたゲル剤で構成されているので、乱暴に扱ったり、鋭利なものが触れると破損の原因になるのでご注意ください。

【保守・点検にかかる事項】

1. 「ブランブラン」は一部消耗品的要素があるので、施術前に破損がないことを定期的に点検し、内容物の液漏れが無い、フィルムに破損は無いかを点検し不慮の障害を未然に注意すること。

【包装】

ブランブラン 1 個単位 (個箱包装)

【製造販売業者】

名称 三重化学工業株式会社
住所 三重県松阪市大口町 262-1
連絡窓口 企画開発室
電話番号 0598-51-2361

GS1-128



(01)04978797400302



株式会社ユメロン黒川

本社：〒915-0822 福井県越前市元町 5-7 TEL 0778-24-0500 / FAX 0778-24-5041
ホームページ URL <http://www.yumeron.com>