

*2021 年 6 月改訂(第 2 版 新記載要領に基づく改訂)
2005 年 7 月作成(初版)

RACOON

届出番号 : 27B2X90001SSV002

機械器具 (74) 医薬品注入器

一般医療機器

単回使用輸液容器

JMDN コード:35127000

シールステリバイアル 10ml


再使用禁止

禁忌・禁止

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 構成及び外観

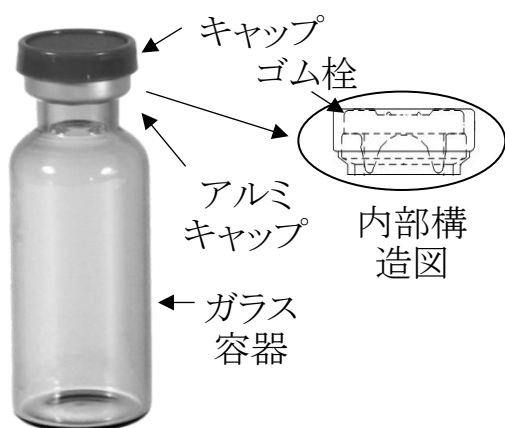

2. 原材料

ホウ珪酸ガラス、ブチルゴム

【使用目的又は効果】

輸液混合物を入れるために用いる。

【使用方法等】

キャップを外し、使用する。

*【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- ・滅菌済みにつきアルミキャップを外して使用しないこと。
- ・万が一、破損している等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- ・使用後は感染防止に留意し、安全な方法で直ちに処分すること。

2. その他の注意

- ・高熱を発する医療機器、火気などに接触させないこと。
- ・開封後、ゴム栓の汚染に注意すること。
- ・通気針(エア針)を使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管方法

高温多湿な場所を避け、室内で保管すること。

2. 有効期間等

包装箱に記載(自己認証による)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

RACOON

【製造販売業者】

三田理化工業株式会社

連絡先:消耗品営業 G

電話番号 06-6458-0971

FAX 番号 06-6458-2393

【製造業】

三田理化工業株式会社

連絡先:開発センター

電話番号:0795-28-4354