

医療用品 03 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN コード：70976000

ミドリ A F メディカルベルテ 7 3 1 1

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は合成ゴム（アクリロニトリルブタジエンゴム）を主材料とし、パウダーを含まない、左右兼用で、未滅菌の使い捨て形式の手袋である。

【使用目的又は効果】*

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する合成ゴム製手袋である。

【使用方法等】*

使用方法
小箱の上部の手袋取り出し口を開封し、手袋を取り出して装着する。
装着後、手袋に穴や破れなどの異常がないか確認してから使用する。

【使用上の注意】*

- (1) ご使用前に手袋に穴や破れなどの異常が無いがよくご確認ください。
異常が確認された場合には使用しないでください。また、包装が破損、汚損している場合は使用しないでください。
- (2) ご使用中にも、手袋の状態を適時チェックすることをおすすめします。
- (3) 着色ムラがある場合がありますが、品質上問題ありません。
- (4) アレルギー反応などにより、体質によってはかゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
- (5) 熱に弱いので、熱いものには触れないでください。
- (6) 薬品や溶剤（ガソリン、ベンジン等）には使用しないでください。膨潤・浸透することがあります。
- (7) 無理な装着や、必要以上に力が掛かりますと破損する恐れがあります。
- (8) 爪先や刃物などの鋭利なもので傷がつくと破れや穴あきの原因となります。
- (9) 本品を使用したことによって生じた直接的、派生的、付随的または間接的損害につきましては、弊社は責任を負いかねますのでご理解願います。

【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管方法
水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管する。
包装開封後は、直射日光や蛍光灯下やオゾンが発生する機械を避け、エックス線機器等に近づけないこと。
2. 使用期限
包装箱に記載する。〔自己認証（製造所データ）による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

ミドリ安全用品株式会社

製造元

外国製造業所在国：マレーシア

販売元

〒150-0012 東京都渋谷区広尾 5-4-3
ミドリ安全株式会社
TEL 03-3442-8283