

機械器具(15) 舌圧子
一般医療機器 舌圧子 14066000

滅菌済木製舌圧子

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 口腔、咽頭の検診以外の使用禁止
2. 再使用禁止
3. 再滅菌禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
ミウル・ヘルスケア株式会社
電話番号: 03-6260-6138

外国製造業者

輸入先国: 中華人民共和国
製造所: Goodwood Medical Care Ltd.


【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本品は、天然木の白樺から板状に加工したものを滅菌した製品である舌を固定及び移動させて口腔内の組織を検査するために用います。

2. 形状

形状は両端に丸みがあり板状である。

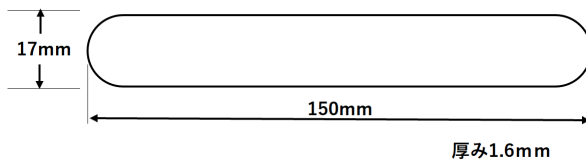

【使用目的又は効果】

<使用目的>

本品は舌を固定又は移動させて、口腔内の組織を検査するために用いる手術器具である。

【使用方法等】

1. 包装を開封し、本品を取り出して患者の口腔内に挿入する。
2. 本品で舌を押さえて固定し、咽頭部を観察する。

【使用上の注意】

1. 本品は天然木の加工品のため、輸送、保管中の環境等により、割れ、欠け、ささくれ等が生じることがある。その場合は使用を避けること。
2. 破損する可能性があるため、過度な力で押さえないこと。
3. 体内へ留置しないこと。
4. 包装が破損、汚損している場合、及び製品に破損、変形、異常が認められる場合は使用しないこと。
5. 開封後は速やかに使用すること。

【保管方法及び有効期限】

<保管方法>

水ぬれに注意し、高温、多湿な場所、及び直射日光を避けて清潔な場所で保存すること。

<使用期限>

滅菌日より3年間(包装に表示)[自己認証(当社データ)による]