

ムツミデンタルミラー

【形状・構造及び原理等】

【形状・構造】

歯鏡部直径：22.0 mm

【材料】

ステンレス、ガラス板、その他

【原理】

鏡により反射させることで口腔内診査、又は圧排の為に用いる歯科用器具。

【使用目的又は効果】

口腔内の状態を検査・観察するために使用する。

【使用方法等】

- ① 本品が滅菌済みかどうかを確認する。オートクレーブを使用する際は、下記【使用方法に関連する使用上の注意】に従い滅菌すること。
- ② 本品を歯鏡用ミラーハンドル・ミラーホルダーに装着する。
- ③ ハンドル部分を持ち、先端のミラーにより口腔内の状態を検査・観察する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) 本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外に使用しないこと。
- 2) 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 3) 使用する前には適切な洗浄・滅菌をすること。
- 4) 洗浄の際、下記を留意すること。
 - ・金属腐食を起こす可能性のある薬剤（超酸性水等）を使用しないこと。
 - ・できるだけ水道水ではなく、精製水（純水）を使用すること。
 - ・洗浄後は、すぐに乾燥させること。
- * 5) 家庭用洗剤を使用すると器具を腐食するおそれがあるため使用しないこと。洗浄には歯科用防錆洗浄剤を使用すること。
- * 6) 超音波洗浄は、剥離の原因になるので使用はさけること。
- * 7) オートクレーブで滅菌する場合、下記を留意すること。
 - ・薬剤を使用しての滅菌は避けること（できるだけ水道水ではなく、精製水（純水）を使用して下さい）。
 - ・滅菌温度、乾燥温度、及び庫内温度は 134℃以下を厳守すること（特に乾燥時、ヒーター近くなど高温になりやすい場所へ本品を置かないよう注意して下さい）。
- ** 8) アルコール系薬剤の使用を避けること。
- 9) 使用前に、変形、キレツ、損傷等がないか確認すること。
- 7) ミラーハンドル・ミラーホルダーに確実に装着されているか確認してから使用すること。
- ** 8) 汚れや薬剤が付着した場合、すぐに除去すること（乾燥すると除去しにくくなる）。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- 1) 変形、キレツ、損傷、錆、表面キズ、曲がり、汚損等のあるものは使用しないこと。これらが確認された場合は、使用を中止すること。
- 2) 本品を使用して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴がないことを患者に確認すること。また、本材の使用により、過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- ** 3) 患者ごとに洗浄・滅菌を行い使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・本材は、水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。
- ・十分に乾燥させた状態で保管すること。
- * 錆のある器具と合わせて保管しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：睦化学工業株式会社

住所：〒510-0804 三重県四日市市万古町 8 番 9 号

電話番号：059-331-2354

外国製造業者：World Medical Dent.

（ワールドメディカルデント）

製造国：パキスタン