

器具機械 66 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具（コード 70682000）

カートリッジディスペンサーⅡ

【形状・構造及び原理等】

【形状・構造】

下記通り



【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：睦化学工業株式会社

住所：〒510-0804 三重県四日市市万古町 8 番 9 号

電話番号：059-331-2354

外国製造業者：CROWN DELTA CORPORATION
(クラウンデルタコーポレーション)

製造国：アメリカ

【原理】

引き金を握るとプランジャーが繰り出され、装着されたカートリッジ内の印象材が押し出される。

【使用目的又は効果】

本品に対応したカートリッジタイプの各印象材の練和に使用する。

【使用方法等】

- ① ラッチレバーを下げながら、プランジャーを奥まで引く。
- ② ロックレバーを引き上げてカートリッジを差し込み、ロックレバーを元に戻す。
- ③ カートリッジのキャップを取り外し、引き金を引きペーストを少量吐出させ、左右両方のペーストが均一になるまで吐出する。
- ④ ミキシングチップをカートリッジに取り付ける。
- ⑤ 引き金を引くと、印象材の主材と硬化材がミキシングチップ内で練和され押し出される。
- ⑥ 作業が終了したら、プランジャーを奥まで引きカートリッジを取り外す。
- ⑦ 使用済みミキシングチップを取り外し、吐出口の余剰ペーストを除去してからカートリッジのキャップを装着する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) 本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外に使用しないこと。
- 2) 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 3) オートクレーブの種類によっては、破損する恐れがある為注意すること。
- 4) 薬液での洗浄は腐食の恐れが有る。消毒用のエタノール以外の薬液での消毒は避けること（但し、長時間の浸漬等は避ける）。
- * 5) 乾燥滅菌は行ないこと。
- * 6) 引き金が重く感じられた場合は、無理に押し出そうとせずにミキシングチップを交換してから使用すること。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- 1) 変形、キレツ、損傷、錆等のあるものは使用しないこと。これらが確認された場合は、使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。