

## アルジミキサー

### 【禁忌・禁止】

- 1) 改造を行い使用しないこと。
- 2) 不具合、故障状態で使用しないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

#### 【形状・構造】

下記通り



本体寸法 W240×D280×H300mm  
重量 15.5kg  
定格店圧 AC100V(50/60Hz)  
定格消費電力 最大 350W

#### 【原理】

印象材及び水が適量入った専用カップを本体の所定の位置にセットし、本器の動力でそのカップが自転及び公転することにより印象材が練和される。

### 【使用目的又は効果】

アルジネート印象材を練和する。

### 【使用方法等】

- ① 本体背面にある主電源スイッチを入れる。
- ② コントロールパネルにある電源スイッチを入れ、操作パネルのデジタルタイマーが点灯するのを確認する。
- ③ 適量(印象材メーカーの指示量)の印象材と水(冷水が望ましい)を用意する。
- ④ 練和カップに計量した印象材と水を入れる。
- ⑤ 練和棒にて軽く練和し、練和カップの蓋を閉めて本体にセットする。
- ⑥ 本体の蓋を閉めて、タイマーをセットし、スタートボタンを押す。
- ⑦ 回転が終了したのを確認後、本体の蓋を開け練和カップを取り出す。
- ⑧ 練和カップの蓋をあけ、専用スパチュラにて印象材を取り出す。

#### 【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) 本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外に使用しないこと。
- 2) 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 3) 本品での練和は、印象材の硬化時間が短くなるので注意すること(冷水での練和が望ましい)。
- 4) 練和カップをセットしないで練和機をスタートさせないこと。
- 5) 1回に練和できる量は25g~100gです。
- \* 6) 練和カップの蓋中央部にある穴が塞がると蓋の締まりが悪くなるため、清掃すること。
- 7) 本器は、安定した強度のある架台に設置すること。
- \* 8) 内部及び外周部が高温になることがあるためやけど等に十分注意すること。
- \* 9) 水のかからない場所に設置すること

### 【使用上の注意】

#### 【重要な基本的注意】

- 1) 変形、キレツ、損傷、錆等のあるものは使用しないこと。これらが確認された場合は、使用を中止すること。
- 2) 本器から異音、異臭等が発生したときは、本器の使用を直ちに中止し、電源を切ること。
- \* 3) 修理に出す場合や、遠方へ送る際は、本品底にある「輸送固定ネジ」を取り付け、締めてから送ること。
- \* 4) 本品回転中に異常を感じた場合、スタートボタンを押すこと(中断できます)。

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### 【保管方法】

- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 睦化学工業株式会社

住所: 〒510-0804 三重県四日市市万古町8番9号

電話番号: 059-331-2354

外国製造業者: Motion Dental Equipment Corp

(モーションデンタルエクイップメント社)

製造国: 台湾