

プレートパラフィンワックスⅡ

【禁忌・禁止】

- 1) 高温になる場所に保管しないこと。

【形状・構造及び原理等】

本材は、下記品目より構成される。

形状	色調	成分
板状	ピンク	パラフィンワックス、カルナバロウ、その他

レギュラータイプ：145mm×75mm（厚さ：1.4mm）

ビッグタイプ：175mm×90mm（厚さ：1.4mm）

【原理】

高温で軟化させ、義歯床、咬合採得等に用いる。

【使用目的又は効果】

主として義歯床の仮床、人工歯の排列等に用いる。

【使用方法等】

- ① 本品を炎で加熱し、適度に軟化させたところでロール状に巻いて棒状する。
- ② 棒状にしたワックスを馬蹄形にして、基礎床に圧接する。
- ③ 必要に応じて盛り足しや削りを行い、咬合床を形成する。
- ③ 咬合床の調整、人工歯の配列、ろう義歯作製は、通法に従い作業する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) 本品可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。
- 2) 本品使用の際は、火傷をしないよう注意すること。
- * 3) 本品焼却の際は、局所排気装置、換気扇などを設けて密閉した部屋での作業を避け、焼却により発生する煙及び蒸気を吸入しないこと。
- 4) 本品は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- 5) 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- 1) 本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴がある術者は、手袋などを用いて直接本材に触れないようにすること。また、本材の使用により過敏症を起こした場合には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・本品は高温、直射日光を避けて保管すること。
- ・使用及び保管場所には、消化装置を備えること。
- ・本材は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：睦化学工業株式会社

住所：〒510-0804 三重県四日市市万古町8番9号

電話番号：059-331-2354

製造業者：LIANG LINN ENTERPRISE CO.,LTD.

（リャンリンエンタープライズコーポレーション）

製造国：台湾