

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科予防治療用ブラシ（コード 35768000）

ムツミ プロフィーブラシ

【禁忌・禁止】


- ・再使用禁止
- ・本品の材質、又は類似成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある医療関係者、及び患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

【構成】

	主な組成
ブラシ部	ナイロン
軸部	真鍮（ニッケルメッキ）

タイプ：CAタイプ

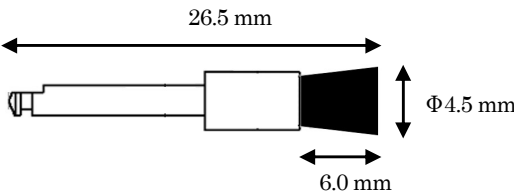

【原理】

本品を歯科用ハンドピースに取り付けて、研磨材を塗布し回転させることにより、歯面を清掃・研磨する。

【使用目的又は効果】

歯科衛生士、歯科医師等が歯面の清掃及び研磨に用いる。歯面を清潔にし、光沢を与える。

【使用方法等】

- ①本品を歯科用ハンドピースに取り付ける。
- ②本品に研磨材を適量付ける。
- ③歯科用ハンドピースを回転させ、歯面を清掃・研磨する。
- ④研磨後、口腔内を洗浄し、研磨材を除去する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) 本品は歯科用ハンドピースメーカーの指示に従い、軸部分を奥まで確実に挿入し、ロックされていることを確認してから使用すること。
- 2) 使用前に口腔外で回転させ、振れが無いことを確認すること。
- 3) 2000 rpm を越えた回転数で使用しないこと。
- 4) 無理な角度、過度な加圧での使用をさけること。
- 5) 本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外に使用しないこと。
- 6) 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- 1) 本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴がないことを患者に確認すること。また、本品の使用により、過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- 2) 本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴がある術者は、手袋などを用いて直接本品に触れないようにすること。また、本品の使用により過敏症を起こした場合には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。
- 3) 本品を使用する際、術者は保護眼鏡などを使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・直射日光、水分、蒸気避け、室温にて保管する。
- ・錆びた器具と一緒に保管しないこと。
- ・歯科の従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：睦化学工業株式会社
住所：〒510-0804 三重県四日市市万古町8番9号
電話番号：059-331-2354
外国製造業者：DentMIT Technology, Inc.
(デントミット テクノロジーインク)
製造国：台湾