

機械器具 05 麻酔器並びに麻酔器用呼吸囊及びガス吸収かん
管理医療機器 単回使用麻酔用呼吸回路バッグ 34877000

MMI ディスポ麻酔バッグ

再使用禁止

【警告】 〈使用方法〉


1. 本品が呼吸回路に確実に接続され、漏れや閉塞が発生しないことを確認してから使用すること[適切な呼吸管理ができないおそれがある]。
2. 使用中は、本品と接続する呼吸回路に漏れや閉塞が発生しないよう常に監視すること。
3. バッグの加圧を行う際は、患者の肺容量を十分に考慮し、過度の内圧が加わらないように注意すること[患者の肺を損傷するおそれがある]。

【禁忌・禁止】 〈使用方法〉

1. 再使用禁止 [機能低下又は交差感染のおそれがある]。
2. 可燃性麻酔薬との併用又は雰囲気下で使用しないこと [本品は非導電性であり、爆発又は発火のおそれがある]。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状
代表的写真

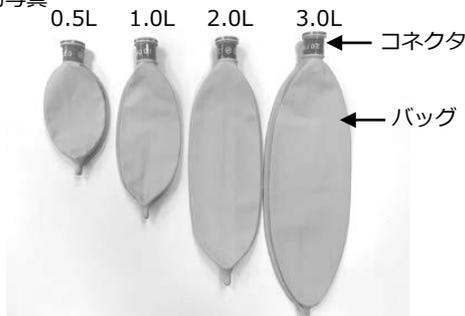

サイズ (バッグ容量)	コネクタ径※
0.5L	内径 22mm
1.0L	
2.0L	
3.0L	

※コネクタの寸法・形状が ISO 5356-1:2015 に適合する。

2. 原理
呼吸回路より流入した吸気ガス又は呼気ガスをバッグに貯留する。

【使用目的又は効果】

呼吸回路の吸気側又は呼気側に接続して使用し、呼吸回路中において呼吸ガスを保存する。

【使用方法等】

1. 使用方法
 - 1) 本品のコネクタを呼吸回路へ確実に接続する。
 - 2) 呼吸管理を開始する。必要に応じてバッグの加圧を行う。
 - 3) 使用後は、適切な方法にて廃棄する。
2. 使用方法に関連する使用上の注意
 - 1) 本品及び呼吸回路の接続部は両手で持ってねじって固定し、緩みがないことを確認すること。
 - 2) 本品に無理な力を加えて閉塞が発生しないようにすること。
3. 組み合わせて使用する医療機器
本品は、コネクタ径に合致する JIS T 7201-2-1:2017 規格又は ISO 5356-1:2015 規格基準に準拠するコネクタを持つ呼吸回路内の製品と接続して使用する。

* 【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 1) 使用前に、汚れ・破損等がないか点検すること。
- 2) 適切なサイズを選択すること。
- 3) 本品を使用するときは換気条件を確認し再設定をすること [死腔量が増えるため]。
- 4) 本品を薬液等に浸漬したり滅菌しないこと [機能低下及び有害物質が残留するおそれがある]。
- 5) 使用中は本品と接続する呼吸回路及び患者の状態に異常が発生していないか常に確認すること。
- 6) 鋭利な器具との接触は避けること [バッグが破損するおそれがある]。
- 7) 本品は MR Safe であり、一般的な MR 検査による影響はない [自己認証による]。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水濡れに注意し、高温・多湿・直射日光を避け、清潔な場所で保管すること。
2. 有効期間
3年 [自己認証 (当社データ) による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: **村中医療器株式会社**
TEL: 0725-53-5546



製造業者: シーナ社 台湾
Hsiner Co.,Ltd.