

機械器具 06 呼吸補助器
管理医療機器 麻酔回路セット 70567000
(管理医療機器 呼吸回路セット 70566000)

MMI 麻酔/呼吸 回路 Y 型

再使用禁止

【警告】

＜使用方法＞

1. 使用前に、回路の接続に誤りがないか、各接続部が気密かつ確実に接続部等で漏れがないか、回路によじれ及びキंक等がないかを確認すること〔適切な呼吸管理ができないおそれがある〕。
2. 使用中は、回路全体に漏れや閉塞が発生しないよう常に監視すること〔適切な呼吸管理ができないおそれがある〕。
3. バッグの加圧を行う際は、患者の肺容量をじゅうぶんに考慮し、過度の内圧が加わらないように注意すること〔患者の肺を損傷するおそれがある〕。

【禁忌・禁止】

＜併用医療機器＞


1. 本品と人工鼻又は人工鼻フィルタを接続する場合は、ネブライザ又は加温加湿器を併用しないこと〔人工鼻及び人工鼻フィルタが目詰まりを起こし、患者が呼吸困難となるおそれがある〕。
2. 本品とフィルタを接続する場合は、ネブライザを使用しないこと〔フィルタが目詰まりを起こし、患者が呼吸困難となるおそれがある〕。

＜使用方法＞

1. 再使用禁止〔機能低下又は交差感染のおそれがある〕。
2. 可燃性麻酔薬との併用又は雰囲気下で使用しないこと〔バッグは非導電性であり、爆発又は発火のおそれがある〕。
3. 洗浄、浸漬、滅菌はしないこと〔機能低下及び有害物質が残留するおそれがある〕。

**【形状、構造及び原理等】

1. 形状
1) 回路

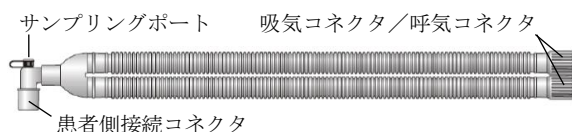

回路長	150cm、180cm
患者接続側コネクタ	外径 22mm/内径 15mm
吸気コネクタ／呼気コネクタ	内径 22mm

- 2) バッグ



販売名：MMI ディスポ麻酔バッグ
認証番号：229ADBZX00109000

サイズ（容量）	0.5L、1.0L、2.0L、3.0L
コネクタ径	内径 22mm

2. 原理

麻酔器又は人工呼吸器等に接続し、麻酔器等からの吸気ガス及び患者からの呼気ガスを通す。

【使用目的又は効果】

麻酔器等に接続し、麻酔中の呼吸管理に用いる。
人工呼吸器等に接続し、呼吸管理に用いる。

【使用方法等】

1. 使用方法

- 1) 本品のすべての接続部及びコネクタがしっかりと接続され、緩んでいないことを確認する。
- 2) 回路の吸気コネクタ／呼気コネクタを、麻酔器等の吸気側ポート及び呼気側ポートへ接続する。
- 3) 患者側接続コネクタを患者のマスク等に取り付ける。
- 4) 必要に応じて、バッグを麻酔器等へ接続する。
- 5) 回路内を加圧し、本品や接続機器との接続部でリークがないことを確認する。
- 6) 呼吸管理を開始する。必要に応じてサンプリングポートを使用できる。
- 7) 使用後は、適切な方法にて廃棄する。

2. 使用方法に関連する使用上の注意

- 1) 各接続部は両手で持ってねじって確実に固定し、緩みがないことを確認すること。
- 2) 本品に無理な力を加えないこと〔閉塞が発生するおそれがある〕。
- 3) サンプリングポートを使用しないときは、キャップを確実に閉めておくこと。

3. 組み合わせて使用する医療機器

本品は、コネクタ径に合致する JIS T 7201-2-1:2017 規格又は ISO 5356-1:2015 規格基準に準拠するコネクタを持つ製品と接続して使用する。

*【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 1) 使用前に、汚れ・破損等がないか点検すること。
- 2) バッグは、患者の肺容量等を考慮し、適切なサイズを選択すること。
- 3) バッグを使用するときは換気条件を確認し再設定をすること〔死腔量が増えるため〕。
- 4) 使用中は本品の接続及び患者の状態に異常が発生していないか常に確認すること。
- 5) 使用中は回路内部に分泌物が蓄積していないか、破損や劣化等がないか適宜確認し、必要に応じて新しい回路に交換すること。
- 6) 鋭利な器具との接触は避けること〔バッグが破損するおそれがある〕。
- 7) 気道内圧チューブ又はサンプリングチューブを接続する場合は、水分が流れ込まないように、チューブの差込口が常に上になるようにすること。また、使用中に水分が

見られた場合には、速やかに取り除くこと〔閉塞のおそれがある〕。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水濡れに注意し、高温・多湿・直射日光を避け、清潔な場所
で保管すること。
2. 有効期間〔自己認証（当社データによる）〕
 - 1) 回路：製造年月日より 5 年
 - 2) バッグ：製造年月日より 3 年

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：村中医療器株式会社
TEL:0725-53-5546
<http://www.muranaka.co.jp/>

製造業者：シーナ社 台湾
Hsiner Co.,Ltd.