

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 吸引チューブ 16779000

BONIMED サクションチューブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
〈使用方法〉
再使用禁止、再滅菌禁止。

**【形状・構造及び原理等】

1. 形状
代表的写真



2. 原理
吸引器、回収容器、吸引嘴管等に接続することによって吸引する。

【使用目的又は効果】

吸引器と回収容器との接続に用いる柔軟性のあるプラスチック製のチューブをいう。吸引嘴管等との接続に用いる場合もある。

*【使用方法等】

1. 使用方法
滅菌包装より無菌的に取り出し、吸引器、回収容器、吸引嘴管等の接続口に接続する。
2. 使用方法に関連する使用上の注意
本品を折り曲げた状態、引っ張った状態で使用しないこと。
3. 組み合わせて使用する医療機器
本品は、「販売名:MMI 低圧持続吸引器、認証番号:225ADBZX00123000」、「販売名:MMI コネクター、届出番号:27B1X00024000335」と併用できる。

*【使用上の注意】

その他の注意
本品をチューブ(コネクター)、吸引器、回収容器又は吸引嘴管等に接続するとき、ゆるみがないことを確認し、確実に接続すること。

【保管方法及び有効期間等】

滅菌有効期間:3年[自己認証(当社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:村中医療器株式会社
TEL:0725-53-5546
<http://www.muranaka.co.jp/>

製造業者:パシフィック ホスピタル サプライ社 台湾
Pacific Hospital Supply Co., Ltd.