

機械器具 50 開創又は開孔用器具
一般医療機器 挿管用喉頭鏡 70948009

X P ディスポーザブルブレード

再使用禁止

【禁忌・禁止】
〈使用方法〉
再使用禁止

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: **村中医療器株式会社**
TEL 0725-53-5546



製造業者: ハイネ オプトテック社 ドイツ
HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG

**【形状・構造及び原理等】

1. 構成
本品は、併用する喉頭鏡ハンドルに装着して使用する。

代表的写真



マッキントッシュ型



ミラー型

2. 原材料
ブレード: アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合体又はポリカーボネート/アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合体

3. 原理
喉頭鏡の挿入で喉頭展開させることによる。

【使用目的又は効果】

麻酔又は救急医療等で、気道確保のために気管(人の気道)への気管内チューブの挿入、配置を支援したり、異物を除去したりするために用いる器具をいう。喉頭及びその周辺の観察、診断、治療にも用いる。

**【使用方法等】

1. 使用方法
 - 1) 併用する喉頭鏡ハンドルにブレードを装着し、ブレードの先端から照明光が照射されることを確認する。
 - 2) 使用後は喉頭鏡ハンドルからブレードを取り外し廃棄する。
2. 使用方法等に関連する使用上の注意
 - 1) 使用前に必要なに応じて滅菌する場合は EOG 滅菌を推奨する。
 - 2) 高圧蒸気滅菌は行わないこと。
3. 組み合わせて使用する医療機器
本品は、ISO 7376 に適合する喉頭鏡ハンドルと併用する。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 1) 患者に適したサイズを選択すること。
- 2) 落としたり、硬いものにぶついたりしないよう注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

有効期間: 5年 [自己認証(当社データ)による]