

機械器具 29 電気手術器
一般医療機器 単回使用電極クリーナー 70654000

BONIMED チップクリーナー

再使用禁止


**【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

再使用禁止、再滅菌禁止。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

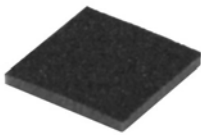

2. 原理

研磨砥粒の表面に被研磨物を当てて、付着物をこすり落とす。

【使用目的又は効果】

アクティブ電極を使用した際、電極に付着した炭化物等の除去を目的とした、単回使用のクリーナー。

**【使用方法等】

1. 使用方法

- 1) 本品を、滅菌包装より無菌的に取り出す。
- 2) 付着した炭化物等を擦るように除去する。
- 3) 裏面のシールをはがして、術衣、器械台などに貼り付けて、使用したり、指で山折りにしてバイポーラ用ピンセットの内側の付着物を除去することができる。

2. 使用方法に関連する使用上の注意

過度な力で擦らないこと [バイポーラ用ピンセット等の先端部を傷つけることがある]。

**【使用上の注意】

その他の注意

使用前に、汚れ・破損・変形等を点検すること。

**【保管方法及び有効期間等】

滅菌有効期間：製造年月より 3 年

[自己認証（当社データ）による]

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：村中医療器株式会社

TEL:0725-53-5546

<http://www.muranaka.co.jp/>

製造業者：パシフィック ホスピタル サプライ社 台湾

Pacific Hospital Supply Co., Ltd.