

機械器具 36 医療用ピンセット  
一般医療機器 ピンセット 35079001

## ピンセット

### \*\*【形状・構造及び原理等】

#### 1. 形状

代表的写真



#### 2. 原材料: ステンレス鋼

#### 3. 原理

2枚の先端部を閉じることによって物体を保持する。

### 【使用目的、効能又は効果】

保持する物体を閉じて挟む手術器具をいう。ハンドルは永久的に結合している。この器具のグループには、すべての手術用ピンセット、マイクロピンセットが含まれる。

### \*\*【品目仕様等】

物体を保持する二つの保持面は平坦であり、面は合致し、かつ力を加えたときかみ合わせがずれない。先端の幅が、基準値内にあること。

### 【操作方法又は使用方法等】

- 1) 使用前に必ず洗浄し、滅菌する。134℃/5分の高圧蒸気滅菌条件を推奨する。
- 2) 親指と人差し指等を用いて握ると二つの保持面は閉じる。開くときには握る力を弱める(潜在的なバネの反発力を利用する)。

### \*【使用上の注意】

1. 禁忌・禁止
  - 1) 使用目的以外に使用しないこと。
  - 2) 本品の二次的加工をしないこと。
  - 3) 電気メスをを用いた接触凝固は行わないこと [術者が感電・熱傷の危険又は器具表面を損傷する可能性がある]。
2. 重要な基本的注意  
本品をクロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)患者、又はその疑いのある患者に使用した場合は、クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)に関する国内規制及びガイドライン等を遵守すること。
3. その他の注意  
器具を保護する保守油が塗布されているので、適切な油除去を行ってから滅菌処理を行うこと [油が付着したまま高圧蒸気滅菌を行うと、器具が変色する可能性がある]。

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 保管方法
  - 1) 清潔で良好な乾燥状態を保てる場所で保管する。
  - 2) 滅菌した状態で保管する場合、滅菌有効期限を管理する。
2. 使用期限(耐用期間)  
最高1000回の高圧蒸気滅菌(134℃/5分)が可能。

### 【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄・消毒、滅菌
  - 1) 汚れが乾燥し落ちにくくなるのを防ぐため、付着した血液・体液・組織・薬品等は直ちに洗浄し、消毒する。
  - 2) 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、その適正濃度と取扱方法を守る。中性洗剤を推奨する。
  - 3) 超音波洗浄装置・ウォッシャーディスインフェクター等の洗浄装置で洗浄する場合、汚れが落ちやすい状態でバスケット等に収納して処理する。その際、ピンセット先端に異物(硬物)があたらないように注意する。
  - 4) 金属タワシ、クレンザー(磨き粉)等は、器具表面を損傷するので使用を避ける。
  - 5) 仕上げすぎには、精製水・脱イオン水・濾過水等の使用を推奨する。
  - 6) 洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥する。
2. 点検  
滅菌前、使用前に汚れ・破損等を点検する。

### 【包装】

1本/袋

### \*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者: 村中医療器株式会社  
〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目8番2号  
TEL 0725-53-5546

製造業者: ゲオメッド メディチン テクニーク社 ドイツ  
Geomed Medizin-Technik GmbH & Co.