

機械器具 15 舌圧子
一般医療機器 舌圧子 14066000

ステンレス製舌圧子

【形状・構造及び原理等】

1. 形状



2. 原材料：ステンレス鋼

3. 原理

片面を把持して操作するもので、凹凸がなく滑らかな平面を持つ反対面によって、圧力集中を起こさずに舌を圧迫固定する。

【使用目的又は効果】

舌を移動させて、周辺臓器及び組織の検査を容易にするために用いる器具をいう。

【使用方法等】

- 1) 使用前に、必ず洗浄・滅菌する。134℃/5 分の高圧蒸気滅菌条件を推奨する。
- 2) 舌に押し当てない側を握って操作する。

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄・消毒、滅菌

- 1) 汚れが乾燥し落ちにくくなるのを防ぐため、付着した血液・体液・組織・薬品等は直ちに洗浄し、消毒する。
- 2) 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、その適正濃度と取扱方法を守る。中性洗剤を推奨する。
- 3) 超音波洗浄装置・ウォッシャー・ディスインフェクター等の洗浄装置で洗浄する場合、汚れが落ちやすい状態でバスケット等に収納して処理する。
- 4) 金属タワシ、クレンザー（磨き粉）等は、器具表面を損傷するので使用を避ける。
- 5) 仕上げすぎには、精製水・脱イオン水・濾過水等の使用を推奨する。
- 6) 洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥する。

2. 点検

滅菌前、使用前に汚れ・破損等を点検する。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：村中医療器株式会社

TEL 0725-53-5546

<http://www.muranaka.co.jp/>

製造業者：シャanghai メディカル インストルメント（グループ）エルティティイー コーポ
レーション サージカル インストルメント ファクトリー 中華人民共和国
Shanghai Medical Instruments (Group)
Ltd., Corp. Surgical Instrument Factory